

ご購入ありがとうございました


ケアメディックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3丁目23番1号

TEL 03-3837-0551 FAX 03-3837-0554 HP <http://www.caremed.co.jp/>

取扱説明書 / 保証書

移動もできるシャワーチェア

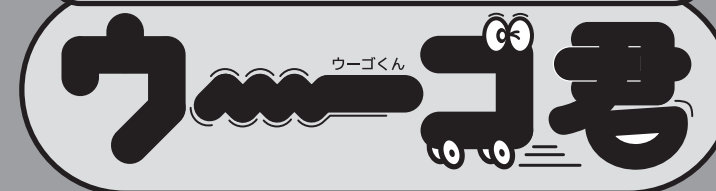

品番：SCA-01

介護保険 特定福祉用具 入浴補助用具

最大使用者体重：100 kg



ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください

この度は、【移動もできるシャワーチェア ウーゴ君】をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いいただきますよう宜しくお願いいたします。

また、取扱説明書にある保証書の『ご購入日・販売店名』をご記入いただき、大切に保管をしてください。

ケアメディックス株式会社

製品改良などにより、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

SCA-01-2306-01

■利用者および介助者の皆様へ大切なお知らせ■

- 本製品は浴室用ですので屋外やそれ以外の場所での使用はしないでください。
- 本製品を水やお湯が浸かっている浴槽へ沈めたりしないでください。
- 本製品に劣化や損傷を与えてしまうため、温泉・プール・サウナでの使用はしないでください。
- 本製品の使用後は必ず石鹸や付着物を洗い流し、水分をふき取ったのちに乾かしてください。
- 本製品は1人のみ座ることができます。また、最大使用者体重は100 kgまでとなります。
- 本製品の使用は介助者が必ず付き添い、操作することを前提としています。利用者だけの使用はしないでください。
- 付き添う介助者は本製品を使用する前に操作の確認と練習をおこなってください。
- 本製品を使用する前に安全に使用ができる環境か確認をおこなってください。
- 本製品を使用する前に製品の状態確認と動作確認をおこなってください。異常や不具合がある際は使用を中止してください。
- 付き添う介助者は、本製品を停止して使用する際は必ず全てのキャスターのストッパーをかけて使用してください。
また、キャスターを浮かせて（ティッピング）の使用はしないでください。
- 本製品を移動して使用する際は必ず利用者の足がフットレストのプレート上にあることを確認してください。また、移動・方向転換の際は足がフットレストの上から落ちないように注意をしてください。

■もくじ■

大切なお知らせ	・ ・ ・ 2	ご使用方法	・ ・ ・ 7
安全上のご注意	・ ・ ・ 3	清掃・洗浄方法	・ ・ ・ 12
各部の名称	・ ・ ・ 5	製品仕様	・ ・ ・ 12
製品寸法図	・ ・ ・ 5	メンテナンス販売部材	・ ・ ・ 13
組立て方法	・ ・ ・ 6	保証書	・ ・ ・ 14

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を受けて、お届けしたものです。
お客様が取扱説明書・本体添付シールなどの注意書きに従った使用条件で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。
保証の有効期限は、お買い上げ日より1年間です。

- 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に関しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
- ご贈答、ご移転でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、当社までご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、あるいは分解、改造による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下や衝撃、その他の不適切な取扱による故障または損傷。
 - 火災、地震、塩害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷。
- 本保証は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
- 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取扱について

- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用します。
なお、本書にて、お預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 修理のために、当社から委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を開示する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準で、お客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

◆ご購入日	西暦記入 年 月 日
◆保証期間	ご購入日から 1年間
◆ご購入者	ご住所（〒 — ） ご芳名 TEL — —
◆販売店名	

◆印欄に記入がない場合保証書は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし、記入がない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。
※製品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更する場合がありますので、ご了承ください。

ケアメディックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3丁目23番1号

TEL 03-3837-0551 FAX 03-3837-0554 HP <http://www.caremed.co.jp/>

■安全上のご注意■

ここに記載する内容は、人身への危害や財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを区分して説明しています。内容を必ずお読みいただき、安全に正しくお使いください。

誤った使い方をした場合の危害や損害の想定区分を説明しています。	
 警告	死亡や重傷などを負う可能性がある内容です。
 注意	重傷や財産の損害などを負う可能性がある内容です。

守っていただく内容区分を説明しています。	
 禁止	絶対にしてはいけない内容です。
 厳守	絶対にしなければいけない内容です。

!

警告

禁止 前方・後方・左右側方へ過度に体重をかけて座らない。 転倒しケガをするおそれがあります。	禁止 背面・アームレスト・フットレストに座らない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止 製品の上に立ったり、飛び乗ったりしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止 浴室以外では使用しない。段差のある場所では使用しない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止 座った際や移動・方向転換の操作時、故意に揺すったりしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止 浴槽内や傾斜のある床、平坦ではない床では使用しない。段差のある所では使用しない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止 座面の中央以外に座らない。端へ寄るなどの不安定な座り方はしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止 分解・改造・修理はしない。 製品の破損やケガをするおそれがあります。
禁止 2人以上で座らない。本来の用途以外で使用しない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止 火気の近くで使用しない。 製品の破損やケガをするおそれがあります。
禁止 体重が 100kgを超える方は使用しない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止 誤った座り方の状態で移動・方向転換の操作はしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。

警告			
禁止	本取扱説明書に記載した使用方法以外で使用しない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止	背面・座面のパッドが装着されていない状態や正しく装着されていない状態で使用しない。 製品の破損やケガをするおそれがあります。
禁止	介助者の付き添いが無い状態で使用はしない。 ケガをするおそれがあります。	禁止	折りたたんだ状態で杖や手すりのかわりに使用しない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止	床・座面・背面・アームレスト・フットレストに石鹼やシャンプー・リンス・コンディショナーなどが付着している状態で使用しない。 転倒しケガをするおそれがあります。	禁止	折りたたんだ状態でキャスターを使用した持ち運びはしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止	キャスターのストッパーがかかっている状態でひきずったり、移動・方向転換をしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止	折りたたみ時や、アームレスト・フットレストの開閉時に指や身体をはさむような使用はしない。 ケガをするおそれがあります。
禁止	キャスター可動時に指・足・身体を近づけたり、触れたりしない。キャスターを浮かせて使用しない。 転倒やケガをするおそれがあります。	禁止	キャスターの高さが揃っていない、又は正しく装着されていない状態で使用はしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止	製品に異常や不具合がある状態で使用しない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止	子供に使用させたり、遊ばせたりしない。 ケガをするおそれがあります。
禁止	水温が60度を超えるお湯をかけない。 製品の破損やケガをするおそれがあります。	禁止	フットレストの上に立ったり、飛び乗ったりしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止	製品にサビを確認した場合は使用をしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止	アームレスト・フットレストを上げた状態で移動や方向転換をしない。 転倒やケガをするおそれがあります。
禁止	製品に荷物をかけたり、吊るした状態で使用をしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。	禁止	屋外での放置や直射日光に当てて乾かすことはしない。 製品の劣化や損傷を与えるおそれがあります。
禁止	塩素系薬剤による殺菌や消毒、入浴剤を含んだ水やお湯、温泉水を製品にかけない。 製品の劣化や損傷を与えるおそれがあります。	禁止	硬いスポンジ・タワシ・研磨剤・塩素系洗剤・酸性又はアルカリ性洗剤・クレゾール・シンナーなどを用いた清掃はしない。 製品の劣化や損傷を与えるおそれがあります。
禁止	背面・座面のパッドを取り外した状態で長時間放置しない。 長時間接触したものに色移りするおそれがあります。	禁止	移動・方向転換をする際、周囲にぶついたり衝撃を与えない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
禁止	座面の水抜き穴に指を入れない。 抜けなくなったりケガをするおそれがあります。	禁止	キャスターに髪の毛やごみが付着したままにしない。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。

注意			
厳守	製品を折りたたんで保管する際は、自立はしないため、倒れないように立てかけて安全な場所に保管する。 製品の破損やケガをするおそれがあります。	厳守	ハンドルは両手で操作をおこなう。 製品の破損や転倒しケガをするおそれがあります。
厳守	移動・方向転換をする際は利用者の足がフットレストのプレート上に置かれていることを確認する。 キャスターに足が巻き込まれケガをするおそれがあります。	厳守	製品を持ち運ぶ際は足の上などに落下させないよう注意をする。 製品の破損やケガをするおそれがあります。
厳守	移動・方向転換をする際は、介助者は周囲をよく確認し、安全な状態を確保したうえで操作する。 ケガをするおそれがあります。	厳守	キャスターのストッパー操作は介助者がおこない、利用者は操作をしない。 転倒しケガをするおそれがあります。
厳守	製品の脚部の位置を調整する際は、固定ピンが調節穴に正しく入り、固定されていることを確認する。 転倒しケガをするおそれがあります。	厳守	製品は定期的に清掃・点検・メンテナンスをおこなう。 安心・安全に使用するためにご協力ください。

<メンテナンス販売部材>

●下記は交換部品としてお買い求めいただけます。

品名	品番	JANコード
背面パッド	SCAM-01	4958519402012
座面パッド	SCAM-02	4958519402029
アームレストカバー	SCAM-03	4958519402036
ハンドル	SCAM-04	4958519402043
固定ピン	SCAM-05	4958519402050
シャワーヘッドホルダー	SCAM-06	4958519402067
前輪右用キャスター	SCAM-07	4958519402074
前輪左用キャスター	SCAM-08	4958519402081
後輪用左右共通キャスター	SCAM-09	4958519402098

●保証書は次頁についておりますので内容をご確認ください。

また、この取扱説明書及び保証書を大切に保管してください。

●修理を依頼する場合は、お買い上げの販売店へ品名 / 品番 / ご購入日 / 故障

や不具合の状況 / ご住所 / お名前 / お電話番号をご連絡ください。

こちらも詳しくは次頁の保証書をご確認ください。

●廃棄についてのご注意として、廃棄をする場合はできるだけ素材別に分解、

分けし地域の廃棄分別のルールに従ってください。

< 清掃・洗浄方法 >

< 製品の洗浄に関して >

- ①製品を洗浄する際は製品部位の全てに対し、中性洗剤を薄め、やわらかいスポンジか布になじませ、拭き取って汚れを取ってください。
- ②髪の毛やゴミなどが付着している場合は必ず取り除いてください。
特にキャスターの車輪にからまっていないか確認をしてください。
- ③その後、真水で洗い流し、乾いた布でよく拭き取ります。
- ④水分を拭き取り終わったら、直射日光のあたらない風通しのよい場所で乾燥をしてください。

注意 !!

- ・水温が 60 度を超えるお湯をかけないでください。
- ・塩素系薬剤または洗剤による殺菌、消毒のほか、入浴剤の含まれた水やお湯、温泉水をかけないでください。
- ・硬いスポンジ、タワシ、研磨剤、塩素系薬剤または洗剤、酸性またはアルカリ性洗剤、クレゾール、シンナーなどを用いた清掃はしないでください。

< 製品仕様 >


製品名	移動もできるシャワーチェア ウーゴ君
品番	SCA-01
カラー	レッドオレンジ
JAN コード	4958519402005
TAIS コード	00093-000064
重量	約 9.8kg
最大使用者体重	100kg
キャスターサイズ	Φ100 (mm) 4 インチ x4 ケ
材質	座面 / 背面ベース : ポリエチレン、座面 / 背面パッド / アームレストカバー : EVA、ハンドルグリップ : TPR
	フットレストプレート : ポリアミド、アームレスト : ポリプロピレン / ステンレス、
	フレームパイプ : アルミニウム、キャスター : TPE/TPR

< 各部の名称 >


- 梱包内容は、キャスター（前輪 / 後輪）とアームレストカバーが外された状態で梱包されています。組立て方法は後述の『組立て方法』をご確認ください。



固定ピンは、ハンドル取り付け箇所に 2 個、キャスター取り付け箇所に 4 個の合計 6 個あります。紛失にご注意ください。

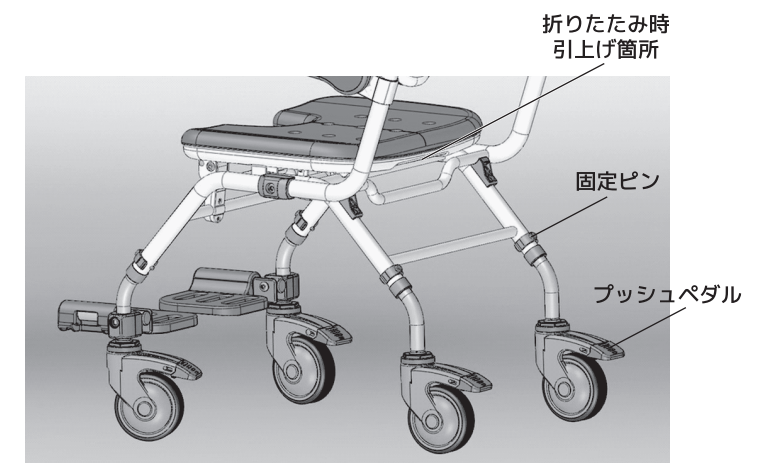

< 製品寸法図 >

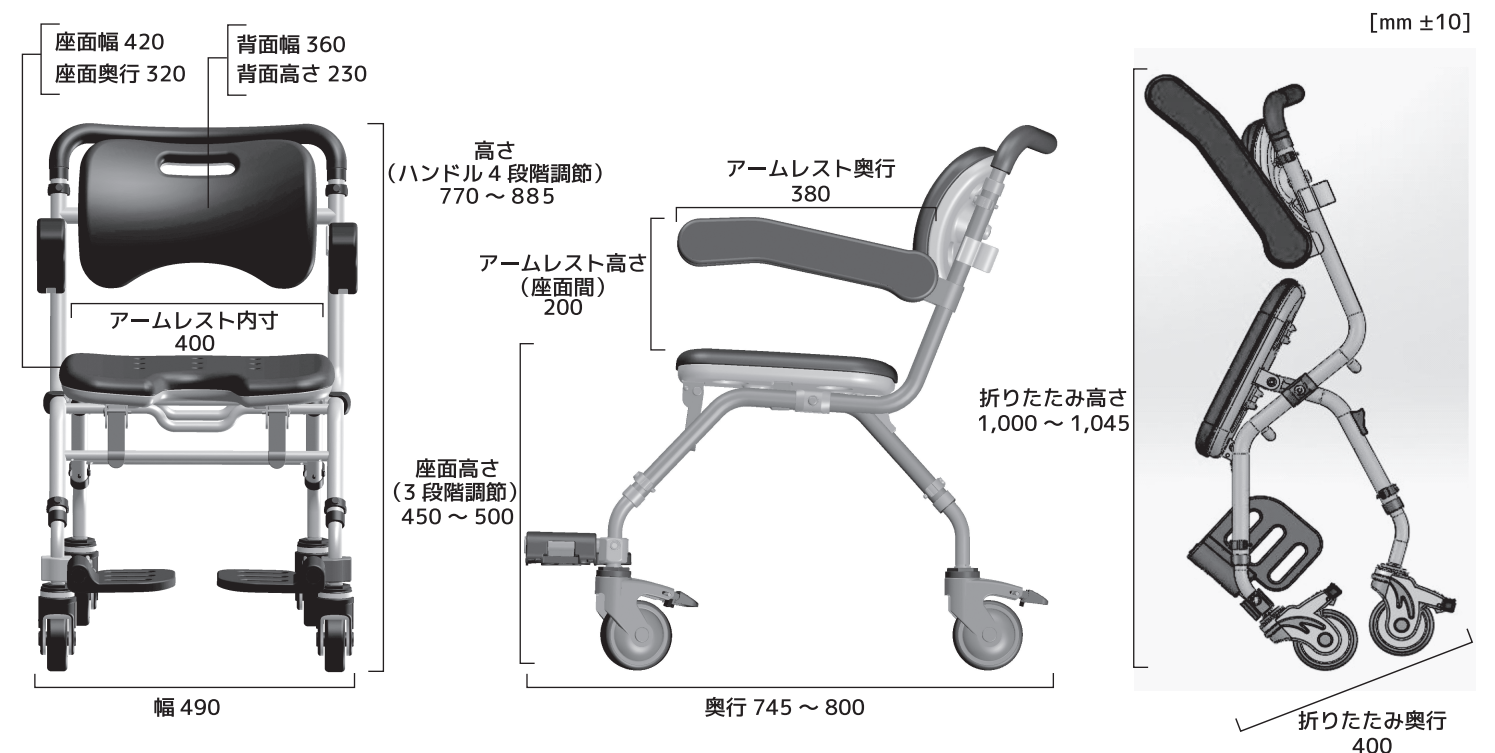


<組立て方法>

●製品本体、キャスター（前輪 / 後輪）、アームレストカバーを梱包箱から取り出します。


<前輪左右用各キャスター、後輪用左右共通キャスターの取り付け方>

- ①製品本体の脚部にある固定ピンを取り外します。
- ②前輪左右各キャスター（フットレストが付いているキャスター）を用意します。
- ③前輪左用キャスターは下図 A の位置に、前輪右用キャスターは下図 B の位置に配置し、製品本体のパイプへ挿し込みます。
- ④パイプへ入れたのち、希望の高さに合わせて最初に取り外した固定ピンを挿してセットします。

- ・キャスター側の穴位置が低い穴→座面の高さ 450mm
- ・キャスター側の穴位置が真ん中の穴→座面の高さ 470mm
- ・キャスター側の穴位置が高い穴→座面の高さ 500mm

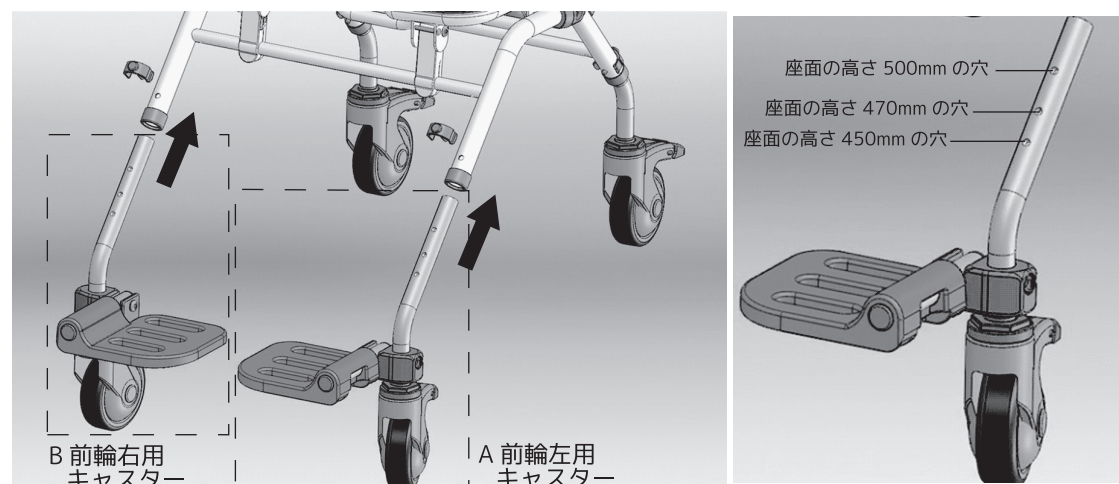

- ⑤後輪用左右共通キャスターを残りのパイプへ挿し込み、前輪で設定した同じ高さの位置に固定ピンを挿してセットします。後輪のキャスターは左右共通ですので左右どちらの後輪用パイプにも装着が可能です。

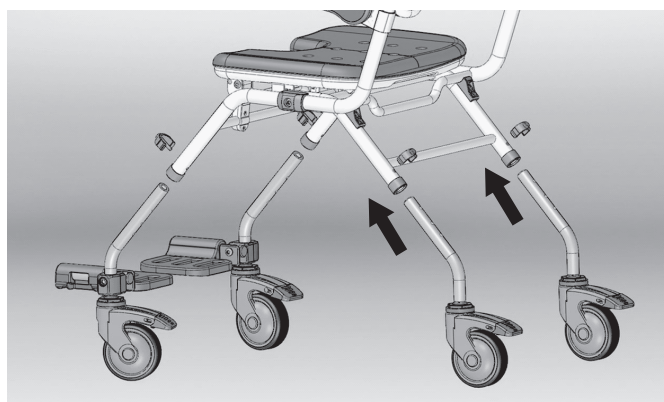

注意 !!

必ず、固定ピンはしっかりと挿し込んでください。
また、各キャスターの高さ位置を揃えてください。


<ご使用方法>

<シャワーヘッドホルダーの取扱い方法>

- ①シャワーヘッドホルダーが製品本体のパイプに装着されています。
 - ・取り外しが可能なので同径（φ25mm）のパイプ箇所につけ替えができます。
 - ・シャワーヘッドの重量は約 300 g まで対応が可能です。
 - ・シャワーヘッドの根本直径は約 23mm まで対応が可能です。
 - ・シャワーホースの直径は約 16mm まで対応が可能です。


注意 !!

- ・対応範囲外となるシャワーヘッドを使用しないでください。
- ・シャワーヘッド以外の物をかけないでください。

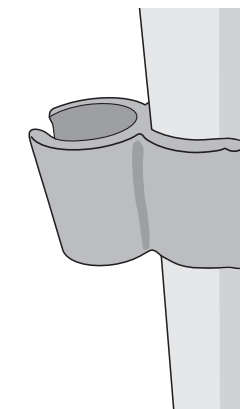

<座面・背面パッドの取扱い方法>

- ①座面 / 背面パッドは取り外しができます。洗浄も可能です。
- ②取り外しの際は下図の通り、各パッド内面にある凸部を押して外します。
- ③取り付けの際は座面 / 背面ベースにある凹部へはめ込みます。
 - ・座面 / 背面各パッド、アームレストカバー、ハンドルのグリップは抗菌 / 防カビ加工を施しています。
 - ※菌やカビを死滅させるものではありません。
 - ※使用状態や条件によっては、菌やカビが発生する場合があります。

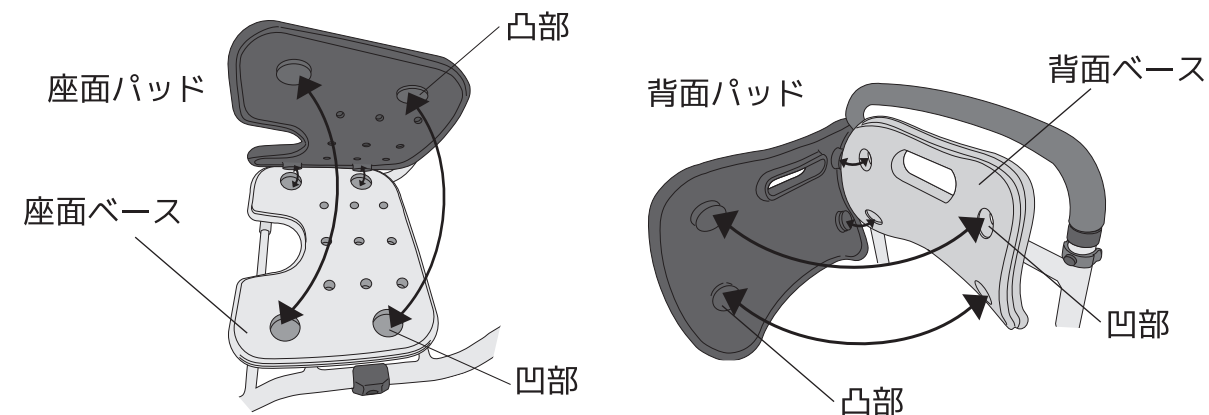


注意 !!

- ・適正な取り外し方をせず、無理な力で引っ張ったりすると各パッドが破損する場合があります。
- ・各パッドやカバーを取り外した状態で長時間放置をしないでください。
- ・各パッドやカバーが装着されていない状態や、正しく装着されていない状態で使用しないでください。

<ご使用方法>

<ハンドルの調節方法>

- ①ハンドルは高さの調節が可能です。固定ピンを取り外し、希望の高さの穴に合わせ再度、固定ピンを挿してセットします。
- ・高さは 25mm 間隔で 4 段階の範囲で調節が可能です。

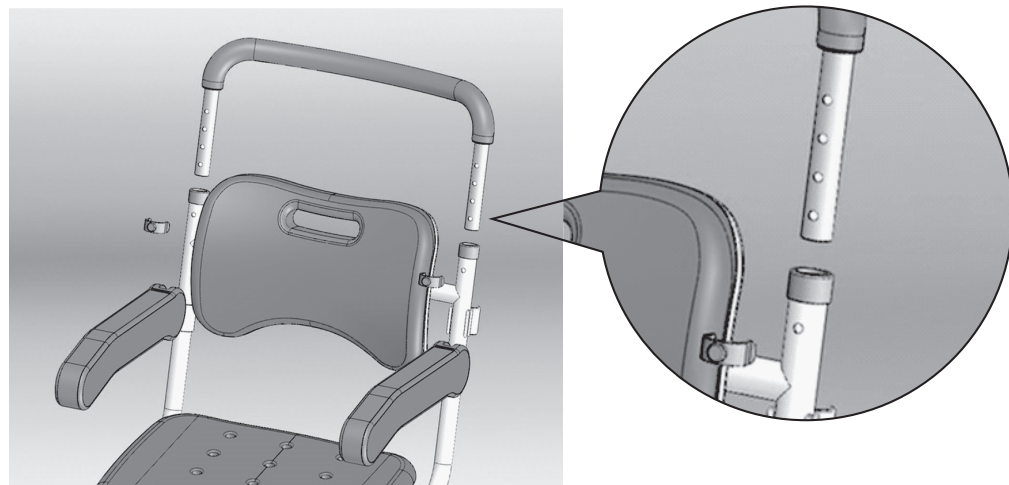


注意 !!

固定ピンは確実に挿し込んでください。また、ハンドルを操作する際は必ず両手でおこなってください。

<折りたたみの操作方法>

- ①製品本体は折りたたみが可能です。座面下にある **▲折りたたみ時は引上げる▲** 箇所を引上げる事で折りたたみがおこなえます。
- ・折りたたみはできますが自立はしないため、立てかけて保管をしてください。その際は倒れないよう注意をしてください。
 - ・立てかける際は必ず、キャスターのストッパーを 4 輪全てに対し、かけてから立てかけてください。

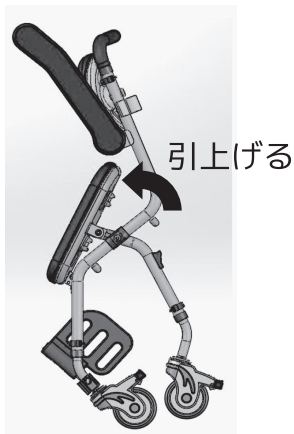

注意 !!

- ・折りたたみの操作をおこなう際は、手や指をはさまないように十分に注意をしてください。
- ・立てかけて保管する際は、倒れないよう十分注意してください。
- ・折りたたまれた状態で使用しないでください。


<組立て方法>

<アームレストカバーの取り付け方>

- ①アームレストカバーを下図のようにアームレストへ挿し込みます。
- ・アームレストカバーは水抜き穴（3 箇所）がある面が下面側です。
 - ・左右共通なので左右どちらのアームレストにも装着が可能です。
 - ・アームレストカバーはアームレストの奥側まで確実に挿し込んでください。

注意 !!


必ず、アームレストカバーを装着して使用してください。

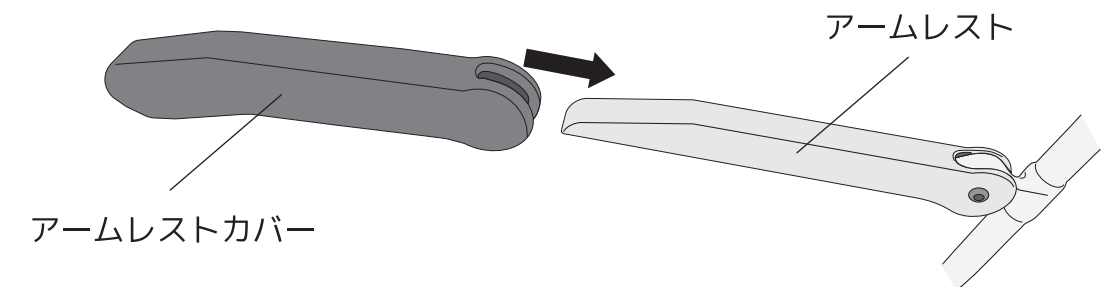

<ご使用方法>

<キャスターの動作、移動の確認>

- ①キャスターを利用した移動で、前進や後進、方向転換が円滑におこなえるか確認してください。
- ・周囲をよく確認し、安全な状態を確保したうえでおこなってください。

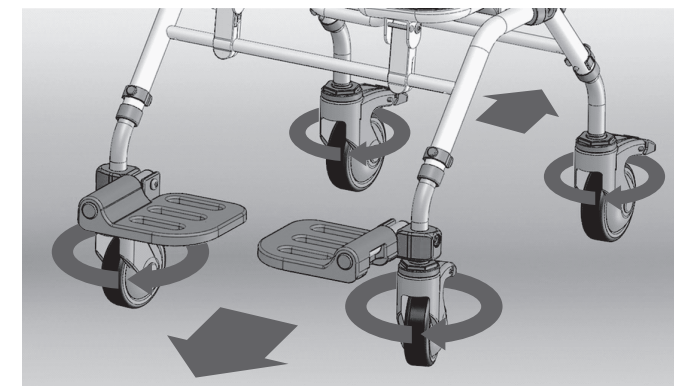


注意 !!

- ・本製品を使用する際は、必ず介助者が付き添いのもとで使用してください。利用者のみでの使用は絶対にしないでください。
- ・キャスターを浮かせて（ティッピング）の使用はしないでください。
- ・段差のある場所では使用しないでください。

<ご使用方法>

<キャスターのストッパー操作方法>

- ①キャスターのストッパーは下図の通り、プッシュペダルを下げることによってロックがかかります。
- ・車輪の進行と方向の回転が同時にロックされます。

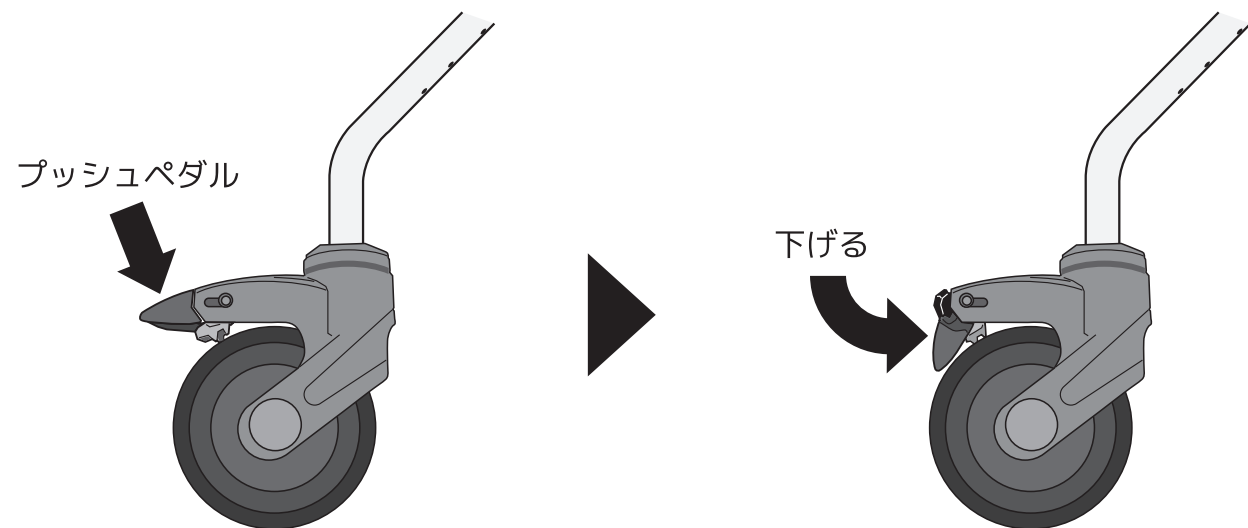


注意 !!

移動時以外は、キャスターのストッパーを必ず4輪全てに対し確実にかけて使用してください。

- ②キャスターのストッパーを解除する場合は、プッシュペダルを上げることでロックが解除されます。また、下図の通り黒色の解除スイッチを押した場合でもロックが解除されます。
- ・介助者が足で操作をする場合は必ず、サンダルなどの履物をはいたうえで操作をおこなってください。
 - ・解除スイッチで解除をする場合は、絶対に手で操作をしないでください。手や指をはさみ、ケガをするおそれがあります。

注意 !!


手・足・指などをはさまないように、十分に注意をして操作をしてください。

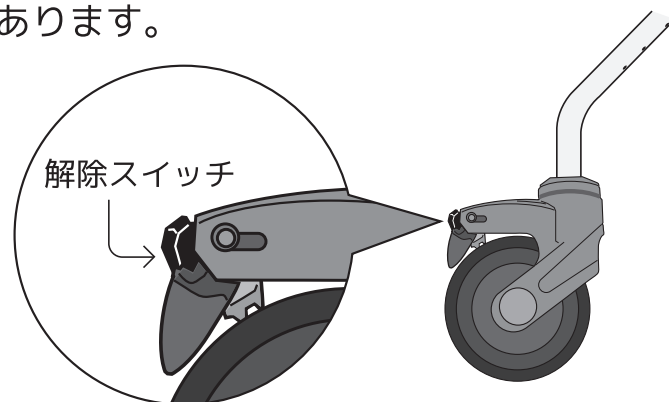

<ご使用方法>

<フットレストの操作方法>

- ①フットレストは開閉ができます。操作方法是下図の通りとなります。
- ・フットレストは利用者の足を乗せ、安全に移動をおこなうために備えています。利用者を乗せて移動をする際は、必ず利用者の足をフットレストの上に乗せてください。

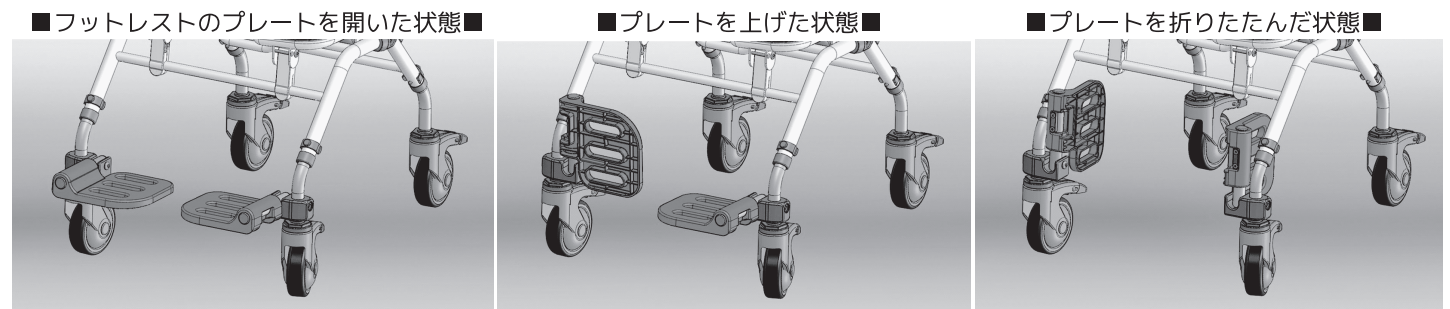


注意 !!

- ・利用者を乗せて移動をする際は、必ず利用者の足をフットレストの上に乗せてください。
- ・移動中はフットレストから利用者の足が落ちないように注意をしてください。
- ・フットレストの上に立ったり、飛び乗ったりしないでください。

<アームレストの操作方法>

- ①アームレストは左右どちらも上げる事ができます。操作方法是下図の通りとなります。
- ・浴槽横へ横付けし、浴槽内へ移乗をおこなう際に便利です。

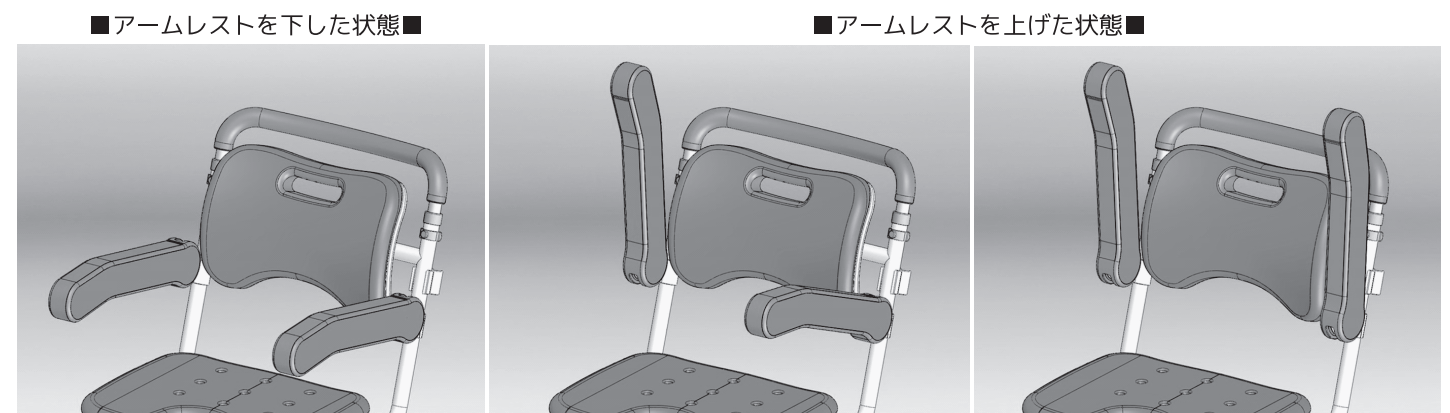

注意 !!

アームレストを上げた状態のままでの移動は危険ですのでしないでください。