


# 角度保持棒説明書 FD-01

## 使い方

本製品はベッドの背部ボトム(樹脂)の角度を保持させるものです。停電時等電動で背部を起し固定できないとき、一時的に使用するものです。

長さを二段階に調整することで背部ボトム角度を約45°(短時)と約70°(長時)に固定することができます。

長さを変更するには差込ピン(※①)を一度引き抜きパイプの穴の位置を変更します。その際、差込ピンが確実に差し込まれていることを確認してください。

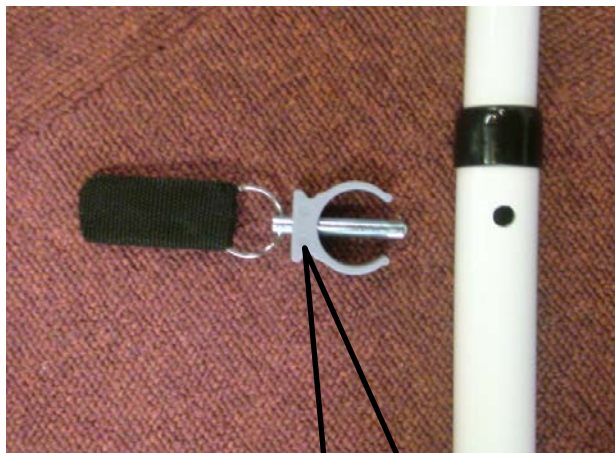

※①差込ピン



短時



長時

## 取り付け場所

ヘッドボード下部のベッドフレーム(角パイプ)の中央にL字の金具を引っ掛け(図1) 反対側は背部ボトム裏面の中央の穴に差し込みます(図2-1、2-2)

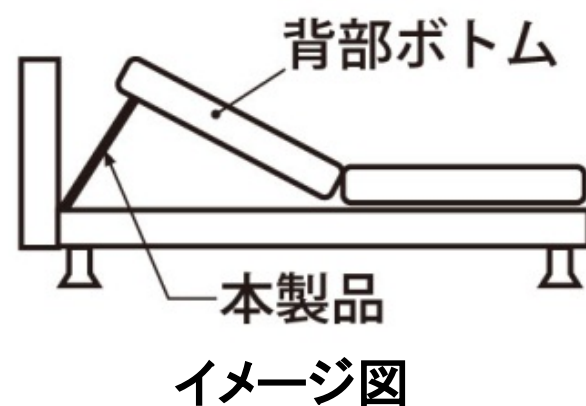


図1

L字の金具

ベッドフレーム(角パイプ)

ベッドフレームとL字の金具とが隙間なく引っ掛けてあること。



図2-1

背部ボトム裏面



図2-2

中央穴

確実に差し込まれていること。

## 警告

・本製品を使用の際、長さ(角度)を決めてから取付願います。危険ですので、使用中に長さ(角度)を変えないでください。

・本製品を使用の際、必ず二人以上で作業してください。危険ですので、一人では行わないでください。