

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。

⚠ 注意

正しく安全にご使用いただくためにこの組立・取扱説明書をよく
お読みいただいた上で組立て、ご使用下さい。
また、いつでもご覧いただけますように大切に保管して下さいま
すようお願い申し上げます。

安全のために必ずお読み下さい

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくため
に、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次のように
なっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

⚠ 警告	記載されている内容を無視して、誤った取扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性があること を示します。
⚠ 注意	記載されている内容を無視して、誤った取扱いをす ると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れ のあることを示します。
!	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げる ものです。（～しなさい。）
🚫	この記号は禁止の行為であることを告げる ものです。（～してはいけません。）
✖ 絵注意	絵表示に対する行為を禁止することを告げる ものです。

アフターサービス

●保証書

◎保証書は、お買い上げ店より
「お届け日、お買い上げ店名」を
記入していただいて下さい。
◎保証書に記入できない場合は、
納品書又は領収書（お届け日、
お買い上げ店名のわかる物）と
併せて大切に保管して下さい。

注）保証書と、納品書又は領収書無き場合は保証いたしかねます。

保証期間：お届け日より1年

●修理を依頼されるときは

◎この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある
場合は『お買い上げ店』又は、『お客様相談室』へご連絡下さい。

●保証期間中は

◎保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

◎修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させて
いただきます。

●ご連絡していただきたい内容

◎できるだけ詳しくお願いいたします。

①ご住所、氏名、電話番号

②型式名、お買い上げ店名、お届け日

③故障又は異常の内容

お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの
販売店へお申し付け下さい。

◎弊社製品は厳格な検査を経て納入いたしておりますが、万一不具合な点がござ
いましたらお買い上げの販売店又は弊社相談室にお問い合わせ下さい。

00 0120-39-2824

フリーダイヤル：月～金 9時～12時、13時～17時
土、日、祝祭日、年末、年始等は除く

安全のために必ずお守り下さい

⚠ 設置上の注意

暖房器具や放熱器具の近くには置かないで下さい。
火災の原因となります。また、木に必要な水分や油分を無くし、
変色、ひび割れ、変形の原因となります。



製品の上に、危険なものや重いものを置かないでください。
思わぬケガをしたり、製品をいためる原因となります。



直射日光が当たる場所への設置は避けてください。
変色、変形、老化の原因となります。



高温多湿な場所は避けてください。
サビやカビ、ダニが発生する原因となり、
健康を害することがあります。



平坦な場所に設置して下さい。
ガタツキや破損の原因となります。
また、転倒などによるケガの原因となります。



⚠ ご使用上の注意

製品の上に立ち上がったり、踏み台にしないでください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。



リクライニングした状態で、下記のことは行わないでください。
①前脚を浮かす行為
②お尻（重心）を後方へずらす行為
後方へ転倒する原因となります。



フットレストや肘掛け、背もたれに乗ったり腰掛けたりしないでください。
転倒してケガをしたり、製品破損の原因となります。



子供を抱えた状態、2人以上でのご使用は避けてください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。



製品の上でお子さんを遊ばせないでください。
転倒してケガをしたり、製品破損の原因となります。



操作するときは、まわりに人や障害物がないことを確認してください。
正常に操作できなかったり、負傷の原因となります。



製品に座った状態で揺らしたり、傾けたりしないでください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。



異常音やガタツキ、作動性に異常を感じたら、直ちにご使用をやめ、
お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご連絡ください。



製品上での喫煙はご遠慮ください。
火災の原因となります。



本製品を分解、変造、改造しないでください。
思わぬケガや製品が破損する原因となります。



◎お手入れ方法


●毎日のお手入れは、表面を軽くたたき、掃除機でホコリを吸い取ってください。
●著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤を2~3%程度に希釈したぬるま湯に浸した
柔らかい布を軽くしぼり、表面を軽くたたくように拭き取ってください。
その後、水に浸してかたくしぼった布で洗剤分をよく吸い取り、乾いた柔らかい
布で仕上げてください。
そして、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

◎ネジ類の定期点検


ガタツキがある場合は、脚を固定しているボルトが緩んでいる可能性が
あります。その際は、ボルトを締め直してください。

ガタツキがある状態のまま使用を続けると、製品が破損したり、
不意に転倒してケガの原因となります。

●以下の内容がそろっていることを確認してください。

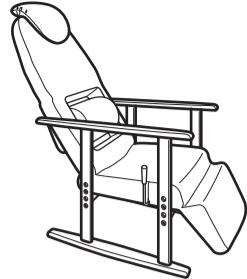

本体×1

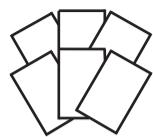

フェルト×6
(床の保護用)



スパナ×1




六角レンチ×1
(4 mm)

各部の名称

〈フェルト貼り付け位置〉


裏側

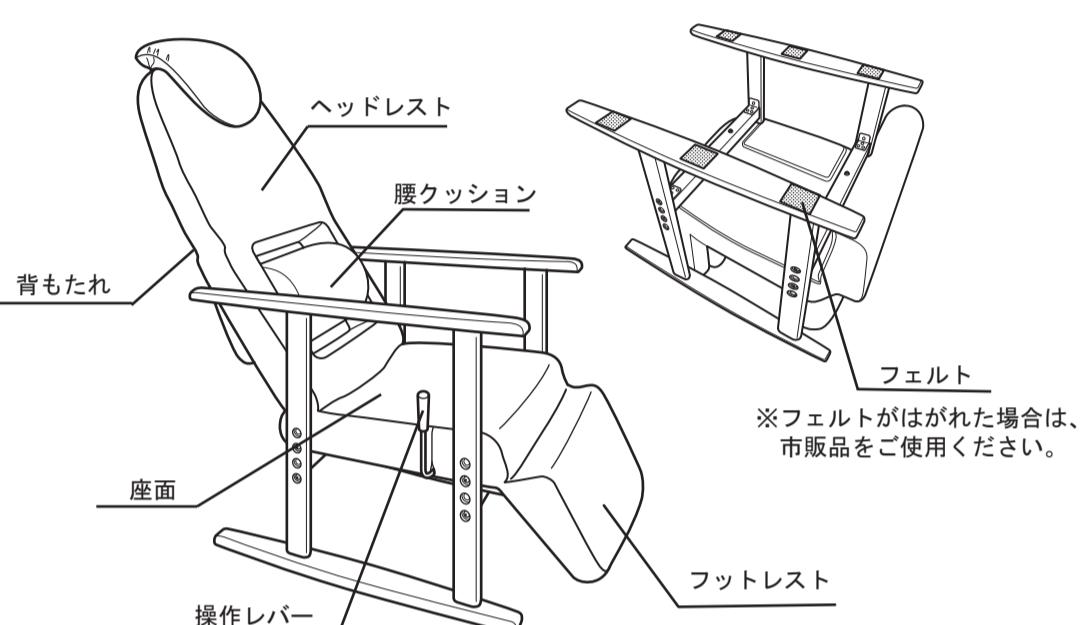

【ヘッドレスト】

42段階ギアにより、お好みの位置でご使用になります。

角度を選びなおすときは、ロック解除の位置まで動かし、カクッ！と音がなる位置までおしてください。

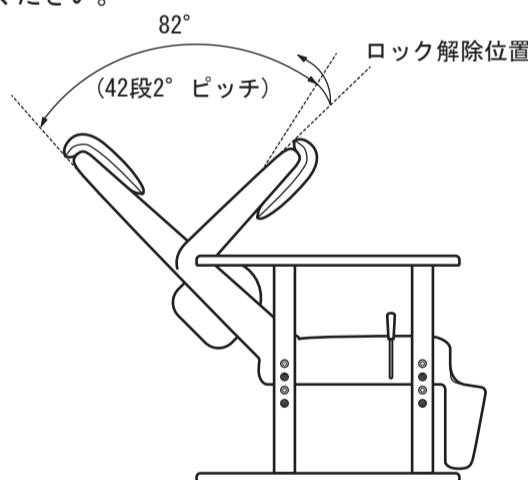


腰クッションの選び方

腰クッションを手で回すことにより、標準ポジションと体幹維持ポジションとS字カーブポジションを選ぶことができます。

【体幹維持ポジション】



【S字カーブポジション】

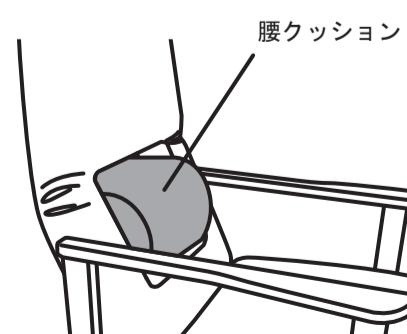


※腰クッションは、背もたれやヘッドレストがいかなる角度でも、体にフィットする構造のため、ロック機構はありません。

座面の高さの調整方法

下図のように、ボルトを締め付ける位置により、座面の高さを選ぶことができます。

左右のボルト各4個を確実に締め付けてください。
(スパナ、六角レンチ使用)

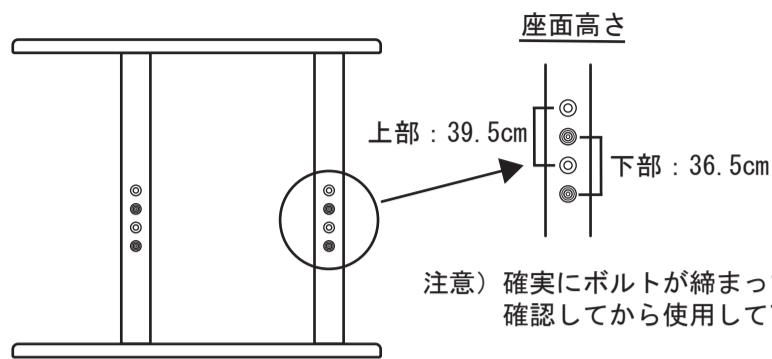

注意) 確実にボルトが締まっていることを確認してから使用して下さい。

ヘッドレスト、背もたれ、フットレスト角度の調整方法

【背もたれ】

座面右側の操作レバーを引きながら、背もたれに体重をかけることでお好みの位置でご使用になります。


〈注意〉

操作レバーを引くと、不意に背もたれが前方へ動くため十分注意してください。

【フットレスト】

14段ギアにより、お好みの位置でご使用になります。

角度を選び直すときは、ロック解除の位置まで動かし、カクッ！と音が鳴る位置までフットレストを持ち上げてください。

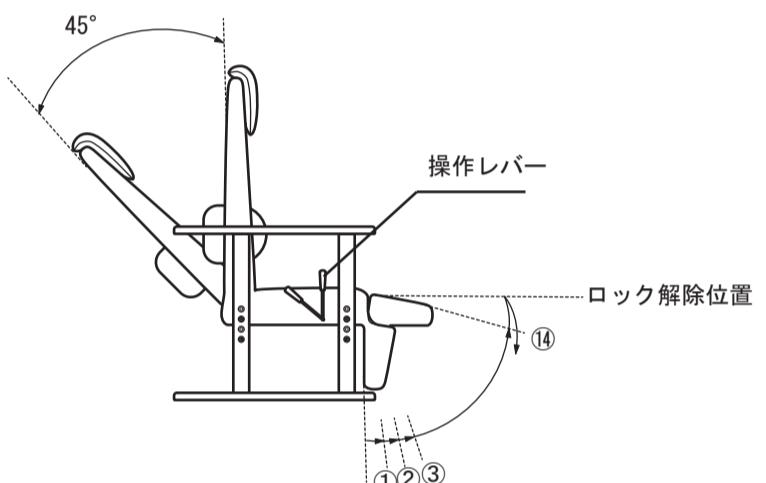

保証書

お届け日 年 月 日

ご芳名 様
お客様
お住所
店名・住所
販売店

設置場所

(1) ご贈答品、あるいは転居等で本保証書に記入

してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼で

きない場合には、取扱説明書記載のお客様相

談室へご相談下さい。

(2) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

法的責任

この保証書は、本書に明示した期間、条件の

もとにおいて無償修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権

限を規制するものではありません。保証期間経

過後の修理についてご不明の場合は、お買い上

げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下

さい。

保証の態様

(1) 保証期間内において、取扱説明書、製品添付

の注意ラベル等の注意書にしたがって正常な

使用状態で故障した場合には、無償修理致し

ます。

(2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客

様相談室にご連絡下さい。

(3) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社

規定に沿い訪問に要する実費を申し受けのこ

とがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、出張修理の際に本保

証書及び販売店納品書又は領収書を提示して下

さい。

※ご注意 納品書又は領収書を併せて保管願い

します。

保証の対象

消耗部品を除く、本体とし保証期間は別表に

ります。尚、別売部品をご選択の場合は、別

売部品添付の保証書によります。

免責

本製品の故障の放置又はその使用によって生

じた、直接、間接の損害についての保証は、一

切その責を負いませんので、あらかじめご了承

下さい。

販売店様へのお願い

ご販売又はご配送時に保証書の所定事項（お

届け日、販売店名）をご記入の上、お客様へお

渡し下さい。

（196-0022 東京都昭島市中神町1148 代表）

TEL 042 (543) 3111

（12）本製品外より発生した食虫害。

フランスベッド株式会社