

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。






⚠ 注意

正しく安全にご使用いただくためにこの組立・取扱説明書をよく
お読みいただいた上で組立て、ご使用下さい。
また、いつでもご覧いただけますように大切に保管して下さいま
すようお願い申し上げます。

安全のために必ずお読み下さい

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくため
に、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次のように
なっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

	警告	記載されている内容が無視して、誤った取扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性があること を示します。
	注意	記載されている内容が無視して、誤った取扱いをす ると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れ のあることを示します。
		この記号は行為を強制したり指示する内容を告げる ものです。（～しなさい。）
		この記号は禁止の行為であることを告げる ものです。（～してはいけません。）
	絵注意	絵表示に対する行為を禁止することを告げる ものです。

アフターサービス

●保証書

- ◎保証書は、お買い上げ店より
「お届け日、お買い上げ店名」を
記入していただいて下さい。
◎保証書に記入できない場合は、
納品書又は領収書（お届け日、
お買い上げ店名のわかる物）と
併せて大切に保管して下さい。

保証期間：お届け日より1年

注）保証書と、納品書又は領収書無き場合は保証いたしかねます。

●修理を依頼されるときは

- ◎この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある
場合は『お買い上げ店』又は、『お客様相談室』へご連絡下さい。

●保証期間中は

- ◎保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

- ◎修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させて
いただきます。

●ご連絡していただきたい内容

- ◎できるだけ詳しくお願いいたします。
①ご住所、氏名、電話番号
②型式名、お買い上げ店名、お届け日
③故障又は異常の内容

お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの
販売店へお申し付け下さい。

◎弊社製品は厳格な検査を経て納入いたしておりますが、万一不具合な点がござ
いましたらお買い上げの販売店又は弊社相談室にお問い合わせ下さい。



0 1 2 0 - 3 9 - 2 8 2 4
フリーダイヤル：月～金 9時～12時、13時～17時
土、日、祝祭日、年末、年始等は除く

安全のために必ずお守り下さい

⚠ 設置上の注意

暖房器具や放熱器具の近くには置かないで下さい。
火災の原因となります。また、木に必要な水分や油分を無くし、
変色、ひび割れ、変形の原因となります。



製品の上に、危険なものや重いものを置かないでください。
思わぬケガをしたり、製品をいためる原因となります。



直射日光が当たる場所への設置は避けてください。
変色、変形、老化の原因となります。



高温多湿な場所は避けてください。
サビやカビ、ダニが発生する原因となり、
健康を害することがあります。



平坦な場所に設置して下さい。
ガタツキや破損の原因となります。
また、転倒などによるケガの原因となります。



⚠ ご使用上の注意

製品の上に立ち上がったたり、踏み台にしないでください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。



リクライニングした状態で、下記のことは行わないでください。

- ①前脚を浮かす行為
②おしり（重心）を後方へずらす行為
後方へ転倒する原因となります。



肘掛けや背もたれに乗ったり腰掛けたりしないでください。
転倒してケガをしたり、製品破損の原因となります。



子供を抱えた状態、2人以上でのご使用は避けてください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。



製品の上でお子さんを遊ばせないでください。
転倒してケガをしたり、製品破損の原因となります。



操作するときは、まわりに人や障害物がないことを確認してください。
正常に操作できなかったり、負傷の原因となります。



製品に座った状態で揺らしたり、傾けたりしないでください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。



製品上での喫煙はご遠慮ください。
火災の原因となります。



異常音やガタツキ、作動性に異常を感じたら、直ちにご使用をやめ、
お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご連絡ください。



ご使用者を座らせた状態で、製品を引きずらないでください。
製品が破損、転倒したり、床面へキズを付ける原因となります。



本製品を分解、変造、改造しないでください。
思わぬケガや製品が破損する原因となります。




◎お手入れ方法

- 毎日のお手入れは、表面を軽くたたき、掃除機でホコリを吸い取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤を2～3%程度に希釈したぬるま湯に浸した
柔らかい布を軽くしぼり、表面を軽くたたくように拭き取ってください。
その後、水に浸してかたくしぼった布で洗剤分をよく吸い取り、乾いた柔らかい
布で仕上げてください。
そして、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。


◎ネジ類の定期点検

ガタツキがある場合は、脚を固定しているノブボルトが緩んでいる可能性が
あります。その際は、ノブボルトを締め直してください。
ガタツキがある状態のまま使用を続けると、製品が破損したり、
不意に転倒してケガの原因となります。

●以下の内容がそろっていることを確認してください。

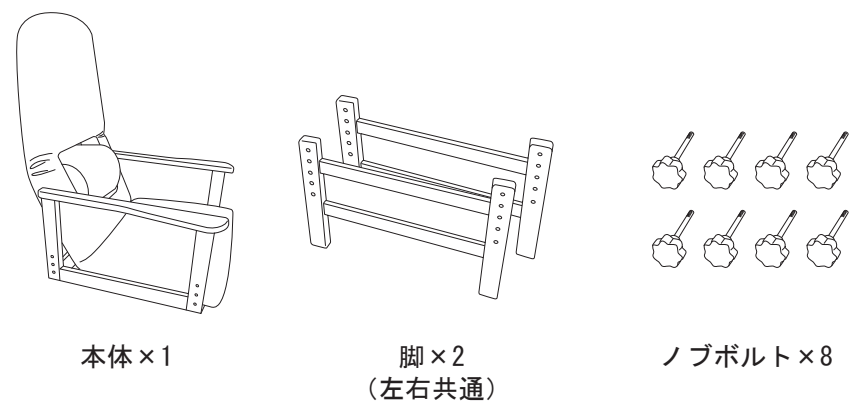

各部の名称

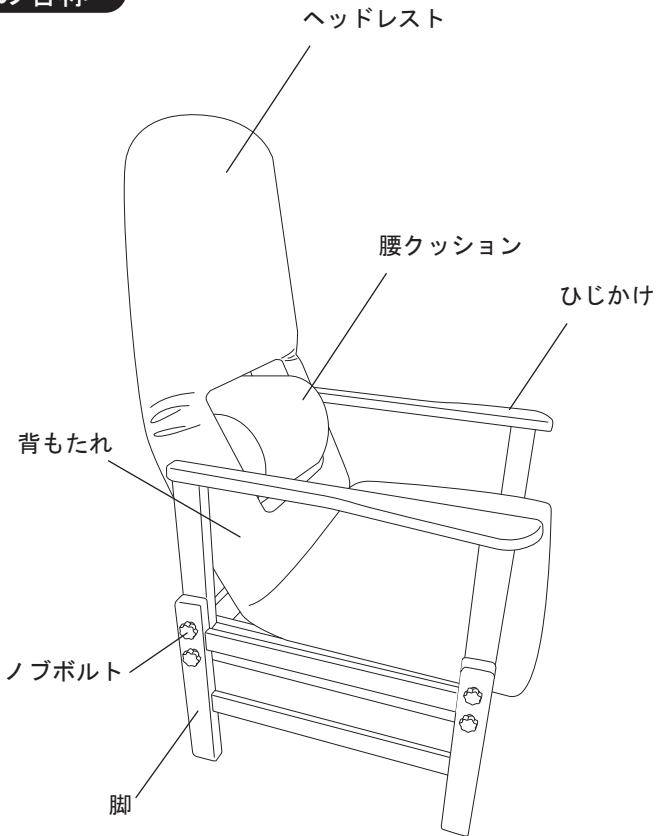

腰クッションの選び方


腰クッションを手で回すことにより、体幹維持ポジションとS字カーブポジションを選ぶことができます。




注意

2つのポジション以外では使用しないでください。

【体幹維持ポジション】

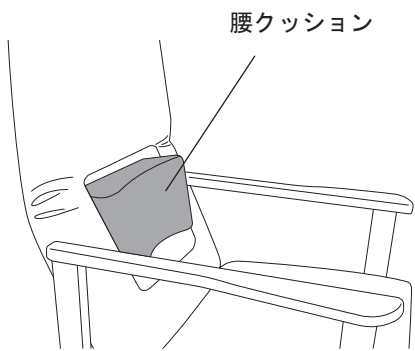


【S字カーブポジション】

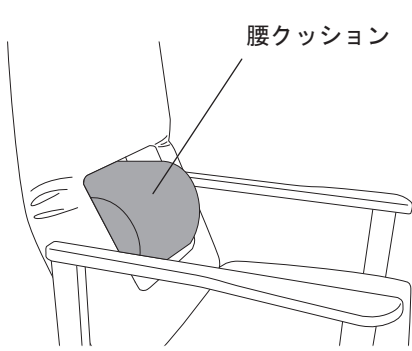

座いすとして使うには

左右の脚を取り外すことにより、座いすとして使用することができます。
外した脚、ノブボルトは大切に保管してください。

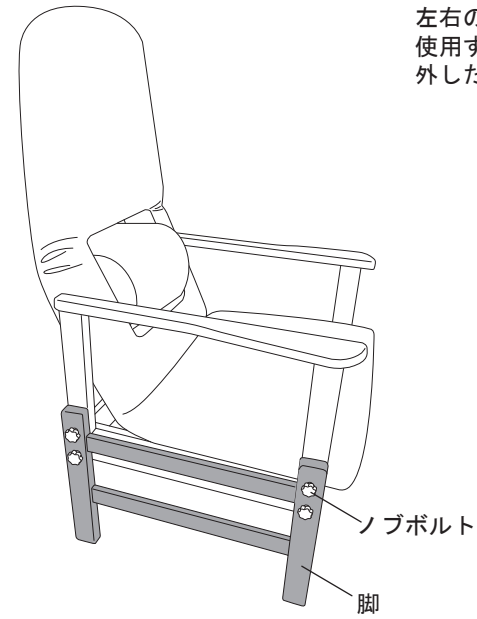

座いすとして



座面の高さの調整方法

右図のように、ノブボルトを締め付ける位置により、座面の高さを選ぶことができます。
左右のノブボルト各4個を確実に締め付けてください。



注意

ひじかけの真ん中の穴は使用しません

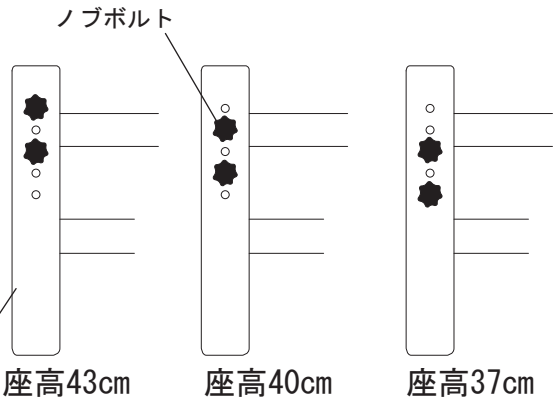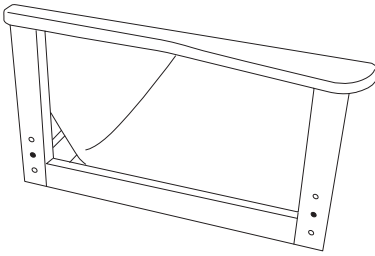



ヘッドレスト、背もたれ角度の調整方法

【ヘッドレスト】

無段階ギアにより、お好みの位置でご使用になれます。
角度を選びなおすときは、ロック解除の位置まで動かしてください。

【背もたれ】

7段階ギアにより、7つの角度を選ぶことができます。
角度を選びなおすときは、ロック解除の位置まで動かしてください。

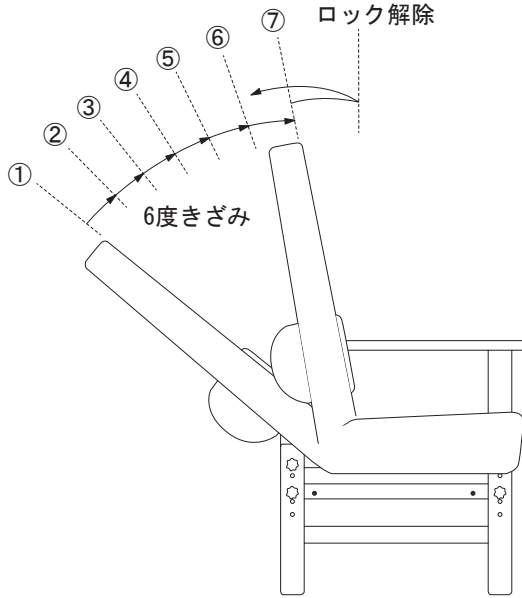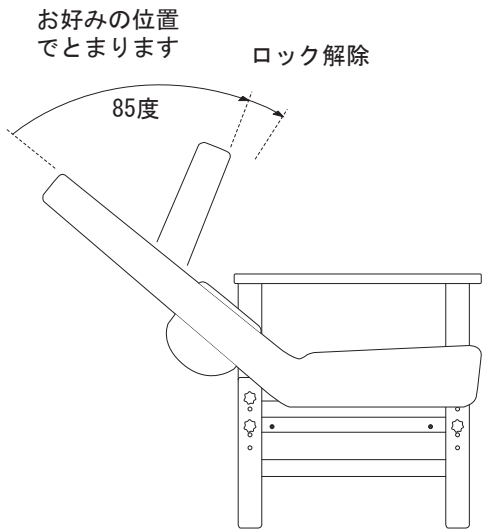

保証書

お届け日	平成 年 月 日
ご芳名	様
ご住所	〒 -
TEL	

販売店	店名・住所
-----	-------

保証期間：お届け日より1年

保証の適用除外
保証期間中でも次のような場合には、有料修理又は出張料を申し受ける事があります。

- 本保証書のご提示が無かった場合。
- 本保証書にお届け日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
- 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
- 誤った使用あるいはお取扱上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- 本製品をご使用者自身又は他業者により変造、改造された場合。
- ご購入後の移動や輸送及び落下等、不適切なお取扱により故障及び損傷が生じた場合。
- 火災、地震、風水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障又は損傷が生じた場合。
- 指定電源(AC100V 50Hz/60Hz)以外の使用、及び異常電圧による故障又は損傷が生じた場合。
- 本製品の使用による経年変化に該当する事項、及び消耗品の交換。
①布地、革、ソフトレザー等の破損、変色。
②木部の変質、塗装・メッキ部の曇り変色。
③電球の切れ。
- 一般家庭用以外（例 業務用等）に使用された場合の故障及び破損。
- 設置場所（床面のゆがみ等）に起因される異音・組立不具合。
- 本製品外より発生した食虫害。

設置場所
(1) ご贈答品、あるいは転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書記載のお客室相談室へご相談下さい。
(2) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

法的責任
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を規制するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下さい。

保証の態様
(1) 保証期間内において、取扱説明書、製品添付の注意ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無償修理致します。
(2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にご連絡下さい。
(3) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿った訪問に要する実費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件
保証を受けるためには、出張修理の際に本保証書及び販売店納品書又は領収書を提示して下さい。
※ご注意 納品書又は領収書を併せて保管願います。

保証の対象
消耗部品を除く、本体とし保証期間は別表によりします。尚、別売部品をご選択の場合は、別売部品添付の保証書によりします。

免責
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

販売店様へのお願い
ご購入又はご配送時に保証書の所定事項（お届け日、販売店名）をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

フランスベッド株式会社
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148
TEL 042(543)3111（代表）