


## 非接触型離床センサー用ブラケット ブラケット 29/45/62 取扱説明書


990082-8900

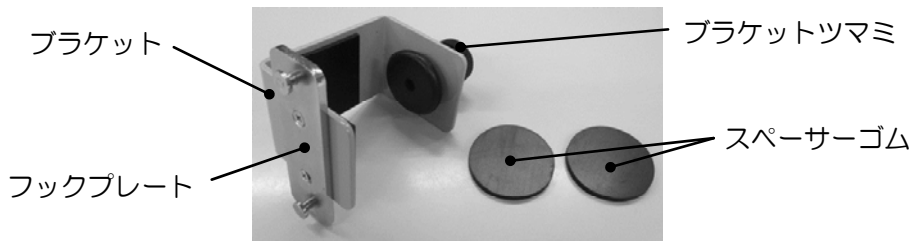


非接触型離床センサーをベッドに取り付けるためのブラケットです。梱包箱の中に上記のものがすべて入っていることを確認してください。

### ブラケットの取り付け方法

- (1) フットボードの端にブラケットを取り付けます。ブラケットを取り付けた後はブラケットツマミを回してフットボードに落ちないように固定します（ブラケットツマミを回しすぎるとフットボードに跡が付く場合があるので注意してください）。

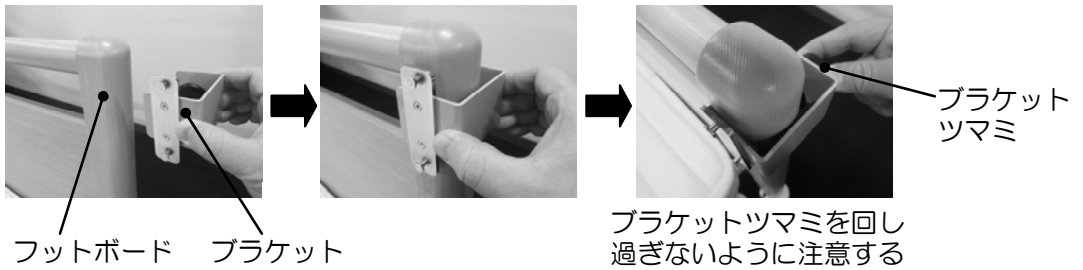

- (2) フックプレートをプラスドライバーで外して別のネジ穴に付け替えることができます。

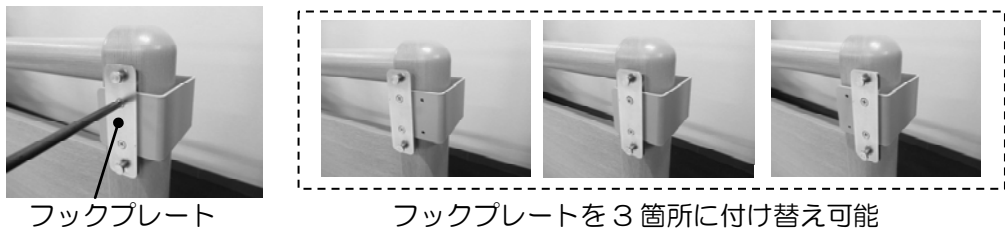

### ⚠ 注意

使用時はしっかりと固定されていることを確認してください。




非接触型離床センサーの固定以外で使用しないでください。



## 非接触型離床センサー本体ユニットの取り付け方法

(1) ブラケットピンに本体ユニットのフック用穴を合わせてはめ込みます。

※本体ユニットの上辺をフットボードよりはみ出して設置した場合、本体ユニットをつかむと本体ユニットに力が加わり、事故や破損のおそれがあります。ご使用者様の状態や使用環境を考慮してブラケットの位置を調整してください。

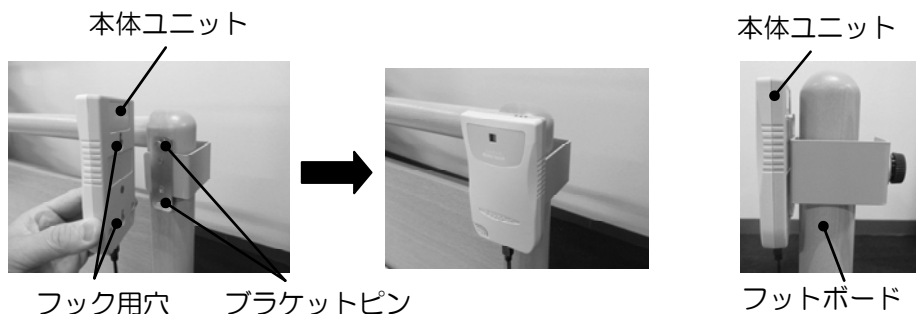

### ブラケット取り付けの補足説明

#### ブラケットのフットボード幅対応寸法

	最小寸法	最大寸法	対応型式
ブラケット 29	28mm	35mm	エスポア
ブラケット 45	44mm	51mm	ヒューマンケアベッド (AN、AN-B)
ブラケット 62	61mm	68mm	フロアーベッド

厚さ 3mm のスペーサーゴムが 2 枚同梱されています。フットボード幅対応寸法より薄いフットボードに取り付ける場合はスペーサーゴムを間に挟んでご使用ください。フットボードの幅については下記の写真を参考に測ってください。ローフットボード（背の低いフットボード）や湾曲しているフットボードには取り付けできません。

