

☆ 保証書 ☆

本書は、下記記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間内に、万一故障が発生した場合には無料修理をいたします。

品 名	骨伝導クリアーボイス 春夏秋冬	型番	iB-1200
保証期間	お買上げ日より1年間		
お買上げ日	年	月	日
お名前			
ご住所	〒 電話		
販売店名			
所在地			
電話番号			

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合には事前に販売店にご相談ください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な分解修理や改造による故障および損傷
 - お買上げ後の落下等による故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷その他天変地異、公害や異常電圧による故障および損傷
 - 一般家庭以外(たとえば業務用に長時間使用の場合)に使用された場合の故障および損傷
 - 本保証書のご提示がない場合
 - 本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合以外の修理には、交換部品・工賃・送料など実費をご請求させていただきます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製造元 株式会社 伊吹電子

〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-24-8
TEL.044-888-3796 FAX.044-888-0256
E-mail:ibuki@ibukiel.co.jp URL:http://www.ibukiel.co.jp

販売元 フランスベッド 株式会社

〒169-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-39-2824

定格・仕様

<仕様>

- 電源:AC充電アダプター(AC=100V~240V) ●周波数特性:200Hz~5.5KHz ●音圧レベル(骨伝導):138dB ±5dB SPL
- 最大利得(骨伝導):58dB ±5dB ●骨伝導振動子インピーダンス:8Ω ●骨伝導イヤホンインピーダンス:16Ω ●ケース寸法:幅47×高さ111×厚み28(各mm) ●本体重量(電池込み):70g
- 使用電池:リチウムポリマー ●電池充電時間:約3.5時間
- 連続使用時間:約40時間
- <付属品>
- 充電用アダプター(PSE規格品) ●骨伝導イヤホン(耳栓式)長さ1.2m ●ストラップ(揚げひも) ●ポケットホルダー(ポケットなどに留め具) ●取扱説明書(保証書付)

ご使用の前に

<充電方法>

- 1.充電器を家庭用コンセント(日本はAC100V)にしっかり差し込んでください。
- 2.一方のプラグを本体上の充電用の穴にしっかり差し込んでください。
※充電プラグを挿入したら本体下側のLEDランプが赤色に点灯します。
※約3.5時間で充電が完了するとLEDランプが青色に変わります。

<充電中のご注意とお願い>

- ◎充電用穴に差し込む際は真っ直ぐに差し込んでください。荒っぽく差し込むと、内部の精密部品が破損する恐れがあります。
- ◎充電中に充電器が異常に熱くなりましたら、安全のためにコンセントから抜いてください。
- ◎充電する際は骨伝導イヤホンを抜いてから行ってください。差し込んだまま本体とイヤホンを接近させると、ピー音(ハウリング)が出ます。

- 万一再生、交換などしないでご自分で処分される場合は、一般ゴミにはくれぐれも出さないでください。内蔵のリチウムポリマーには電解液に可燃性の有機溶剤が含まれています。有害、公害、発熱、破裂、発火の原因になります。地域の指定分別に従ってください。
- 本品は日常会話に便利なコミュニケーション機器です。(医療機器、補聴器ではありません)
- この商品は課税対象品です。(消費税がかかります)
- 商品の形、色、付属品、カタログ等はより良い商品に改良のため、予告なしに変更する場合があります。
- この商品の「電子部品」は日本を含め世界各国から調達しない日本国内だけでは集約できない昨今です。ただし「最終組立て」については自信を持って伊吹電子において品質管理の元、製造を行っております。

音声拡聴器

《骨伝導》クリアーボイス 春夏秋冬

取扱説明書

● 日本製


各部の名称



付属品



アダプター

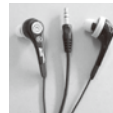

骨伝導イヤホン



ストラップ



ポケットホルダー

別売品



骨伝導ヘッドホン

IBUKI 株式会社 伊吹電子

充電が完了した商品をお聴くとき

【直接、耳に当てて聴く場合】

- 電源SWは横側の<切←主電源→入>を指先(爪先)で「入」にまわしてください(カチッ音が感触で)。そのまま横側の「押す」部分を摘みながら耳に当ててください。
その時、下側のLEDランプが青色に点灯します。
※ご注意…摘む(押す)際、下側のマイク(集音部)部分を手の平などで触れない様に摘んでください。ピー、ピー音が発生して耳に障害となり、会場など多く集まる場所では周囲の方にご迷惑となります。ご注意ください。
- 音量は横側の<切←主電源→入>・<小←音量→大>で調整してください。一気に上側に廻し過ぎると音量が大き過ぎて耳に障害になります。小から徐々に調整してください。
耳に直接当てて聴く場合の音量は大きめが目安ですが個人差がありますのでご自分に合わせてください。
- 終了する時は「主電源」を「切」にしてください。
- 振動子(黒くて丸い耳に当てる部分)を指や硬い物で押さないでください。軟らかい部品ですので凹んだり曲がったり変形し、聴こえ方に影響します。
- 振動子周辺の丸いリングをつまんだり、起こす、はがす様なことはしないでください。変形し、そのまま耳に当てた時、耳などを怪我することがありますのでご注意ください。

【骨伝導イヤホンを使う場合】

- ご自分の耳穴に合う同封の先端用耳栓スプアーを選んでください。
骨伝導イヤホンのプラグを上側の「イヤホン」穴に差し込んでください。一方の耳栓部分を右・左間違いないで耳にはめてください。
※ご注意…長い時間(テレビ、団らん、講演会など)骨伝導イヤホンを使用する場合は、横の「押し」スイッチは摘まなくてもイヤホン側に切り替わります。ストラップで首から提げるかテーブルに置いてお聞きください。
- 音量は横側の<切←主電源→入>・<小←音量→大>で調整してください。一気に上側に廻し過ぎると音量が大き過ぎて耳に障害になります。小から徐々に調整してください。音量が大き過ぎると耳の障害となります、くれぐれもご注意ください。
- 骨伝導イヤホンを使わないでテーブルなどに放置する場合、本体マイク部分とイヤホンを近づけるとピー、ピー音が発生します。
周辺(大勢が集まる場所など)の方々にもご迷惑となります。ご注意ください。

[illegible]

- ★内部の電池は電解液に可燃性の有機溶剤が含まれています。一般ごみには出さないでください。有害、公害、発熱、破裂、発火の原因になります。地域の指定分別に従ってください。