



このたびはフランスベッドの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
取扱説明書を読んだ後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

安全で快適にお使いいただくために

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命にかかわるケガを負う可能性が想定される内容を示します。



禁止

他社製の介護ベッド／メディカルベッド／リクライニングベッドでは使用しない
ベッドフレームや付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。



禁止

マットレスの上で立ち上がったり飛び跳ねたりしない
転倒によるケガやマットレスの破損の原因になります。



禁止

マットレスの近くで喫煙したり、ストーブやお線香などの火気を使用したりしない
火災の原因になります。



禁止

人や重いものを載せたままマットレスを移動しない
転落によるケガやマットレスの破損の原因になります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。



禁止

揮発性溶剤（シンナー、ベンジンなど）で拭かない
マットレスの変形、変色、劣化の原因となります。



禁止

ラベル類をはがさない
カバーの破損の原因になります。
また、ラベル類が無いと商品の特定ができなくなるため、保証の対象とならない場合があります。



注意

ファスナーの引き手を終点に収納して使用する
ベッドのヘッドボードを傷つける恐れがあります。
当社製のベッドの上に設置し、パッド、シーツなどをメイキングしてからお使いください。

 注意	直射日光の当たらない場所に設置／保管する 直射日光にさらされると、マットレスの変形、変色、劣化の原因となります。
 注意	マットレスの上で縫い物をするなど、鋭利なもの（針、ハサミ、ナイフなど）を使用しない 針などがマットレスの中に入り、ケガやマットレスの破損の原因になります。
 注意	汚れた場合は、出来る限り速やかに洗浄してください 汚物などで汚れると衛生面によくだけでなく、中材の弾性に影響を与える可能性があります。
 注意	定期的に、寝装品を取り除き、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。 汚れや湿気は、臭いやカビが発生するなど衛生面に悪影響を及ぼし、マットレスの劣化の原因にもなります。使用中に大量の汗をかく場合は、体位変換や空調の管理、シーツの交換を行い、湿気が溜まらないようにしてください。
 注意	カバーの洗濯などの取扱いは、タグ表示を参照して行ってください。
 注意	定期的に、頭部と脚部を入れ替えて使用してください。 入れ替えをせず長期的に使用するとマットレスの身体へのなじみが発生する場合があります。

仕様

DS-80 標準	寸法	幅 910 × 長さ 1950 × 厚み 80
	重量	5.2Kg
DS-80 ショート	寸法	幅 910 × 長さ 1810 × 厚み 80
	重量	4.8Kg
DS-80 97 幅	寸法	幅 970 × 長さ 1950 × 厚み 80
	重量	5.6Kg
DS-80 スーパーショート	寸法	幅 850 × 長さ 1690 × 厚み 80
	重量	4.2Kg
カバー	材質	ポリエステル 100%
中材	ウレタンフォーム	
洗浄	カバー・中材 洗浄可能	

保管

- マットレスの上に重たいものやマットレスを何枚も重ねて長時間保管しないでください。
- マットレス専用の洗浄・乾燥機で乾燥した場合、熱が十分さめてから水平に保管してください。
高温の状態で保管する場合は立てて保管してください。
- 高温多湿のところや、直射日光があたりところでの保管はしないでください。

お手入れの方法



禁 止

- 消毒や汚れ落としに、揮発性溶剤（シンナー、ベンジンなどの溶剤）、高水準消毒液、アルコール類を使用しないでください。
- 塩素系及び酸素系漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥は行わないでください。
- ドライクリーニングは行わないでください。

中材のお手入れ

- 乾燥は風通しのよい場所に立てて陰干しをしてください。

カバーのお手入れ

- 汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
- 液温 40℃を限度として洗濯機で弱い洗浄することができます。
- 洗濯機での洗浄は必ずマットレスに取付けてありますタグに従ってください。
- 市販の洗濯用ネットを使用してください。
- 洗剤は中性洗剤を使用し、塩素系及び酸素系漂白剤は使用しないでください。
- 日陰つり干しを推奨します。
- アイロン仕上げは行わないでください。
- 非常に弱い操作によるウェットクリーニングが出来ます。

アフターサービス

保証書に、所定事項をご記入いただき、大切に保管してください。

保証期間中に修理をご依頼いただいた場合は、保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間を過ぎている場合も、ご希望に応じて有料で修理いたします。

(修理しても使用できるようにならない場合は、事前にお知らせいたします。)

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みになり、取り扱い方法に誤りがないことをご確認ください。

修理を依頼されるときは、以下の内容をご準備の上、お買い上げいただいた販売店またはお客様相談室へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ・ご住所
- ・お名前
- ・お電話番号
- ・製品名
- ・販売店名
- ・お買い上げ日
- ・故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室

弊社製品は、厳格な検査を経て納入させていただいておりますが、万一、不具合がございましたら、お買い上げいただいた販売店またはお客様相談室へお問い合わせください。

 0120-39-2824

9～12時、13～17時（土・日・祭日・年末年始は除きます。）

フランスベッド株式会社

保証書

保証期間	お買い上げの日より	:	1年
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	ご芳名		
	〒 □ □		
	ご住所		
	TEL		
販売店	店名・住所		

法的責任 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は相談窓口にお問合わせ下さい。

保証の対象

マットレスのみ行います。

保証の態様

- (1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合は無償修理をいたします。
- (2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。

※ 保証を受けるには、保証書及び納品書又は領収書を提示する必要があります。

保証を受ける条件
保証を受けるには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。

※ 本保証書、納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証書の有効期限
(1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。

(2) 保証書及び納品書又は領収書が破損、不意や過失によって故障が生じた場合。

(3) 本製品を使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。

(4) ご購入後、移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。

(5) 火災・天災・地変によって故障又は損傷が生じた場合。

(6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。

※ 上記項目については有償修理になります。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111 (代表)

