


- ★ 安全のため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。
- ★ お読みになった後は、いつでも必要な時に取り出せるように、所定の場所に保管してください。

マグネシウム合金製歩行補助器 Mgウォーカー250N 折りたたみ式

取扱説明書

Mgウォーカーは歩行の際の補助として使用する器具です。

各部の名称

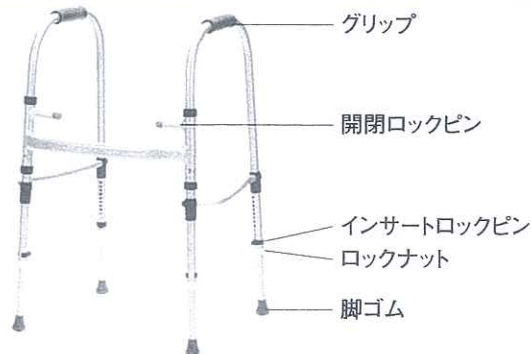

★安全のために、必ずお守りください

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記のように警告・注意を記載しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



警告

● 転倒して怪我を防ぐために、以下のことに注意してください。

- ・ 高さは必ず使用者に合わせて調整してください。
- ・ 高さ調整インサートロックピン4ヶ所が固定穴にきちんと挿入されているか確認してから使用してください。
- ・ 4ヶ所のロックナットがしっかり締まって固定されている状態で使用してください。
- ・ 使用時には開閉ロックピン2ヶ所がしっかり入っていてロックされている状態であることを確認してください。
- ・ 脚ゴムはすり減ったまま使用せず、早めに交換してください。
- ・ グリップはしっかりと持って使用してください。
- ・ 柔らかいところ、滑りやすいところでは使用を控えてください。
- ・ 段差等で不安定な状態では使用しないでください。
- ・ 4ヶ所の脚ゴムが全て地面、床に接地するように使用してください。
- ・ 使用者に合った歩幅でご使用ください。
- ・ ぬかるみや油分のつくところでは使用しないでください。
- ・ 温泉や、浴室での使用は控えてください。



注意


● 安全に長くご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・ 火気、熱源に近づけないでください。変形、変質、変色、燃焼の恐れがあります。
- ・ 改造しないでください。破損又は怪我の恐れがあります。
- ・ 小さなお子さまの遊び道具にしないでください。事故の恐れがあります。
- ・ 折りたたみ時、展開時に踏み台等にしないでください。
- ・ 保管時は高温、多湿、直射日光は避けてください。
- ・ 本来の目的以外のご使用は避けてください。破損又は怪我の恐れがあります。
- ・ 段差に乗り上げるなどして脚の接地が悪くなりガタつく場合は、捻りを加えてしっかり4点接地するようにしてください。
- ・ 止むを得ず湿気の多い所で使用される場合は1～2ヶ月に1度、タイホーコーザイのPN55(潤滑剤)を赤い玉の内側にある小さな穴からノズルを使い噴きつけてください。

裏面も必ずお読みください。

ご使用方法

各部名称

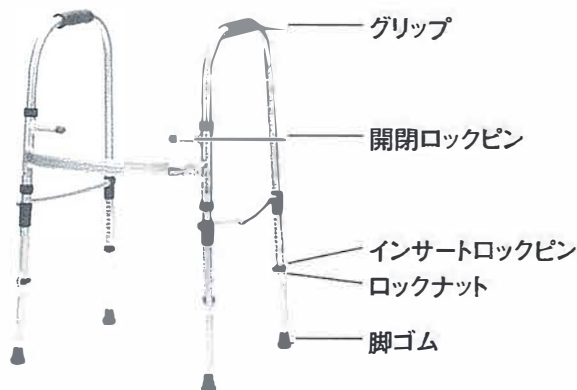

開閉方法

1. 折りたたまれた状態より左右のフレームをゆっくり開きます。
2. 開閉ロックピンが挿入されるまで開きます。
3. 開閉ロックピンが入り、カチッと音がすること、左右フレームがピンによりロックされていることを確認してください。

折りたたむときは開閉ロックピンを引き抜いた状態で左右フレームを折りたたみます。

※段差に乗り上げるなどして脚がガタつく場合は、捻りを加えてしっかり4点接地するようにしてください。

高さ調整のやり方



ロックナットを1回転緩めます。



インサートロックピンを引き抜きます。



使用しやすい高さに調整し、穴の位置を合わせます。



インサートロックピンを合わせた穴に差し込みます。



ロックナットを締め、固定します。しっかり固定されていることを確認して、ご使用ください。

お手入れ方法

- ご使用後はやわらかい布等で汚れを拭き取り、湿気のない場所に保管してください。
- 汚れがひどい時は、中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし等は、使用しないでください。

主な仕様

	Sサイズ	Mサイズ
重 さ [kg]	1.45 (±5%)	1.55 (±5%)
横幅 (グリップ内側) [cm]	53.5 (35.5)	56 (43.5)
奥 行 き [cm] (折りたたみ時)	44 (約17)	44 (約11)
高 さ [cm]	63~74	74.5~85.5
垂直耐荷重 [kg] (4点接地)	190	190

材 質：本体／マグネシウム合金（一部アルミニウム）
グリップ・脚ゴム／エラストマー樹脂

製造国：日本

◆ ご不明の点、万一故障や事故の場合には、下記へご連絡ください。

販売元：フランスベッド株式会社
〒196-0022
東京都昭島市中神町1148番地
TEL 042(543)3111 (代表)

製造元：田辺プレス株式会社
マグネシウム事業部
〒955-0814 新潟県三条市金子新田984-21
TEL：0256-32-1492 FAX：0256-35-8095