





R-Lブロック 取扱説明書

このたびはフランスベッドの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
取扱説明書を読んだ後は、いつでも取り出せるところに保管してください。






絵表示について

※この取扱説明書及び、製品の表示では製品を安全に正しくお使いいただくために、また使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示をしています。
その意味と内容をよく理解してから本文をお読みください。






 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(～しないでください)
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。(～してください)

安全で快適にお使いいただくために

警告

	他社製の介護ベッド／リクライニングベッドでは使用しないでください。 禁止 ベッドフレームや付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。
	当社の910mm幅の標準マットレス(厚さ120mm)以外で使用しないでください。 禁止 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。
	延長ブロックやマットレスの上で、飛び跳ねないでください。 禁止 転倒によるケガや破損の原因になります。
	延長ブロックやマットレスの上で喫煙をしないでください。 禁止 火災になる恐れがあります。
	延長ブロックの近くでストーブ等を使用しないでください。 禁止 火災の恐れや破損の原因になります。

注意

	定期的に寝装品をはずし、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。 注意 臭いやカビの原因になります。
	洗浄の際は取扱説明書に記載されているお手入れ方法に従い、洗浄してください。 注意 破損の原因になります。
	マットレスの上で、縫い物等(針、はさみ、ナイフ等の使用)しないでください。 禁止 針がマットレスの中に入ってしまったたり、破損の原因になります。
	ラベル類をはがさないでください。 禁止 無理にはがすと、生地の変色や破損の原因になります。
	直射日光の当たる場所は避けてください。 禁止 変形や変色の原因になります。


仕様

当社の910 mm幅マットレス(幅910×長さ1950×厚さ120mm)をロングサイズ(長さ2090mm)に延長するブロックとなります。

寸法	幅 910 × 長さ 140 × 厚み 120mm	
重量	0.65 kg	
カバー	クッション部	ポリエステル100%
	伸縮部	ポリエステル 82% ポリウレタン18%
中材	ウレタンフォーム かたさ：かため（140N）	

使用方法

頭側へ取り付けてください。

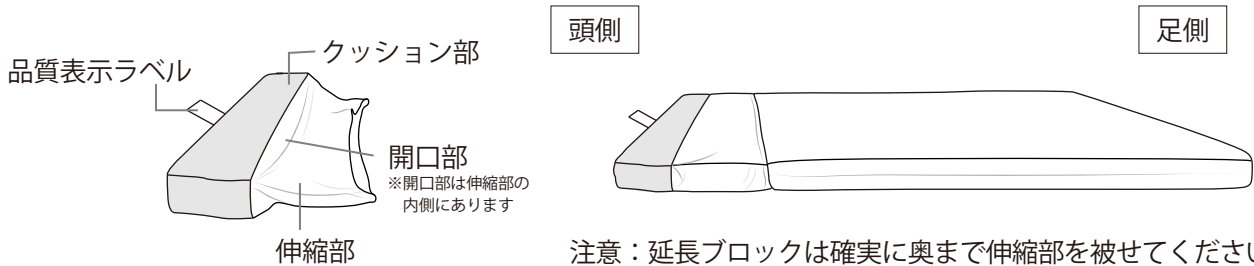

注意：延長ブロックは確実に奥まで伸縮部を被せてください。隙間ができ、ケガの原因になります。

お手入れ方法

カバーの洗浄

- ・ 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤や塩素系の溶剤は使用しないでください。
- ・ 液温40℃を限度として洗濯機で洗浄することができます。洗濯機での洗浄は必ずクッション部に取り付けてあります品質表示ラベルの内容に従ってください。
- ・ 洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、塩素系の洗剤・漂白剤は使用しないでください。
- ・ タンブル乾燥は行わないでください。

丸洗いの洗浄

丸洗いの場合は、カバーをしたまま、液温は40℃以下にし、中で踊らないよう必ずクッションを固定してください。乾燥温度は、ブロックの表面温度が60℃以下になるようにしてください。

アフターサービス

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または下記へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・

住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（可能な限り詳しく）

お客様相談室

弊社の商品は、厳格な検査を経て納入させていただいておりますが、万一、不具合な点がございましたら、お買い上げいただいた販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

固定電話からは
フリーダイヤル  **0120-39-2824**
携帯・スマホからは
ナビダイヤル  **0570-666-996**

月～金 9時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始・弊社指定の休日は除きます。）

製造元：フランスベッド株式会社
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148-5

保証書

保証期間	お買い上げの日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご芳名 _____ 様
	〒 □□□-□□□□
	ご住所 _____
TEL _____	
販売店	店名・住所 _____

保証の対象
本体のみ行います。

保証の態様

- (1)保証期間内において、取扱説明書、製品添付の注意ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無償修理致します。
- (2)ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にご連絡下さい。
- (3)離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿った訪問に要する実費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、出張修理の際に本保証書及び販売店納品書又は領収書を提示して下さい。

※注意 本保証書にお届け日、販売店名の記入の無き場合は、納品書又は領収書を併せて保管願います。

保証の適用除外

- (1)本保証書及び納品書又は領収書のご提示が無い場合。
- (2)誤った使用あるいはお取扱上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (3)本製品をご使用者自身又は他業者により変造、改造された場合。
- (4)ご購入後の移動や輸送及び落下等、不適切なお取扱により故障及び損傷が生じた場合。
- (5)火災、地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障又は損傷が生じた場合。
- (6)本製品の製造上に起因した欠陥であることを確認できない場合。
- (7)本製品の使用による経年変化に該当する事項、及び消耗品の交換。

※上記項目については有償修理になります。


修理の記録

商品の名称
表紙に記載しています。

法的責任
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を規制するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下さい。

免責
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

設置場所
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

フランスベッド株式会社 
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地
TEL 042(543)3111 (代表)