

**⚠ 注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

本品は、ハンドル型電動車いす及びアシスト三輪自転車の車体を日常の雨やほこりなどから保護する為の物です。目的以外の使用はしないで下さい。

強風や大雨などの環境においてはご使用をお控え下さい。風に飛ばされるなどして怪我をする恐れがあります。



注意


**仕様**

寸法	幅 70 cm×長さ 150cm×高さ 前 100 cm 後 80 c m
カバー材料	ポリエステル 100%

**脱着の仕方**

着脱は、周りに人がいない状況で強い風に注意して行って下さい。

- 生地が伸縮し袋状になりますので、「Reha tech」のロゴが車体の前方に来るよう、かぶせて下さい。外す際には突起などで破損せぬよう下から剥がすように外して下さい。

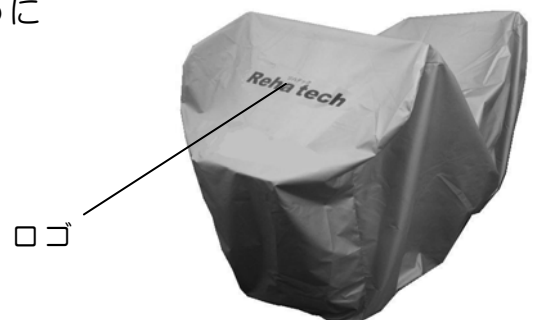

## お手入れの方法

### 【カバーのお手入れ】

- レインカバー裏の表示ラベルに従ってください。
- 洗濯やドライクリーニングはできません。
- 水やぬるま湯で汚れを洗い流すように洗ってください。

## アフターサービス

ご意見、ご質問はお近くの弊社支店、またはお買い上げの販売店へお申しつけ下さい。



0120-083413

発売元：フランスベッド株式会社