



# SKT-500/SKT-600 フット・レッグサポートの修正方法

フット・レッグサポートのボルト類に緩みやズレがないか、定期的に点検してください。


角度調整用のボルト穴位置が合わずキャップボルトが通りにくい場合は、下記の手順に従い、プレートが動く程度までボタンボルトを緩めてボルト穴位置を合わせてください。

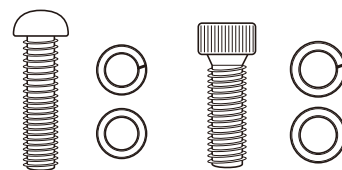

- 1** フット・レッグサポートフレームの可動部にかかるカバーを外します。

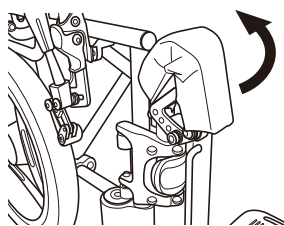


- 2** フット・レッグサポートフレームのボタンボルト2箇所を少し緩めます。  
※ボタンボルトは外さないでください。

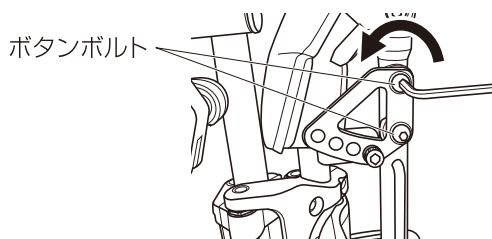

- 3** 角度調整用のキャップボルトを外します。




- 4** ご希望の角度を設定したら、ボルト穴位置を合わせ、角度調整用のキャップボルトを半分程度まで締め込みます。

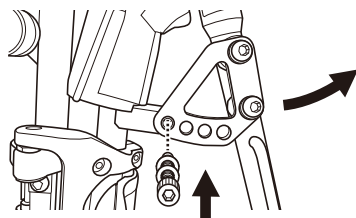


- 5** フット・レッグサポートフレームのボタンボルトを締め込みます。

締め付けトルク：5.0～6.0N・m

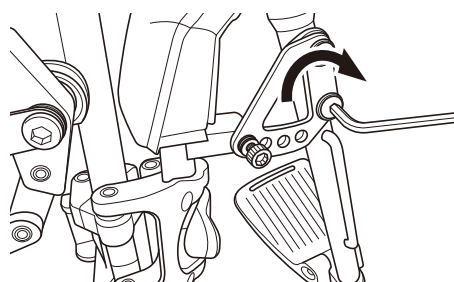


- 6** 角度調整用のキャップボルトを締め込みます。

締め付けトルク：5.0～6.0N・m

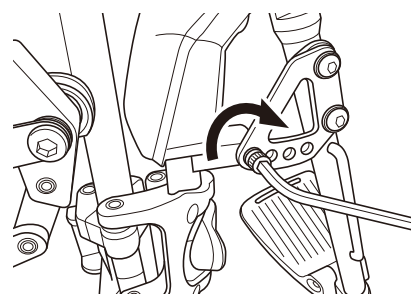

- 7** カバーを元の位置に戻します。

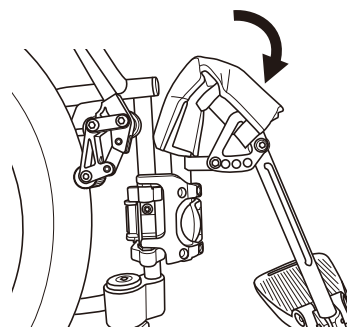

車いすの廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。

製造元

Wheel Chair  
**Miki** 株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号