


マットレス SM-12SU 取扱説明書


306104-8900

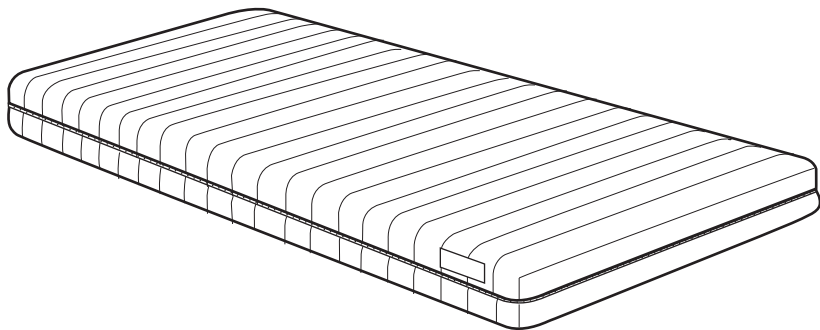

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。
当社の介護・メディカルベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。	
マットレスの上で、飛び跳ねないでください。 ケガをしたり、破損の原因になります。	
マットレスの上での喫煙はおやめください。 火災の原因等になることがあります。	
マットレスの近くでストーブや火気類を使わないでください。 引火して火災になる恐れがあります。	 禁 止
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
時々寝装品を取り除き、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。 臭いやカビの原因になります。	
先端が鋭利な金属、プラスチック等の硬いものが直接、マットレスにあたるようなご使用はお避けください。 破損の原因になります。	
マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ち、障害物に当たらないように運んでください。 障害物に引っ掛けたり、カバーだけをもち移動させると、カバーのホツレや破れの原因になります。	
ラベル類をはがさないでください。 無理にはがしますと、生地の変色や破損の原因になります。	
直射日光の当たる場所では使用しないでください。 変形、変色の原因になります。	
カバーのファスナー引き手が、終点にて収納されていることを確認してください。 引き手が飛び出していると、ヘッドボード等を傷つける恐れがあります。	
このマットレスは表・裏および頭部と脚部の入れ替えができません。 設置時にはかならず中材の向きをご確認ください。	



●各部のなまえ

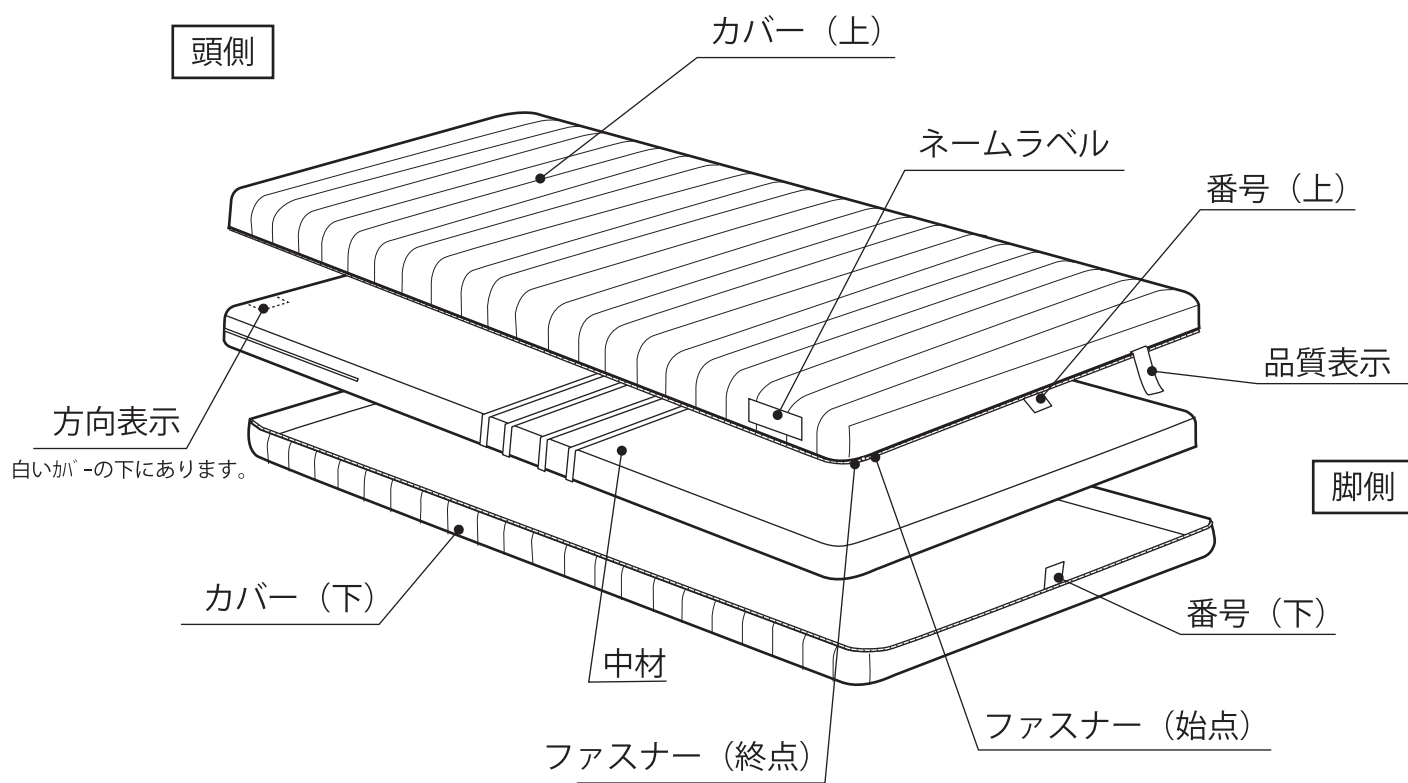

●仕様

寸法	SM-SU 標準サイズ	幅 850 × 長さ 1950 × 厚み 120mm
	SM-SU ショートサイズ	幅 850 × 長さ 1830 × 厚み 120mm
	SM-SU SWサイズ	幅 910 × 長さ 1950 × 厚み 120mm
	SM-SU SWS サイズ	幅 910 × 長さ 1830 × 厚み 120mm
	SM-SU シングルサイズ	幅 970 × 長さ 1950 × 厚み 120mm
カバー	外装生地	ポリエステル100%
	詰め物	ポリエステル綿、ウレタンフォーム
中材	詰め物	フェルト
	スプリング	マルチラスばね（薄型高密度連続スプリング）
特長	サイドアップ対応	

●お手入れ

<マットレスのお手入れ>

- ・風通しのよい場所に立てて、陰干しをしてください。
- ・著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固くしぼって拭き、自然乾燥して下さい。
- ・揮発性の溶剤（シンナー・ベンジン・灯油・ガソリン）などで拭かないでください。
- ・天日干しはしないでください。

<カバーのお手入れ>

SM-12SUはカバーの洗濯ができます。※白いカバーを含む「中材」は洗えません。
マットレスに取り付けてあります”品質の表示”にしたがって洗濯してください。

<注意事項>

- ・カバーの洗濯は、手洗いまたは洗濯機（弱水流）で行ってください。
- ・洗濯機を使用する場合、容量が12kg以上であることを確認してください。
- ・液温は40℃を限度とします。
- ・洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。
- ・タンブル乾燥温度は80℃以下にしてください。
- ・洗濯機・乾燥機使用時にはファスナーを終点まで閉めてください。
ファスナーを開いたままにすると、金具で生地を傷つけることがあります。
- ・中材にカバーを被せる際は、表・裏および頭部と脚部の向きを確認してください。
中材は「方向表示」のある面が使用面・頭側となります。
方向を間違えて使用しますと、破損の原因になります。
- ・複数のカバーを中材に被せる場合には、カバー脚側の上下に付いている「番号」が合うように確認してください。

このマットレスは表・裏および頭部と脚部の入れ替えができません。
設置時にはかならず中材の向きをご確認ください。

●アフターサービス

保証書：所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼される場合：保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間を過ぎて修理を依頼する場合：修理すれば使用できる場合は希望により有料で修理いたします。

修理を依頼されるときは

修理をご依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買いあげ店または下記のお客様相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室

弊社製品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたらお買い上げの販売店又は弊社相談室にお問い合わせ下さい。



フリーダイヤル 0120-39-2824

月～金 9時～12時、13時～17時 土、日、祭日、年末、年始等は除く
フランスベッド株式会社

保証書

保証期間	お買い上げの日より	:	1年
お買い上げ日	年	月	日

お客様	ご芳名	様
	〒□□□-□□□□	
	ご住所	
	TEL	

販売店	店名・住所
-----	-------

法的責任 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は相談窓口にお問い合わせ下さい。

保証の対象

マットレスのみ行います。

保証の態様

(1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。

(2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。

(3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。

※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証書の適用除外

(1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。

(2) 誤使用或いはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。

(3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。

(4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。

(5) 火災・天災・地変によって故障又は損傷が生じた場合。

(6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。

※ 上記項目については有償修理になります。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111 (代表)

