

★ 安全のため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。

★ お読みになった後は、いつでも必要な時に取り出せるように、所定の場所に保管してください。


T字型4つ折りパイプ杖

取扱説明書

T字型4つ折りパイプ杖は、歩行の際に体を支える補助として使用する杖です。


各部の名称

N-2010

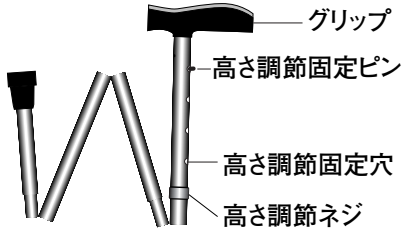

N-3070BR

(グリップに反射鏡うめ込み型)

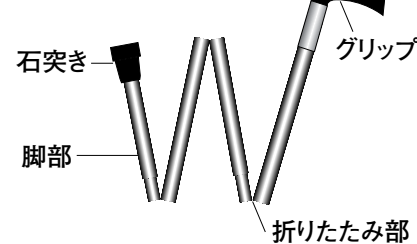

5023AK (ひも付き)



★安全のために、必ずお守りください

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記のように警告・注意を記載しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



警告

- 転倒して怪我をするのを防ぐために、以下のことに注意してください。
 - ・ステッキにセットする場合は、きちんと音がするのを確かめてください。
 - ・N-2010・5023AKは高さ調節ができます。固定ピンが、固定穴からきちんと突き出ていることを確認してから、ご使用ください。
 - ・極端に斜めにして使わないでください。
 - ・安定する場所に石突きをのせて、体を支えてください。
 - ・小石や段差の縁等に石突きをのせないでください。
 - ・やわらかい地面や、滑りやすい所では、使用しないでください。
 - ・グリップをしっかりと持って歩行してください。
 - ・石突きのゴムは、すり減ったままにせず、こまめに取り替えてください。



注意

- 火気、熱源に近づけないでください。変形、変質、燃える恐れがあります。
- 改造をしないでください。破損または怪我の恐れがあります。
- 小さなお子さまの遊び道具にしないでください。事故の恐れがあります。
- 本来の目的以外のご使用は避けてください。破損または怪我の恐れがあります。

ご使用方法

高さの調節

N-2010、5023AKは高さ調節ができます。(N-3070BRは高さ調節ができません)
高さ調節用固定ピンと、高さ調節用固定穴を使って、高さを調節できます。

- 固定ピンを押さえながら、脚先を上下させて、使う人の身長や腕の長さに高さを合わせます。
- 固定ピンの先が固定穴からカチンと音をたてて突き出し、確実に固定された事確かめます。

折りたたみ方

- このステッキは4つ折りできます。
- 3カ所の折りたたみ部を引き抜いてから折り曲げてください。



お手入れ方法

- ご使用後はやわらかい布等で汚れを拭き取り、湿気のない場所に保管してください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし等は、使用しないでください。

【主な仕様】

N-2010 (ケース付)
長さ：79～89cm
重量：380g

材質：アルミ製 (共通)
N-3070BR (クリップに反射鏡埋め込み型、ケース付)
長さ：84cm
重量：460g

5023AK (ひも付)
長さ：72～82cm
重量：340g

- ご不明の点、万一故障や事故の場合には、下記へご連絡ください。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地
TEL 042(543)3111 (代表)

- ご連絡いただきたい内容は
 - ・ご住所、ご氏名、電話番号
 - ・製品名、お買上げ店名、お買上げ年月日
 - ・故障又は異常の内容 (できるだけ詳しく)