


マットレス UF-71 取扱説明書

防水仕様

852670-8904

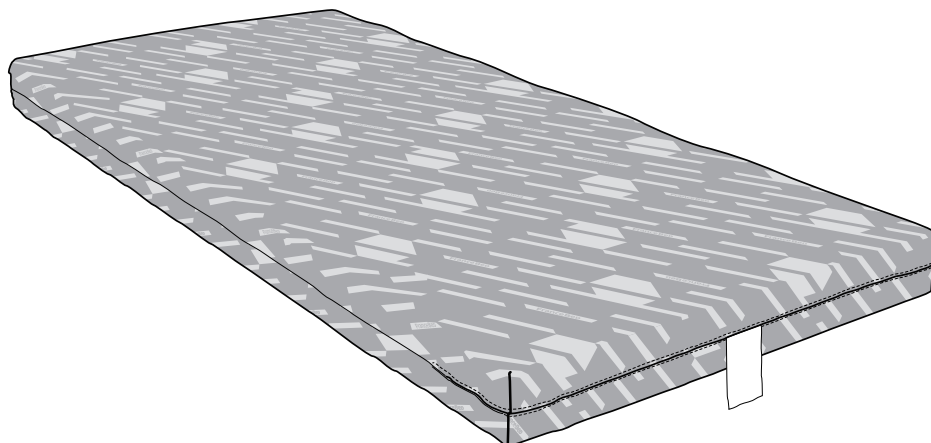

このたびはフランスベッドの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
取扱説明書を読んだ後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

ご使用にあたり

●床ずれ予防について

本製品のみでは床ずれ予防できません。床ずれになる原因は体圧の負荷だけでなく、使用者の栄養状態や室内環境、背上げ時のずれやこすれ、体位変換の回数等様々な要因が重なっています。床ずれ予防については、医師、看護師などの専門家にご相談ください。

安全で快適にお使いいただくために

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命にかかわるケガを負う可能性が想定される内容を示します。



禁 止

他社製の介護ベッド／メディカルベッド／リクライニングベッドでは使用しない
ベッドフレームや付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。



禁 止

12歳以下の子ども、新生児、幼児には使用させない
窒息など、思わぬ事故の原因となります。



禁 止

うつ伏せ寝で使用しない
窒息する恐れがあります。



禁 止

マットレスの上で立ち上がったり飛び跳ねたりしない
転倒によるケガやマットレスの破損の原因になります。



禁 止

マットレスの近くで喫煙したり、ストーブやお線香などの火気を使用したりしない
火災の原因になります。

 禁止	マットレスの上で縫い物をするなど、鋭利なもの（針、ハサミ、ナイフなど）を使用しない 針などがマットレスの中に入り、ケガやマットレスの破損の原因になります。
 禁止	人や重いものを載せたままマットレスを移動しない 転落によるケガやマットレスの破損の原因になります。
 注意	カバーの表面に割れや亀裂が生じたり、破れたりした場合は、速やかにカバーを交換する 防水性能が低下した状態で使用すると、カビなどが発生し、衛生面でのトラブルの原因となります。
 注意	失禁や出血などでマットレスが汚れた場合は、速やかに拭き取り、消毒と水拭きをしたあと、完全に乾燥させる カビが発生するなど、衛生面でのトラブルの原因になります。
 注意	薄手で吸湿性のあるシーツやカバーを掛けて使用する 何も掛けずに使用すると、使用感や衛生面に悪影響を及ぼし、マットレスの劣化の原因にもなります。 また、厚手のシーツやカバーを使用すると、体圧分散性が低下します。
 注意	定期的に、お手入れする 汚れや湿気は、臭いが発生するなど衛生面に悪影響を及ぼし、マットレスの劣化の原因にもなります。 使用中に大量の汗をかく場合は、体位変換や空調の管理を行ったり、シーツの交換をまめに行ったりして、湿気がこもらないようにしてください。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示します。

 注意	直射日光の当たらない場所に設置／保管する 直射日光にさらされると、マットレスの変形、変色、劣化の原因となります。
 注意	突起物のない平らな場所に設置／保管する 不適切な場所に設置／保管すると、マットレスの破損、変形、劣化の原因となります。
 注意	定期的に、頭部と脚部、表面と裏面を入れ替えて使用する いつも同じところに圧がかかると、体圧分散性が低下する原因となります。
 注意	ファスナーの引き手を終点に収納して使用する ベッドのヘッドボードを傷つける恐れがあります。
 注意	マットレスを持ち運ぶ際は、カバーだけをつかまず、カバーとクッション材をしっかりと持つ カバーが破損する原因となります。
 禁止	揮発性溶剤（シンナー、ベンジンなど）で拭かない マットレスの変形、変色、劣化の原因となります。
 禁止	天日干しはしない マットレスの変形、変色、劣化の原因となります。
 禁止	マットレス洗淨、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌）、オゾン滅菌等を行わない マットレスの変形、変色、劣化の原因となります。



長時間にわたって、重いものを同じ状態で載せたままにしない
クッション材の復元力が低下し、変形する恐れがあります。



ラベル類をはがさない
カバーの破損の原因になります。
また、ラベル類が無いと商品の特定ができなくなるため、保証の対象とならない場合があります。


仕様

寸法・重量	UF-71 85SS	幅 850 × 長さ 1690 × 厚み 120 mm	約 10 kg
	UF-71	幅 850 × 長さ 1950 × 厚み 120 mm	約 11 kg
	UF-71SW	幅 910 × 長さ 1950 × 厚み 120 mm	約 12 kg
	UF-71SWS	幅 910 × 長さ 1810 × 厚み 120 mm	約 11 kg
	UF-71 97	幅 970 × 長さ 1950 × 厚み 120 mm	約 13 kg
	UF-71 122	幅 1220 × 長さ 1950 × 厚み 120 mm	約 16 kg
カバー	材質	表生地フィルム：ポリウレタン 100% 生地：ナイロン 100%	
	性能	防水性、抗菌性、伸縮性、速乾性	
クッション材		ウレタンフォーム 硬さ：かため（約 130N） 復元率：約 95%	
ギャッチ対応		ギャッチ・サイドアップ機能対応	

お手入れの方法



- カバー、クッション材ともに、洗濯できません。（消毒液でカバーを清拭してください。）
 - 揮発性溶剤（シンナー、ベンジンなど）で拭かないください。
 - 天日干しはしないでください。
 - マットレス洗浄、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌）、オゾン滅菌などは行わないでください。
- ※業務用洗浄やガス消毒が必要な場合は、実地試験に基づいて条件設定し、お客様ご自身の責任で実施してください。

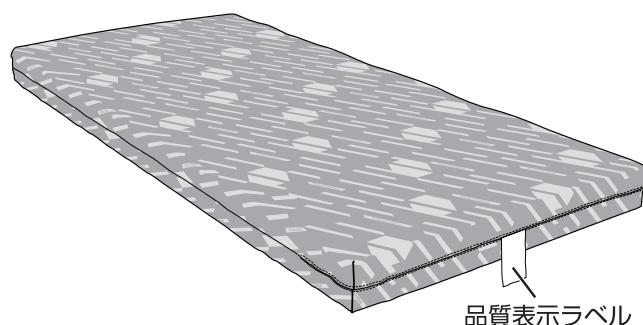

定期的なお手入れ

以下の消毒液で、カバーを清拭消毒してください。

- ・次亜塩素酸ナトリウム 0.1%（感染症対策などの場合は 0.5% まで可）
- ・消毒用エタノール 約 80%
- ・塩化ベンザルコニウム 0.2%
- ・塩化ベンゼトニウム 0.2%

著しく汚れている場合

水で薄めた中性洗剤を染み込ませ、固く絞った布で、汚れを拭き取ります。
その後、洗剤が残らないように十分に水拭きをし、自然乾燥させてください。

アフターサービス

保証書に、所定事項をご記入いただき、大切に保管してください。

保証期間中に修理をご依頼いただいた場合は、保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間を過ぎている場合も、ご希望に応じて有料で修理いたします。

(修理しても使用できないようにならない場合は、事前にお知らせいたします。)

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みになり、取り扱い方法に誤りがないことをご確認ください。

修理を依頼されるときは、以下の内容をご準備の上、お買い上げいただいた販売店またはお客様相談室へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名
- 販売店名
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室

弊社製品は、厳格な検査を経て納入させていただいておりますが、万一、不具合がございましたら、お買い上げいただいた販売店またはお客様相談室へお問い合わせください。



0120-39-2824

9～12時、13～17時（土・日・祭日・年末年始は除きます。）

フランスベッド株式会社

保証書

保証期間	お買い上げの日より	:	1年
お買い上げ日	年	月	日

お客様	ご芳名	様
	〒□□□-□□□□	
	ご住所	
	TEL	

販売店	店名・住所
-----	-------

法的責任 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は相談窓口にお問合わせ下さい。

保証の対象

マットレスのみ行います。

保証の態様

(1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。

(2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。

(3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。

※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証書の適用除外

- (1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。
- (2) 誤使用或いはお取り扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。
- (4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。
- (5) 火災・天災・地変によって故障又は損傷が生じた場合。
- (6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。

※ 上記項目については有償修理になります。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111 (代表)

