


# abonet<sup>®</sup> 取扱説明書

no.2027 abonet ホームつば付  
no.2028 abonet ホームピンタック N

no.2029 abonet ホームターバン N  
no.2171 abonet ホームワッチ

## ○ 装着方法

- ①インナーを被り、後頭部の面ファスナーでサイズを調節して下さい。
- ②アウターをインナーの上から被ってください。

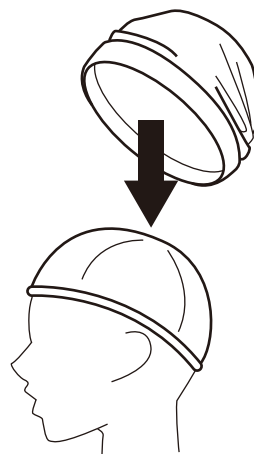

## ○ あごひもの取り付けについて (no.2027 / no.2028 / no.2029)

別売り品のクリップ式あごひもを取り付ける際は、インナー内側のループをクリップで挟んでお使いください。

## 洗濯方法



- ①アウターからインナーを取り外し、面ファスナーを留めて別々に洗濯してください。  
別売りのクリップ式あご紐を取り付けていた場合は、取り外して下さい。
- ②中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸けて、手洗い（押し洗い）して下さい。
- ③すすぎは水又はぬるま湯で十分に行った後、形を整えて陰干して下さい。



### 《お洗濯の際の禁止事項》

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控え下さい。

- |            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| ○乾燥機の使用    | ○つよく擦る・もみ洗い | ○漂白剤・有機溶剤の使用 |
| ○ドライクリーニング | ○濡れたまま放置する  | ○他の衣類と一緒に洗う  |



### 《注意・禁止事項》必ずお読み頂いた上で、お使いください。

- 頭部以外の部位に使用しないで下さい。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないで下さい。
- 緩衝材やインナーを取り外して使用することはおやめ下さい。
- 磨耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないで下さい。
- 本製品は頭部を保護するための帽子でありヘルメットではありません。法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないで下さい。また、本製品をかぶってオートバイに乗車しないで下さい。乗車用安全帽とは別ものです。設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。
- 本製品は正しい着用により頭部に対する衝撃を緩和するものであり、全ての衝撃を100%吸収するものではありません。
- 面ファスナーが衣服につかないよう装着して下さい。
- 局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
- 頭部に合ったサイズをお選びください。サイズが合わないものをご使用になられずと脱げたりする恐れがあり、事故の原因となります。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用の前に医師に相談して下さい / 頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方 / アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品の前後、裏表を正しく使用し、また、乱暴に使用しないで下さい。
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地の色移りする場合があります。



株式会社  
TOKUSHUIRYOU

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40  
TEL:011-663-0761 <http://www.tomoni.co.jp/>