










## マットレスSM-1 2SUF PW 取扱説明書

330603-8902

### 設置




 <b>警告</b>	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。</p>
<p>当社の介護・メディカルベッド、リクライニングベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</p>	 禁止
<p>マットレスの上で、飛び跳ねないでください。 ケガをしたり、破損の原因になります。</p> 	
<p>マットレスの上での喫煙はおやめください。 火災の原因等になることがあります。</p> 	
<p>マットレスの近くでストーブやお線香等を使わないでください。 引火して火災になる恐れがあります。</p>	
 <b>注意</b>	<p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。</p>
<p>時々寝装品を取り除き、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。 臭いやカビの原因になります。</p>	 注意
<p>マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ち、障害物に当たらないように運んでください。 障害物に引っ掛けたり、カバーだけを持ち移動させると、カバーのホツレや破れの原因になります。</p>	
<p>マットレスの上で、縫い物等、突起物（針、ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。 針がマットレスの中に入ってしまったたり、破損の原因になります。</p>	 禁止
<p>ラベル類をはがさないでください。 無理にはがしますと、生地破れや破損の原因になります。</p>	
<p>直射日光の当たる場所は避けてください。 変形、変色の原因になります。</p>	

 <b>注意</b>	<p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。</p>
<p>カバーのファスナー引き手が、終点にて収納されていることを確認してください。</p> <p>ファスナー引き手が“ブラブラ”と飛び出していますと、ヘッドボードを傷つける恐れがあります。</p> <p>当社製のベッドの上に設置し、パッド、シーツなどをメイキングしてからお使いください。</p>	 注意
<p>末永くお使いいただくため、定期的に頭部と脚部の入れ替えをおすすめします。表、裏の入れ替えはできません。</p>	

## 仕様

寸法	SM-12SUF PW SW	幅 910×長さ 1950×厚み 120 mm
	SM-12SUF PW SWS	幅 910×長さ 1810×厚み 120 mm
	SM-12SUF PW 97	幅 970×長さ 1950×厚み 120 mm
	SM-12SUF PW 85	幅 850×長さ 1950×厚み 120 mm
カバー	外装生地	ポリエステル 100%
	詰め物	ポリエステル綿、ウレタンフォーム
中材	詰め物	フェルト
	スプリング	マルチラスばね（マルチSUP）
ギャッチ対応	ギャッチ・サイドアップ機能対応マットレス	
洗淨	カバー洗濯	

## お手入れの方法

 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
当マットレスは、カバーの洗濯ができます。 お手入れの方法にしたがってください。	 注意
消毒や汚れ落としに、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤、また高水準消毒液、アルコール類を使用しないでください。 接触した場合は、温水でよくすすぎ乾燥させてください。	 禁止
中材の中身は出さないで下さい。 中材の袋の破損等の原因になります。	

### 【マットレスのお手入れ】

- 風通しのよい場所に立てて、陰干しをしてください。
- 業務用のガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。

### 【カバーのお手入れ】

- カバーをはずす場合は、ファスナーをあげ、中材を抜いてください。
- カバーを洗濯することができます。(中材は洗濯できません。)
- カバーをする場合は、ファスナー位置が下面、使用面が上面になるようにカバーをかぶせてください。
- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。
- 液温40℃を限度とし、弱水流にて洗濯することができます。
  - ・ ファスナーが洗濯層の中で暴れないように、ファスナーを終点まで閉めてから洗濯してください。
  - ・ マットレスに取り付けてあります”品質の表示”にしたがってください。
  - ・ 洗濯機の容量は12kg以上必要です。洗濯は洗濯機または弱い手洗いで行ってください。
  - ・ 洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥温度は80℃以下にしてください。
  - ・ ファスナーが乾燥機の中で暴れないように、ファスナーを終点まで閉めてから乾燥させてください。

# アフターサービス

保証書：所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼される場合：保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間を過ぎて修理を依頼する場合：修理すれば使用できる場合は、希望により有料で修理いたします。

## 修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または、下記のお客様相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室



フリーダイヤル：0120-39-2824

受付時間：月～金曜日 9時～12時 13時～17時

（土、日、祝祭日、年末年始、弊社指定の休日などは除く）

保証期間	年間	保証の対象 本体のみ行います。
お買い上げ日	年 月 日	保証の態様 (1)保証期間内において、取扱説明書、製品添付の注意ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無償修理致します。 (2)ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にご連絡下さい。 (3)離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けることがあります。
お客様様	ご芳名 〒□□□□-□□□□ ご住所 TEL	保証を受けるための条件 保証を受けるためには、出張修理の際に本保証書及び販売店納品書又は領収書を提示して下さい。 ※ご注意 本保証書にお届け日、販売店名の記入の無き場合は、納品書又は領収書を併せて保管願います。
販売店	店名・住所	保証の適用除外 (1)本保証書及び納品書又は領収書のご提示が無い場合。 (2)誤った使用あるいはお取扱上の不注意や過失によって故障が生じた場合。 (3)本製品をご使用者自身又は他業者により変造、改造された場合。 (4)ご購入後の移動や輸送及び落下等、不適切なお取扱により故障及び損傷が生じた場合。 (5)火災、地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障又は損傷が生じた場合。 (6)本製品の製造上に起因した欠陥であることを確認できない場合。 (7)本製品の使用による経年変化に該当する事項、及び消耗品の交換。 ※ 上記項目については有償修理になります。
商品の名称	表紙に記載しています。	修理の記録
法的責任	この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を規制するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下さい。	
免責	本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、あらかじめご了承下さい。	
設置場所	本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.	

フランスベッド株式会社  
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5  
TEL 042(543)3111 (代表)

製造元：フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5