


# サイドアップ機能対応ファイバーマットレス

## FM-ソフレスト

### 取扱説明書

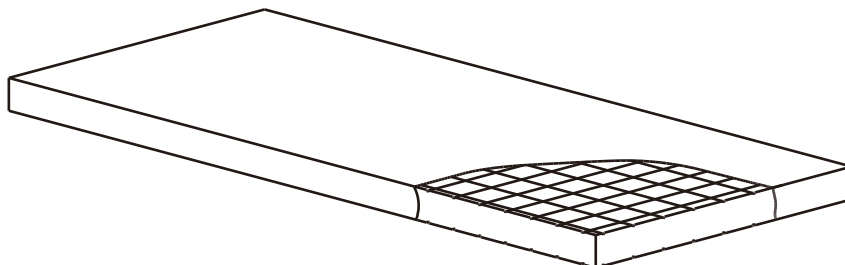

このたびはフランスベッドの製品をお買いあげいただきましてありがとうございます。

#### ⚠注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 取扱説明書はいつまでもご使用できるように大切に保管してください。

#### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

このマットレスは当社の介護・メディカルベッド用につくられており、他のベッドとの併用はしないでください。

リクライニング位置やサイズが異なり、十分な使用が出来ません。

直射日光の当たる場所では使用しないでください。  
変形、変色の原因になります。

ベッドを踏み台の代わりにマットの上で立ったり、  
マットレスの上で飛び跳ねたりしないでください。  
怪我をしたり、破損の原因になります。



マットレスの上での喫煙はおやめください。  
火災の原因となります。

高温多湿な場所は避け、湿気がこもらないように壁から5cm以上離してご使用ください。  
破損の原因になります。

汗を多くかけられる方が使用される場合は、体位変換や空調の管理を行い、シーツや  
マットレスパッドの交換を行ってください。

マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ってください。  
カバーだけをもち移動させると、カバーが破れる恐れがあります。

## ●特徴

- ティジンの縦型構造体のV-Lap®使用のマットレス。
- いくつもの支持面がスプリングの役割を果たします。
- ファイバーでありながら弾力性のあるマットレス。
- 優れた通気性・保温性
- 格子ギャッチ採用によりフラットで違和感のない寝心地。
- 座位保持機能（サイドアップ機能）対応

## ●お手入れ方法

### 【カバーのお手入れ】

- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。シンナー、ベンジンなど揮発性の溶剤は使用しないでください。
- 液温 40℃を限度として洗濯機で洗浄することができます。洗濯機での洗浄は必ずマットレスに取付けてありますタグに従ってください。
- 洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥温度は 80℃以下にしてください。

### 【中材のお手入れ】

- カバーを外し、40℃以下の温水に中性洗剤を溶かし、汚れた部分に流しながら軽く手でたたくようにすることで洗い流すことができます。乾燥は風通しの良い場所に立てて、陰干しをしてください。
- 丸荒いの場合、カバーをしたまま、液温は 80℃以下にし、マットレスが洗浄可能なドラム式洗濯機で洗濯することができます。中で踊らないように必ずマットレスを固定してください。乾燥温度は、マットレスの表面温度が 80℃以下になるようにしてください。

## ●仕様

	85幅標準	91幅セミワイド	97幅シングル	85幅ショート	91幅ショート
寸法 (cm)	幅85×長さ195×厚み8	幅91×長さ195×厚み8	幅97×長さ195×厚み8	幅85×長さ181×厚み8	幅91×長さ181×厚み8
重量 (kg)	4.6	4.9	5.3	4.3	4.5
材質	表地：ポリエステル100% 中材：ポリエステル65% 複合繊維(ポリエステル)35%				

## ●アフターサービス

弊社製品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、  
万一不具合な点がございましたらお買い上げの販売店または弊社相談室まで  
お問合せください。

ご連絡していただきたい内容……………ご住所、ご氏名、電話番号、型式名  
お買い上げ店、お買い上げ日  
故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

 0120-083413

発売元 フランスベッド株式会社