


◆◆ OPO レギュラークラッチ ◆◆

使用説明書

21-2-1 チャコールグレー 21-2-2 ブルー 21-2-5 ダークレッド 21-2-4 ライムグリーン

軽くてシンプル。一本で小柄な方から、背の高い方まで対応します。グリップからは細かく2cm刻みで16段階の長さ調節ができますが、調節穴は目立たず、すっきりしたデザインです。


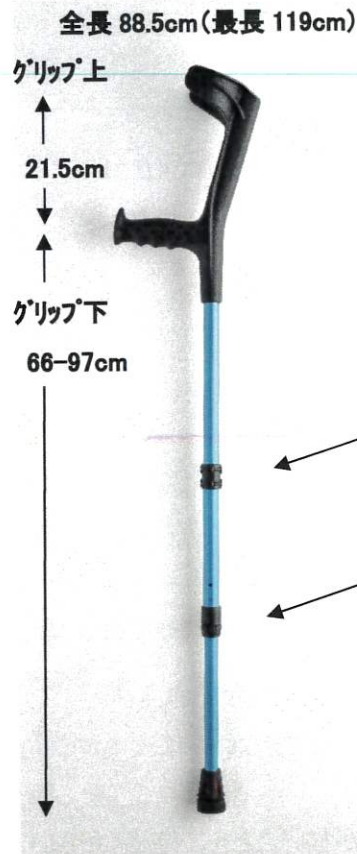


以下が適応サイズです。適応身長はあくまでも目安ですので、体型により違いがあります。ご了承ください。

重量	耐荷重	適応身長(目安)
500g	130kg	約 135cm～190cm 程度

長さ調整(16段階、2cm刻み)の方法

- ①調節クリップを両手で押し開き外します。
(本体を傷めるので、工具を使わず手で外してください！)
- ②下のネジを回し緩めます。
- ③長さを決めたらクリップを留め、下のネジを回して締めます。上方と下方に2個ずつ穴が開いていますので、短めの調整は上方の穴で、長い調整は下方の穴で行ってください。

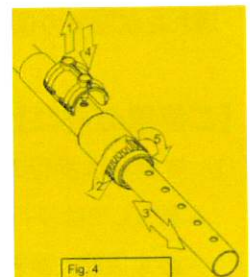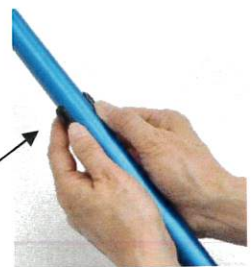

カタログと実際の製品の色は若干違うことがあります。製造されたロットによっても違いが出る場合があります。また、クラッチの塗装が大変デリケートなため、白いすじが入っている場合がございますが傷ではありません。何卒ご了承ください。

OPOクラッチを快適にする...別売り付属品

- ① ストラップ(クラッチ用ベルト)
※本体ご購入時には、1本付属しております。
- ② ソフトグリップカバー
- ③ アームカフカバー:長方形
- ④ 替先ゴム 19mm(2個入)



イタリア製/介護保険レンタル品目対象品・非課税

輸入販売元 : プロト・ワン株式会社

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ず以下の取扱説明をお読みの上、安全にご使用ください。

危険（重大なケガあるいは死亡事故につながるもの）

- ・小さなお子様の手が届く場所で保管しないでください。
- ・歩行補助、立位補助などの目的以外では使用しないでください。登山に使用したり、勾配が急な坂道などでの使用はしないでください。
- ・グリップ以外の場所を握って使用しないでください。
- ・濡れた床など滑りやすい路面では使用しないでください。
- ・裾の長い衣服など杖先で裾を踏み転倒する恐れがあります。
- ・杖はあくまでも補助器具のため、立位補助などの際の過度な力や、横方向からの力を加えないでください。

警告（重大なケガにつながるもの）

- ・改造やお客様による修理はしないでください。

注意（物的損害につながるもの）

- ・杖を地面などに叩きつけたり、倒したりしないでください。
- ・直射日光下での長期保管や極端に高温になる場所での保管はおやめください。
- ・濡れた状態での保管はおやめ下さい。

【ご使用前に】

- ① 本製品は歩行の補助をしながら、正しい姿勢を保ちやすくすることを目的として作られた杖です。
杖なしでは歩行できない方、リハビリ中などのように体重の一部を支えないと歩行できない方は、必ず医師、理学療法士、作業療法士などに相談の上ご使用ください。
- ② 各部品が正しくセットされ不足がなく、本体及び部品にぐらつき、亀裂などが無いことをご確認ください。

本製品につきましてご質問等ございましたら、下記までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

輸入販売元：



プロト・ワン株式会社

東京都文京区本郷 2-13-10 巴屋ビル 2F

TEL: 03-3816-3399 FAX: 03-3816-3933

<http://www.proto-one.co.jp/>

E-mail: info@proto-one.co.jp