

# 身体装着型 移動支援機器



## 取扱説明書（保証書付き）

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。（対象年齢18歳以上）

この度は、Qピットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、Qピットの使用方法と注意事項について記載しています。  
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、Qピットを末永くご使用いただくために、本書は大切に保管してください。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

#### ⚠警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。以下の内容を守らず誤った使用方をすると、使用者が死亡または、重症などを負う原因になります。

- ・ LED 光を絶対に目に直接照射しないでください。
- ・ LED 光を絶対に直接のぞき込まないでください。
- ・ LED 光を絶対に人に向けしないでください。
- ・ LED 光を絶対にガラスや鏡などに反射させないでください。
- ・ 屋内専用ですので、屋外でのご使用はおやめください。
- ・ 濡れた手で本体、AC アダプターやイヤホンを触らないでください。
- ・ 浴室など、湿気の多い所、本体に水がかかるおそれのある所での使用はおやめください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保管し、使用させないでください。
- ・ 本製品を分解、改造、修理しないでください。
- ・ 火のそば、暖房器具の近く、炎天下、高温になった車内など高温の場所で使用、保管しないでください。
- ・ 気温が 30℃ を超える場所での使用はおやめください。
- ・ 充電は付属の専用 AC アダプターを使用してください。
- ・ 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- ・ 電源プラグのほこりなどは取り除いてください。
- ・ 電源プラグやコードの破損したものは使わないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ・ 煙が出ている、異常に熱いなどの場合は使用をやめ、充電も行わないでください。火災や感電、故障の原因になります。（販売店にご相談ください）
- ・ 内部に水や異物が入った場合は使用をやめ、充電も行わないでください。火災や感電、故障の原因になります。（販売店にご相談ください）
- ・ 充電できない、すぐに電池が消耗するなどの場合は使用しないでください。（販売店にご相談ください）
- ・ 使用中体に異常を感じたり、不安を感じた場合には直ちに使用をやめ、医師に相談してください。

## ⚠️注意

故障やケガ、動作不良、故障の原因になることを記載しています。以下の内容を守らず誤った使い方をすると使用者が事故やケガ、器物の損壊などの恐れがあります。

- ・本製品の使用時間は10分です。連続して使用する場合は10分の休憩の後お使いください。
- ・本製品はすくみ足など、歩行をサポートする機器です。用途以外でのご使用はおやめください。
- ・使用者が使用方法を認知しにくい場合は介助者の方の見守り、サポートの中でお使いください。
- ・体調がすぐれない場合や無動 寡動 筋固縮などのオフ症状が出ている場合は無理にご使用にならないでください。
- ・反射鏡を素手で触らないでください。指を切る場合があります。お手入れの時は綿棒等で軽く拭いてください。
- ・階段など、すでに視覚刺激がある場面では使用しないでください。
- ・高温になるところに放置しないでください。
- ・充電は付属の専用 AC アダプターを使用してください。
- ・電源コードを持って抜かないでください。コードの破損により火災、感電のおそれがあります。
- ・電源コードを無理に曲げないでください。コードの破損により火災、感電のおそれがあります。
- ・使用中や充電中に、機器の上に布などをかぶせないでください。内部に熱がこもり火災や故障の原因になります。

## ※パッケージ内には下記の商品が梱包されています。

- ・ Qピット本体 ・ 腰ベルト ・ AC アダプター ・ イヤホン ・ 取扱説明書（保証書）



本体寸法：縦50mm×横120mm×奥行30mm ・ 重量：100g

## 使用方法


### ☆装着方法

ベルトを腰、胴のあたりに巻いてください。ベルトの素材が起毛した（ゴワゴワした質感の面）方が表になるように巻いてください。（前傾姿勢が強い方は胸の辺りに巻いていただく場合もあります）

赤色テープが上になるように巻くと下になるベルト部とマジックテープがつくようになります。

Qピット本体を胴中央部に取り付けてください。（マジックテープでどこにでも取り付けが可能です。）

### ☆視覚刺激

LED光を照射するには、本体上面の赤色スイッチ  を1.5秒程度長押ししてください。LED光のラインが床面に照射されましたらLED調整レバーで照射角度（ラインの位置）を調節してください。

使用を終了される時は、赤色スイッチを長押しして電源をオフにしてください。


・LED光を照射した状態で赤色スイッチを短く押すと点滅モードになります。

点滅のスピードは白色スイッチを短く押すごとに4種類の速さに切り替わります。

点滅モードを終了するには赤色スイッチを短く押ししてください。

通常の点灯モードに切り替わります。

### ☆聴覚刺激

リズム音を使用するには、本体正面の白色スイッチ  を1.5秒程度長押ししてください。

リズム音は白色スイッチを短く押すごとに4種類の速さに切り替わります。

・1パターン 60秒間に60回

・2パターン 60秒間に80回

・3パターン 60秒間に100回

・4パターン 60秒間に120回

使用を終了される時は、白色スイッチを長押しして電源をオフにしてください。

（イヤホンジャックにイヤホンを接続するとイヤホンからのみ音が出ます。）

### ☆オートパワーオフ

電源オンから約10分後に自動で電源が切れます。（切り忘れ防止、長時間使用によるケース内発熱防止のため）

再度使用するには10分間の休憩の後、ご使用ください。

### ☆確認音について

電源オン ピピ

電源オフ ピー

時間10分経過（オートオフ） ピーピーピー

バッテリー電圧（消失する時）ピピ ピピ ピピ ピー

### ☆充電について

充電中は充電ランプ赤が点滅し、終了すると消灯します。充電終了後は速やかにACアダプターを外してください。充電時間はおよそ4時間です。フル充電で使用時間は約2時間です。

## ☆故障かな?と思ったら

- ・ ボタンを押しても作動しない場合は、分解などせずに販売店にご相談ください。
- ・ 充電しなくなった場合は、販売店にご相談ください。
- ・ 落として破損した場合は、使用せずに販売店にご相談ください。
- ・ レンズ・反射鏡が結露した場合、LED 光のラインが見えにくくなることがあります。  
素手で拭き取るとケガの恐れがありますので、綿棒や柔らかい布で軽く拭き取ってください。

## 保証証書

製品名 Qピット

メーカー型番 HCQ-001

製造元 有限会社 ホームケア渡部建築

〒683-0104 鳥取県米子市大崎 290-1

お買い上げ年月日            年    月    日

販売店

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 保証期間内でも次のような場合は、有償となります。
  - (1) 天災および薬品、塩害による故障および破損。
  - (2) 警告、注意の記載を無視した場合。
  - (3) その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意、過失による故障および破損。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
4. 保証書は大切に保管してください。販売店、お買い上げ年月日の記載のないものは補償対象外になります。

※商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。(外観・仕様変更などにより、画像と商品とに差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。)