


RX-SLD-Ag BAE マットレス

取扱説明書

347303-8921

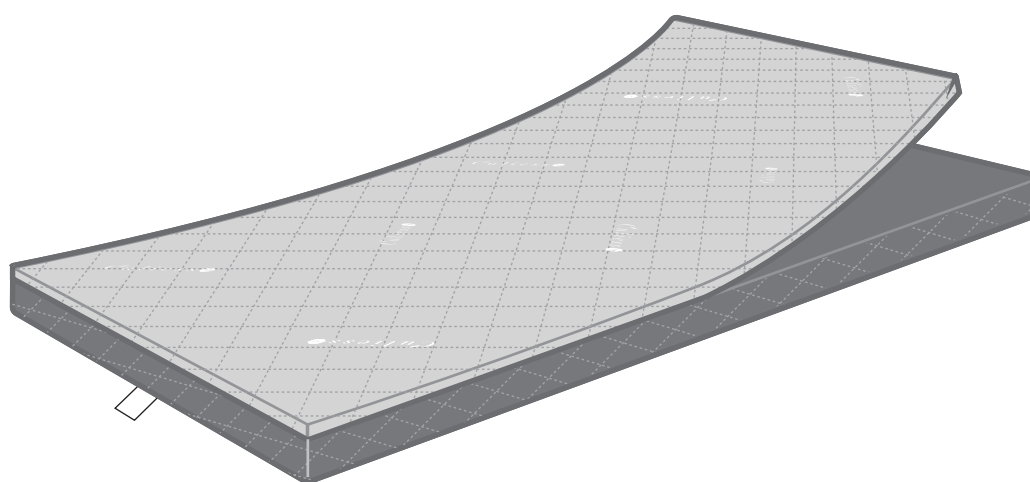





- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 安全のため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せるように、大切に保管してください。



目 次

安全のために必ずお守りください	1-2
仕様について	3
使用方法	4
お手入れの方法	5
アフターサービス	6
お客様相談室・保証書	背表紙

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の区分や図記号で表示しています。
その指示と内容は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

区 分	 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、『人が死亡または重傷を負う可能性』が想定される内容です。
	 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、『人が傷害を負う可能性』および『物的損害のみの発生』が想定される内容です。
図記号の例		⊘ 記号は、『禁止の行為であること』を示しています。
		● 記号は、『行為の強制や指示する内容』を示しています。

 警告	
<p>当社の介護・メディカルベッド、リクライニングベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</p>	 禁止
<p>マットレスの上で飛び跳ねないでください。 ケガをしたり、破損の原因になります。</p>	
<p>マットレスの上での喫煙はおやめください。 火災や破損の原因になります。</p>	
<p>マットレスの近くでストーブやお線香を使わないでください。 引火して火災になる恐れがあります。</p>	

⚠ 注意

時々寝装品を取り除き、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。

湿気が溜まると臭いやカビの原因になります。

マットレスを持ち運ぶ場合はカバーのみを持たず全体を持ち、障害物に当たらないように運搬してください。

障害物に引っかけたり、カバーのみを持ち運搬したりするとカバーのほつれや破れの原因になります。



注 意

カバーのファスナーが頭側にある場合、ファスナーの引手が終点に収納されていることを確認してください。

ファスナーの引手でヘッドボードを傷つける恐れがあります。
パット、シーツなどをメイキングしてからお使いください。

カバーを開けて使用しないでください。

本製品の中材（合成繊維）の切断面で皮膚が傷つく恐れがあります。

マットレスの上で縫い物など突起物（針、ハサミ、ナイフなど）の使用は避けてください。

針がマットレスの中に入ってしまう危険や、生地破れの原因になります。



禁止

ラベル類をはがさないでください。

生地のほつれや破れの原因になります。

直射日光の当たる場所は避けてください。

変形、変色の原因になります。


仕様

寸法	RX-SLD-Ag BAE R	幅 910× 長さ 1950× 厚み 120 mm
	RX-SLD-Ag BAE S	幅 910× 長さ 1810× 厚み 120 mm
	RX-SLD-Ag BAE L	幅 910× 長さ 2090× 厚み 120 mm
重量	RX-SLD-Ag BAE	R 13.5kg /S 12.5kg/L 14.1kg
カバー	外装生地：トッパー部	上面：ポリエステル 70% 綿 27% アクリル 3% 下面：ポリエステル 100%
	外装生地：ベース部	上面：ポリエステル 100% 下面：ポリエステル 100%
	詰物	ポリエステル綿
中材	詰物	フェルト 合成繊維（ ポリエーテルエステル系繊維 ）
	高密度連続スプリング	
ギャッチ対応	ギャッチ機能対応マットレス	
洗淨	カバー洗濯	

使用方法

腹部圧迫軽減仕様について


- このマットレスは腹部圧迫軽減仕様です。
利用者の方の体格やベッドフレームに合わせてファスナーを動かすことでスライド部の可動範囲を変更することができます。
使用時にはフレーム床板の背上げ曲げ位置 (※) にファスナーを合わせることを推奨いたします。

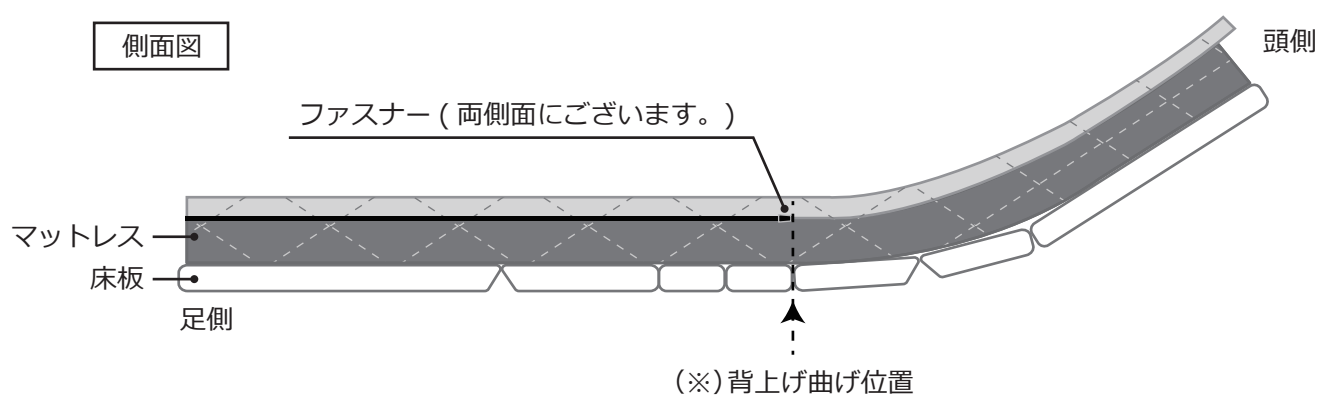

※利用者の方の体格により、スライド部の可動範囲が変わることがあります。
その場合はファスナーを任意の位置に変更し、調整してください。

上記ファスナー部について

- このファスナーは引手を下げた状態でロックがかかります。
マットレス使用時には、下記イラストを参考にファスナーをロックして使用してください。

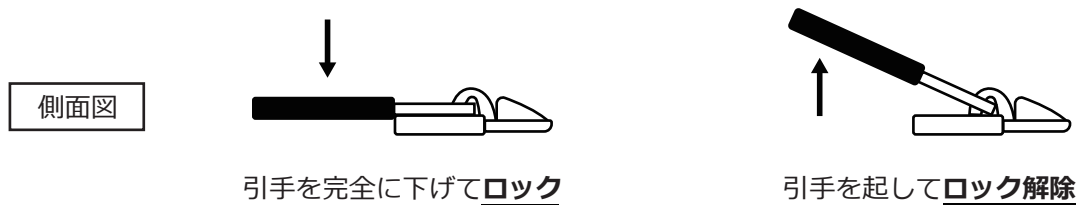

※ロックをしないで使用するとファスナーが動きますので必ずロックして使用してください。

お手入れの方法

⚠ 注意

当マットレスはカバーの洗濯ができます。

お手入れの方法に従ってください。



注 意

**消毒や汚れ落としにシンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤、また高水準消毒液
アルコール類を使用しないでください。**

接触した場合は、温水でよくすすぎ乾燥させてください。

中材の中身は出さないで下さい。

中材の袋の破損やケガの原因になります。



禁止

中材の天日干し、直射日光が当たる場所での乾燥はさけてください。

中材の劣化、変色、変形などの原因になります。

中材の洗濯機、乾燥機および漂白剤の使用はさけてください。

中材の劣化、変色、変形などの原因になります。

マットレスのお手入れ

- 風通しのよい場所に立てて、陰干しをしてください。
- 業務用のガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。

カバーのお手入れ

- 著しい汚れは中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ固く絞って拭き自然乾燥させてください。
- 液温 40℃を限度とし、弱水流にて洗濯することができます。
 - ・ ファスナーが洗濯層の中で暴れないように、ファスナーを終点まで閉めてから洗濯してください。
 - ・ マットレスに取り付けてあります” 品質表示の洗濯表示” にしたがってください。
 - ・ 洗濯は洗濯機または弱い手洗いで行ってください。
 - ・ 洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥温度は 80℃以下にしてください。
 - ・ ファスナーが乾燥機の中で暴れないように、ファスナーを終点まで閉めてから乾燥させてください。

保証書について

- ◎ 保証書はお買い上げ販売店で「お届け日、お買い上げ店名」を記入していただけてください。
- ◎ 保証書に記入ができない場合は、お届け日、お買い上げ販売店名のわかる書類（納品書や領収書など）と併せて大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

- ◎ 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ、なお異常がある場合には『お買い上げの販売店』、または弊社『お客様相談室』までご連絡ください。

保証期間中は

- ◎ 保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎてるときは

- ◎ 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

- ◎ できるだけ詳しくお願いいたします。
 - ①ご住所、ご氏名、電話番号
 - ②型式名、お買い上げ販売店名、お届け日
 - ③故障または異常の内容

修理料金の仕組み

修理料金は、「出張・不具合診断料」「見積技術料」「技術料」「部品費」などで構成されています。

- ① 出張・不具合診断料
お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣し、不具合内容の診断と初期修理に掛かる費用です。
- ② 見積技術料
不具合診断や修理費見積を行った後に、お客様より修理をご辞退（キャンセル）された場合の見積作成費用です。
- ③ 技術料
初期修理以降に発生する、修理及び部品の交換・調整・修理完了時の点検に掛かる費用です。
- ④ 部品費
修理に使用した部品及び補助材料代です。

お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まず、『お買い上げの販売店』へ
お申し付けください。

◎ 弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合点がございましたら、
『お買い上げの販売店』、または弊社『お客様相談室』にお問合わせください。

お客様相談室 電話番号  0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時
(土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く)

保証書

保証期間	お買い上げの日より	:	1年
お買い上げ日	年	月	日

お客様	ご芳名	様
	〒□□□-□□□□	
	ご住所	
	TEL	

販売店	店名・住所
-----	-------

法的責任
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合わせ下さい。

修理の記録

商品の名称
表紙に記載しています。

保証の対象
本体のみ行います。

保証の態様
(1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。
(2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。
(3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件
保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。
※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証の適用除外
(1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。
(2) 誤使用等によるお取り扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
(3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。
(4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。
(5) 火災・天災・地震によって故障又は損傷が生じた場合。
(6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。
※ 上記項目については有償修理になります。

設置場所
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan

免責
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

フランスベッド株式会社
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地
TEL 042 (543) 3111 (代表)