

S-L 延長ブロック 91-80 取扱説明書

このたびはフランスベッドの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

取扱説明書を読んだ後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

絵表示について

※この取扱説明書及び、製品の表示では製品を安全に正しくお使いいただくために、また使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示をしています。
その意味と内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(～しないでください)
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。(～してください)

安全で快適にお使いいただくために

警告

	他社製の介護ベッド／リクライニングベッドでは使用しないでください。 <small>禁 止 ベッドフレームや付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</small>
	当社の910mm幅のショートサイズマットレス(厚さ60~120mm)以外で使用しないでください。 <small>禁 止 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</small>
	延長ブロックやマットレスの上で、飛び跳ねないでください。 <small>禁 止 転倒によるケガや破損の原因になります。</small>
	延長ブロックやマットレスの上で喫煙をしないでください。 <small>禁 止 火災になる恐れがあります。</small>
	延長ブロックの近くでストーブ等を使用しないでください。 <small>禁 止 火災の恐れや破損の原因になります。</small>

注意

	定期的に寝装品をはずし、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。 <small>注 意 臭いやカビの原因になります。</small>
	洗浄の際は取扱説明書に記載されているお手入れ方法に従い、洗浄してください。 <small>注 意 破損の原因になります。</small>
	マットレスの上で、縫い物等(針、はさみ、ナイフ等の使用)しないでください。 <small>禁 止 針がマットレスの中に入ってしまったり、破損の原因になります。</small>
	ラベル類をはがさないでください。 <small>禁 止 無理にはがすと、生地の切れや破損の原因になります。</small>
	直射日光の当たる場所は避けてください。 <small>禁 止 変形や変色の原因になります。</small>


仕様

当社の910mm幅ショートサイズマットレス(幅910×長さ1810×厚さ60~120mm)をロングサイズ(長さ2090mm)に延長する専用クッションとなります。

寸法	幅 910 × 長さ 280 × 厚み 80mm	
重量	1 kg	
カバー	クッション部	ポリエステル100%
	伸縮部	ポリエステル 82% ポリウレタン 18%
中材	ウレタンフォーム かたさ:かため (160N)	

使用方法

頭側へ取り付けてください。

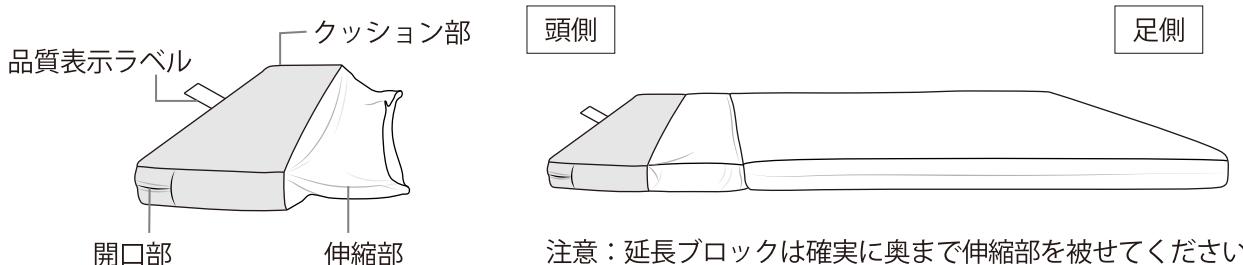

注意：延長ブロックは確実に奥まで伸縮部を被せてください。
隙間ができ、ケガの原因になります。

お手入れ方法

カバーの洗浄

- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤や塩素系の溶剤は使用しないでください。
- 液温40°Cを限度として洗濯機で洗浄することができます。洗濯機での洗浄は必ずクッション部に取り付けてあります品質表示ラベルの内容に従ってください。
- 洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、塩素系の洗剤・漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥は行わないでください。

丸洗いの洗浄

丸洗いの場合は、カバーをしたまま、液温は40°C以下にし、中で踊らないよう必ずクッションを固定してください。乾燥温度は、クッションの表面温度 60°C 以下になるようにしてください。

アフターサービス

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または下記へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・

住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（可能な限り詳しく）

お客様相談室

弊社の商品は、厳格な検査を経て納入させていただいておりますが、万一、不具合な点がございましたら、お買い上げいただいた販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

固定電話からは
フリーダイヤル
携帯・スマホからは
ナビダイヤル

0120-39-2824
0570-666-996

月～金 9時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始・弊社指定の休日は除きます。）

製造元：フランスベッド株式会社
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148-5