





**設置と名称**

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。	
	当社の介護・メディカルベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。	
	症状によっては、ベッド機能（背上げ、脚上げ）を使用した場合や長時間同じ姿勢でいることにより、症状を悪化させる可能性があります。使用に際しては、医師・看護師など専門員の指示に従ってください。	
	使用中、身体に異常を感じたり不安を感じた場合、直ちに使用をやめ医師・看護師など専門員にご相談ください。	
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。	
	直射日光のあたる場所は避けてください。 変色の原因になります。	
	”床ずれ”は様々な要因が重なっています。このマットレスは体圧を分散するマットレスであり、床ずれ防止を保証するものではありません。 SF-Proは裏表・頭側足側の区別があります。品質表示ラベル側が足側、印刷面が表側です。 頭側・脚側を確認して設置してください。 設置方向を誤りますと体圧分散効果を損なう恐れがあります。	
	マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ってください。 カバーだけを持ち移動した場合、カバーが破れる恐れがあります。	

表側

品質表示ラベル  
印刷面が表面



裏側

SF-Proは裏表・頭側足側の区別があります。品質表示ラベル側が足側、印刷面が表側です。

**仕様**

寸法	SF-Pro85	幅 850×長さ 1950×厚み 100 mm	重量	約 5.5 kg	
	SF-Pro91	幅 910×長さ 1950×厚み 100 mm		約 5.5 kg	
	SF-Pro97	幅 970×長さ 1950×厚み 100 mm		約 6 kg	
	SF-Pro85S	幅 850×長さ 1810×厚み 100 mm		約 5 kg	
	SF-Pro91S	幅 910×長さ 1810×厚み 100 mm		約 5.4 kg	
表地	ポリエステル	表地機能	制菌加工	中材	ウレタンフォーム 積層
			吸水速乾		


- 端面は端座位、介助がしやすいようにクッションが硬めにしています。
- 背上げらく機能、座位補助ベッドのサイドアップ機能に対応しています。

**お手入れ**

汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。また、表地は液温 40℃以下として洗濯機で洗濯することができます。洗濯ネットをご使用ください。  
必ずマットレスに取付けてありますタグに従ってください。

## アフターサービス

異常がある場合は、お買い上げ店または、上記に連絡してください。住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、異常の内容をご連絡ください。

 フリーダイヤル：0120-083413

製造元：フランスベッド株式会社  
〒196-0022 東京都昭島市中神町 1148 番地 5

851471-8903

## 保証書

### 保証書

この製品は、厳重なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受付け致します。

※ 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。  
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5  
TEL 042 (543) 3111 (代表)

型 式	<b>SF-Pro</b>
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から1年間
お 客 様	ご住所 〒  ご氏名 様 電話番号

販  
売  
店

### ◇◇◇ 保証規定 ◇◇◇

- 保証期間内に正常なる使用状態において万一故障した場合には、無償修理致します。  
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させて頂きまますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。  
(イ) 使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転落、落下等による故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。  
(ニ) 電源を使用する製品においては、指定電源（日本国内仕様）AC100V 50/60Hz以外での使用や異常電圧による故障及び損傷。  
(ホ) 本保証書のご提示がない場合。  
(ヘ) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。  
(ト) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。  
(チ) 消耗部品の取替え及び点検等の費用。  
(リ) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿った訪問に要する実費を申し受けることがあります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 法的責任  
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合わせ下さい。
- 保証の対象  
本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
- 免責  
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。

修理の記録