




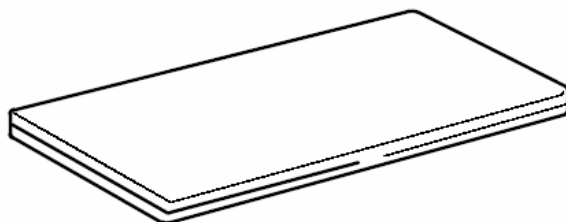

FRANCEBED

高密度ウレタン薄型マットレス ウォッシュابلタイプ

SM-28/N/NW/NS/NSS 取扱説明書



## 設置と名称

<div><div>警告</div></div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。</div>	
<div>当社の介護・メディカルベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</div>	<div><div>禁 止</div></div>
<div><div>注意</div></div> <div>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。</div>	
<div>当マットレスは体圧分散性がありますが、床ずれ予防用具ではありません。 床ずれの予防には、床ずれ予防用具をお使いください。</div>	<div><div>注 意</div></div>
<div>マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ってください。 カバーだけを持ち移動させると、カバーが破れる恐れがあります。</div>	

当社製のベッドの上に設置し、パッド、シーツなどをメイキングしてからお使いください。頭側脚側、表面裏面の区別はありません。

## 仕様

寸法	SM28N	幅 850×長さ 1950×厚み 60 mm
	SM28NW	幅 1030×長さ 1950×厚み 60 mm
	SM28NS	幅 850×長さ 1810×厚み 60 mm
	SM28NSS	幅 850×長さ 1690×厚み 60 mm
表地	●ポリエステル 100% ●制菌加工・特定用途S E K 赤	
中材	表面	高弾性ウレタンフォーム
	芯材	半硬質ウレタンフォーム
重量	SM28N	約 5.2 kg
	SM28NW	約 6.3 kg
	SM28NS	約 4.8 kg
	SM28NSS	約 4.5 kg

## お手入れの方法

※ 業務用の洗浄・ガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。

## 【カバーのお手入れ】

- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
- 液温60℃を限度として洗濯機で洗浄することができます。洗濯機での洗浄は必ずマットレスに取り付けてありますタグに従ってください。
- 洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。タンブル乾燥温度は80℃以下にしてください。
- 繊維を被覆するような汚れや糊剤が付着すると、正常な制菌効果が得られないことがあります。
- 仕上げ糊剤（柔軟材含む）を使用すると、制菌効果が阻害されることがあります。洗濯後のすすぎは十分に行ってください。

## 【丸洗い洗浄】

- 丸洗いの場合、カバーはしたまま、液温は80℃以下にし、中で踊らないように必ずマットレスを固定してください。乾燥温度は、マットレスの表面温度が80℃以下になるようにしてください。