

# フランスベッド

## 取扱説明書 ちょこっトレイ

854620-8900

### まえがき





このたびはフランスベッドの製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を安全にご使用いただくための、注意事項と使用方法を記載しています。

### 安全のために必ずお守りください

- 安全のため、必ずこの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してから使用してください。
- 取扱説明書を読んだ後は、いつでも必要なときに取り出せるように、ベッド本体の取扱説明書と一緒しよに、所定の場所に保管してください。


### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくため、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。



 <b>警告</b>	記載されている内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
 <b>注意</b>	記載されている内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れのあることを示します。
	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。(～してはいけません。)
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。(～なさい。)

### 警告

#### 設置上の注意




	トレイの取り付け方は必ず、取付方法に従ってください。 誤った取り付けを行うとケガや破損の恐れがあります。
---	---

#### 使用上の注意

	トレイの耐荷重は3 kg です。 耐荷重以上のものを置くと破損の恐れがあります。
	手をついたり、トレイを掴んで立ち上がりなどを行わないでください。 トレイが外れ、転倒の恐れがあります。


### 注意

#### 使用上の注意

	バランスの悪いものや液体などはトレイの上に置かないでください。 ケガや破損の恐れがあります。
	樹脂などの材質の部分に取り付けしないでください。 取り付け部分が破損する恐れがあります。
	形状の安定しない部分（丸や楕円）に取り付けしないでください。 外れて破損する恐れがあります。


### 製品仕様

重量	1.3 kg
材質	本体：鉄 天板：無垢材
仕上げ	本体：粉体塗装 天板：クリア塗装
耐荷重	3 kg
寸法	A：245 mm × B：165 mm 溝深さ：2.5 mm

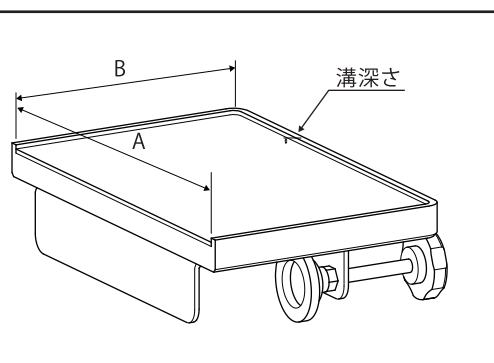


## 取付方法


1. 固定位置を決め、対象物上面を本体金具の底面に当て、アジャスターを広げてください。

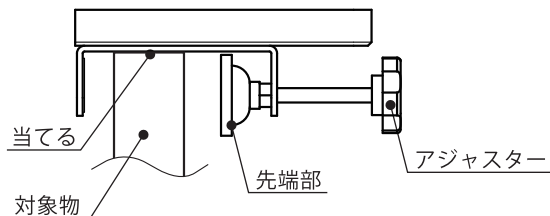

2. アジャスターを回して固定してください。

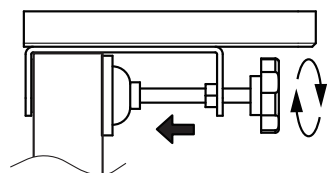

※指定の型式、場所に取り付けてください。

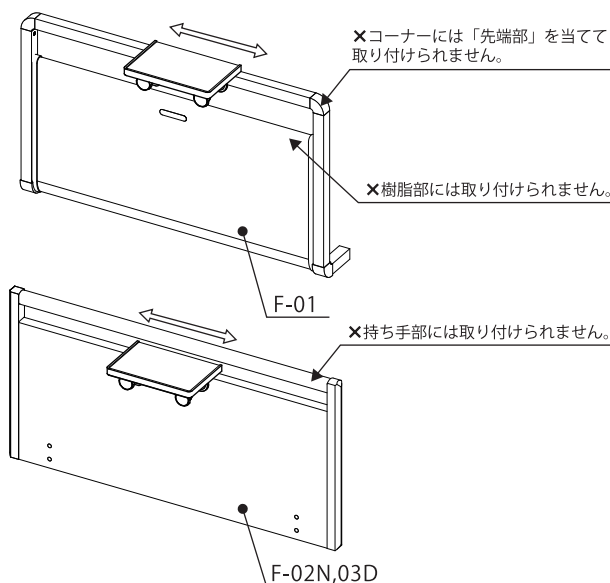

	可動部、または可動部付近に取り付けしないでください。 ケガや破損の恐れがあります。
	アジャスターを締め付けすぎないでください。 取り付け部分が破損する恐れがあります。

## アフターサービスについて

### ■ 修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、販売店または弊社お客様相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

### ■ お客様相談室

弊社の商品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら、販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

## お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。弊社製品は厳格な検査を経て納入いたしておりますが、万一不具合な点がございましたらお買い上げの販売店または弊社相談室にお問い合わせください。



0120-39-2824

フリーダイヤル：月～金 9時～12時、13時～17時  
土、日、祝祭日、年末、年始等は除く