

どこでも手すり用ブラケット


# テスリフィット

取扱説明書

910610-8900

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。

本製品は、「どこでも手すり」をベッドで使用する際の安定性を向上させる製品です。  
本製品は、「どこでも手すり」に対応しています。「どこでも手すり上がりかまち用FB-F21N」には対応していません。  
フランスベッドの製品以外の他社製の手すりには対応していません。

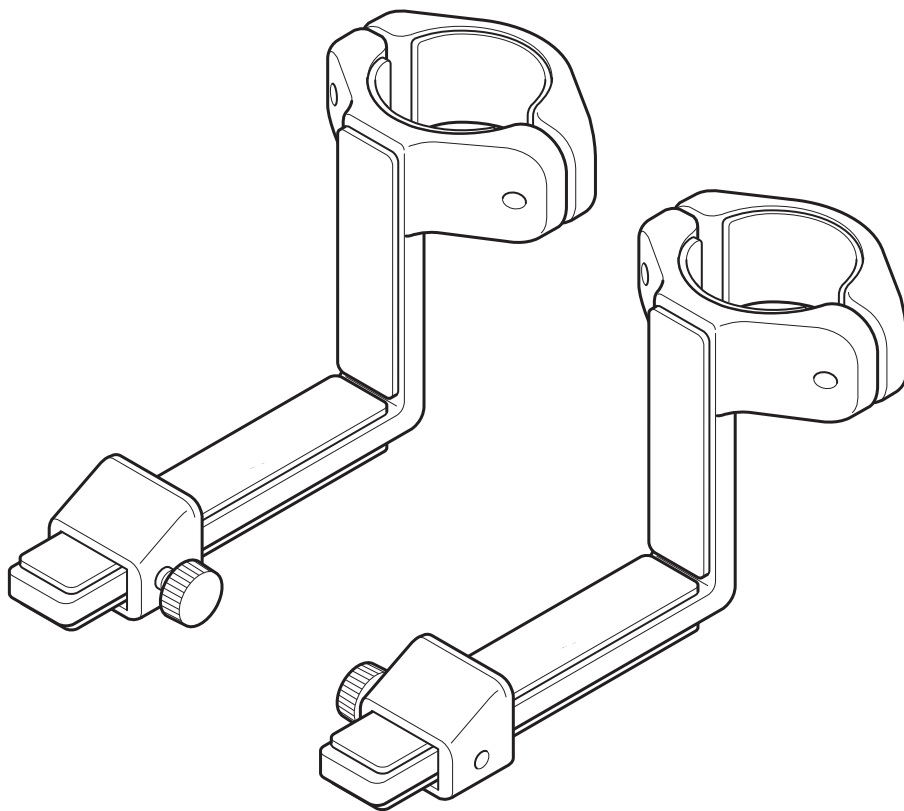

- 安全のため、必ずこの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してから使用してください。
- 取扱説明書を読んだ後は、いつでも必要なときに取り出せるように、所定の場所に保管してください。

# 安全上のご注意

## 安全のために必ずお守りください

この取扱説明書では、製品を安全に正しく使用していただき、利用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記のように警告・注意を記載しています。内容をよく理解したうえで、本文をお読みください。

### ● 表示の意味



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### ● 記号の意味



この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(～しないでください)



この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。  
(～してください)

# 使用上のご注意

## 警告



- 「どこでも手すり」の安定性向上以外の目的で使用しないでください。  
本製品は「どこでも手すり」をベッドで使用する際の安定性を向上させる製品です。それ以外の目的で使用すると、事故やケガの原因になります。
- 昇降機能のある電動ベッドでは使用しないでください(一部の電動介護ベッドでは使用可能です。対応の型式については『お買上の販売店』、または『弊社営業所』にお問い合わせください。  
本製品が外れて、ケガの原因になります。
- テスリフィットを持って持ち運びしないでください。  
本製品が外れて、ケガの原因になります。



- 水平方向の力を加えると、「どこでも手すり」が移動する可能性があるため注意してください。  
本製品は「どこでも手すり」の安定性を向上させるものであり、固定するものではありません。水平方向の力を加えると、「どこでも手すり」が移動し、隙間ができる可能性があるため注意してください。
- 使用する際にベッドが浮いたり、動かないことを確認してください。

## 注意





- 足をかけたり、踏み台として使用しないでください。
- 体重が100kg以上の方は使用しないでください。  
本製品が変形・破損して不安定になり、転倒、ケガの原因になります。





- ツマミ部分が突起しているため、衣服などを引っかかないように注意してください。
- ベッドを移動する際は、テスリフィットを外してから移動してください。
- 本製品に異常を見つけた場合は、使用を中止してください。  
正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# 設置上のご注意


## 警告



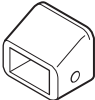
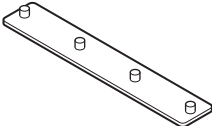
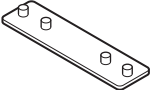
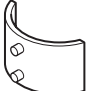




	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品を他社製品と組み合わせないでください。 破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた場合の安全は保証できません。</li><li>●改造・加工は絶対に行わないでください。 事故の原因になります。</li><li>●強度のないベッドやベッド下に収納が付属しているベッドには使用しないでください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●設置後、ガタつき、ボルトやツマミの緩み、締め忘れがないことを必ず確認してください。</li><li>●必ず左右セットで使用してください。</li><li>●テスリフィットとベッドサイドフレームには隙間がないように設置してください。隙間ができる場合は緩衝材などを入れてください。 挟まりによるケガの原因になります。</li></ul>

## 注意

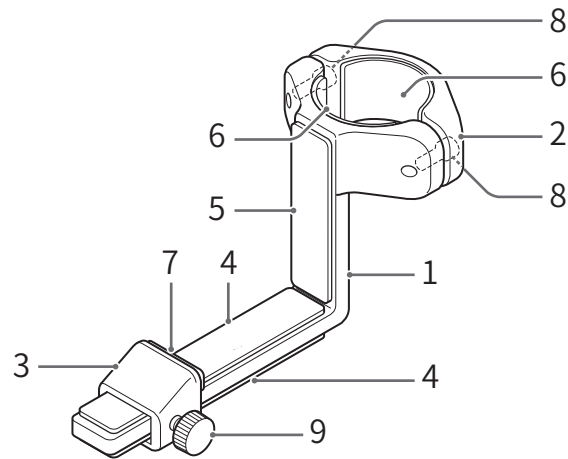	<ul style="list-style-type: none"><li>●屋外や直射日光の当たる場所では使用しないでください。 金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。</li><li>●火のそばでは使用しないでください。 金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。</li><li>●水やお湯に濡れる場所では使用しないでください。 本製品が変質、破損するおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●組み立ては納入業者が行ってください。</li><li>●一般家庭の室内で使用してください。</li><li>●製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管してください。 高温多湿の場所で保管すると、変形、結合部の外れの原因になります。</li><li>●定期的にガタつき、ボルトやツマミの緩み、締め忘れ、部品の破損がないことを確認してください。</li></ul>
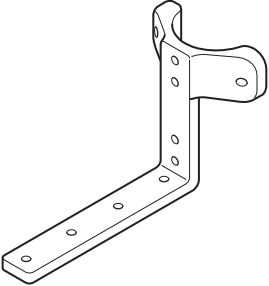
# 構成部品の一覧




番号	部品名	数量	部品図
1	ジョイントアーム	2	
2	ジョイント	2	
3	ストッパー	2	
4	ゴムA	4	
5	ゴムB	2	
6	ゴムC	4	
7	ゴムD	2	
8	六角穴付ボルト	4	
9	ツマミ	2	
10	六角レンチ	1	


# 組み立て方法

## 組み立てる前の準備


- 組み立ては納入業者が行ってください。
- 床面からベッドサイドフレームの下端までの高さが30～320mmのベッドに取り付け可能です。

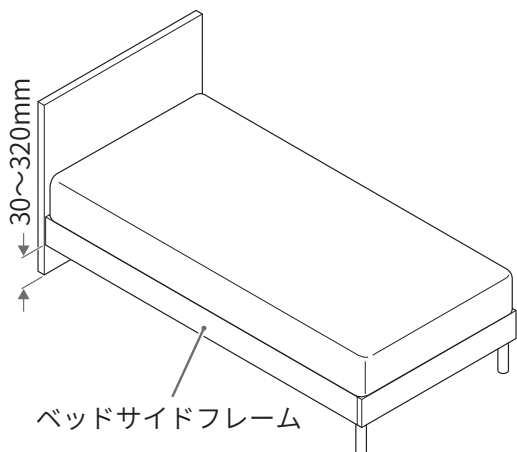

- ベッドサイドフレームの幅が9cm以上あるベッドには取り付けられません。

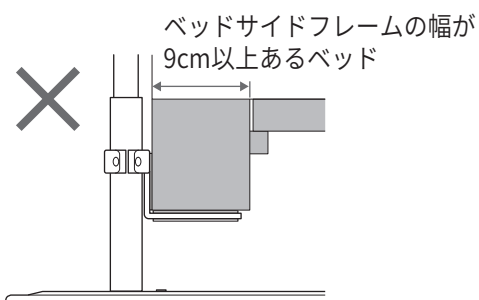


- ベッドサイドフレーム下側にストッパーを取り付けられる空間がない場合は、ストッパーを取り付けずにジョイントアームだけを差し込んでください。その場合、安定性は低下しますが、テスリフィットを使用しない場合に比べると、「どこでも手すり」のぐらつきの軽減や「どこでも手すり」の転倒防止といった効果を得ることができます。

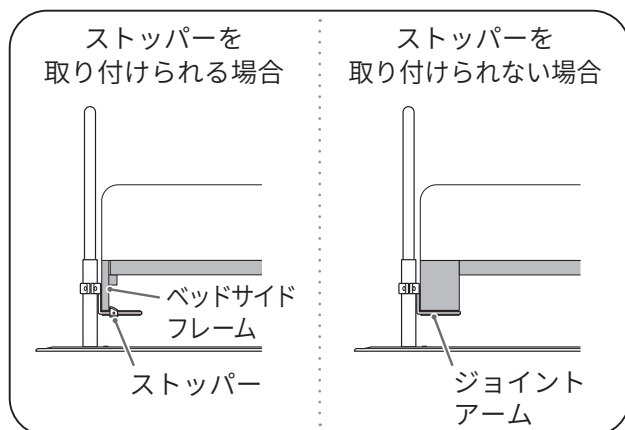

## 床面からベッドサイドフレーム下端までの高さを測る

床面からベッドサイドフレーム下端までの高さ寸法(a)によって、組み立て方法が異なります。はじめに床面からベッドサイドフレーム下端までの高さを測ってください。

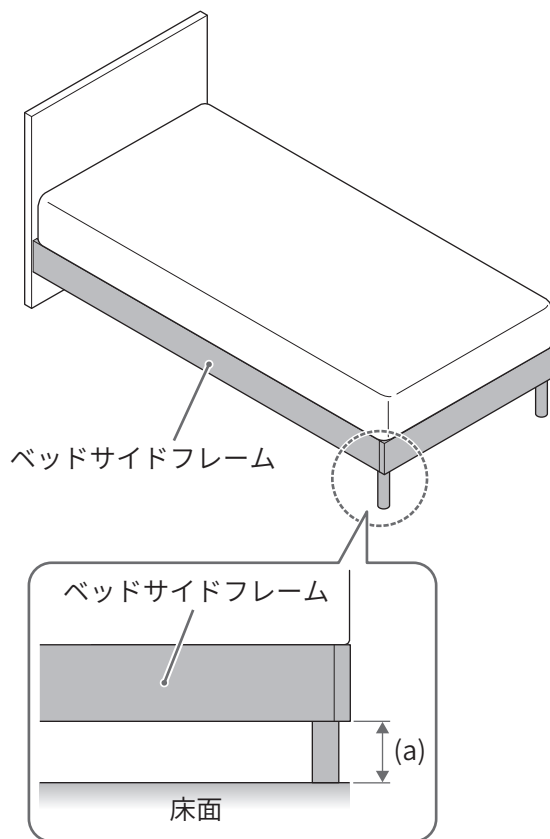

床面からベッドサイドフレーム下端までの高さによって、テスリフィットの取り付けかたが以下のように異なります。

床面からの高さ	組み立てた状態
30～180mm	
180～320mm	


# 組み立て方法

本製品は、「どこでも手すり」に対応しています。  
「どこでも手すり上がりかまち用FB-F21N」には対応していません。フランスベッドの製品以外の他社製の手すりには対応していません。

ベッドに取り付ける(床面からベッドサイドフレーム下端までの高さが30~180mmの場合)

## テスリフィットを仮固定する


1. ジョイントアームにストッパーを取り付けて、ツマミを軽く締める。

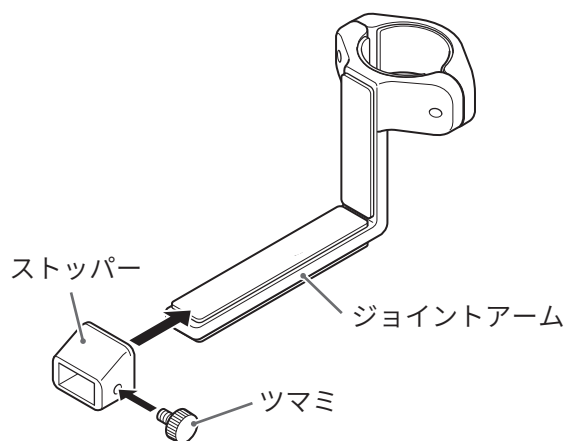

- 両方のツマミが内側を向くように取り付けてください(手順3の図を参照)。
- ベッドサイドフレーム下端にストッパーを取り付ける空間がない場合は、ストッパーを取り付けしないでください。


2. テスリフィットからジョイントを外す。

付属の六角レンチを使って六角穴付ボルトを緩め、ジョイントを外してください。

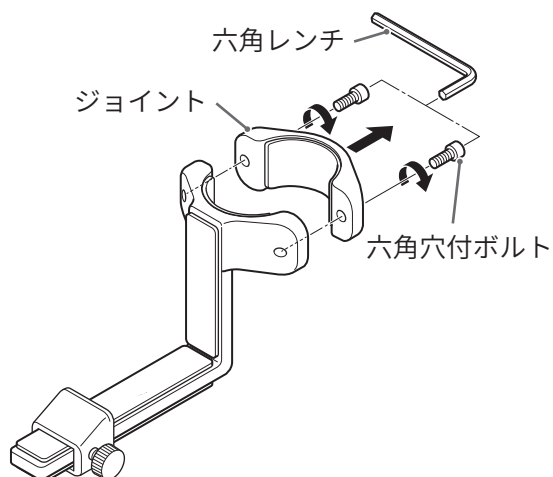

3. ジョイントアームとジョイントで「どこでも手すり」のホルダーパイプをはさみ込み、テスリフィットを仮固定する。

付属の六角レンチを使って六角穴付ボルトを軽く締め、ジョイントアームとジョイントを取り付けてください。

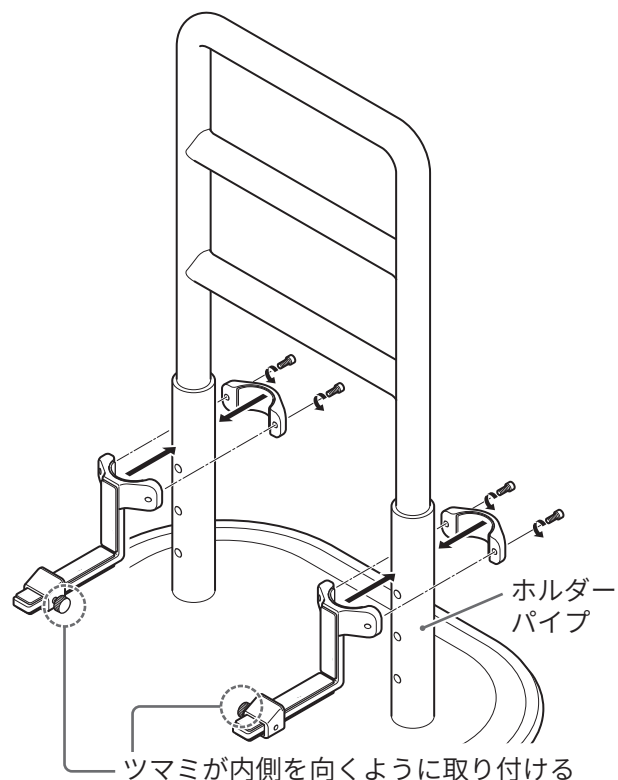


- ジョイントアームは「どこでも手すり」の内側に向けて取り付け、左右対称になるようにしてください。
- ゴムA、ゴムB、ゴムC、ゴムD が外れていないことを確認してください。

# 組み立て方法



## テスリフィットを設置する

- ストッパーを取り付けられない場合は、手順3をスキップしてください。

### 1. ベッドサイドフレームの下にテスリフィットを取り付けた「どこでも手すり」を差し込む。

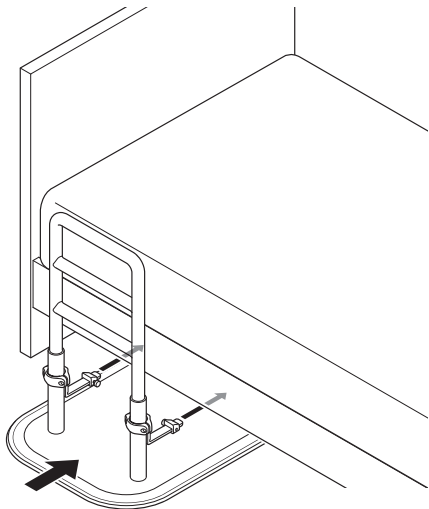


### 2. ジョイントアームの高さを調整して固定する。 ジョイントアームがベッドサイドフレーム下端に当たるまで確実に引き上げて位置決めをします。そのあと、付属の六角レンチを使って六角穴付ボルトを締め、ジョイントアームを固定してください。

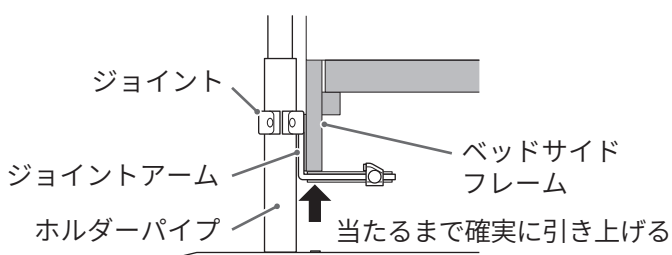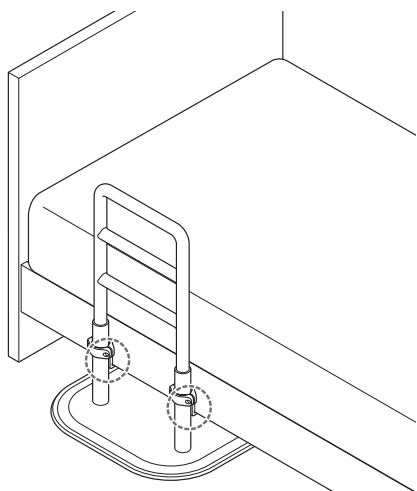

- 左右の六角穴付ボルトを交互に締めるようにして固定してください。片側を先に締めると、もう片側のボルトが締まりにくくなります。
- 締め付けが緩いとテスリフィットが外れることがあります。しっかりと締め付けてください。
- 六角穴付ボルトを締めたあと、ジョイントアームとジョイントの間に1mm程度の間隔ができますが問題はありません。
- ベッドサイドフレームとジョイントアームの間に隙間を空けないようにしてください。

### 3. ベッドサイドフレームの幅に合わせて、ストッパーを固定する。

ストッパーがベッドサイドフレームに当たるまで押し付け、ツマミを締めて固定してください。

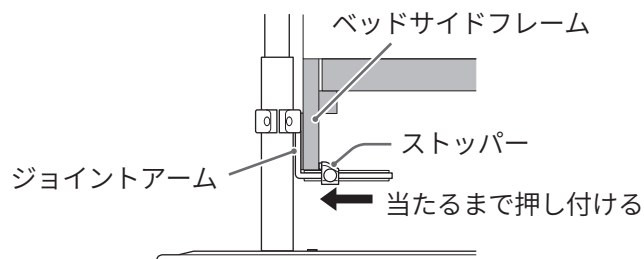

- ベッドサイドフレームとストッパーの間に隙間を空けないようにしてください。
- 締め付けが緩いとテスリフィットがずれることがあります。しっかりと締め付けてください。


### 4. ガタつき、ボルトとツマミの緩みがないことを確認する。

# 組み立て方法

ベッドに取り付ける(床面からベッドサイドフレーム下端までの高さが180~320mmの場合)

## テスリフィットを仮固定する


1. ジョイントアームにストッパーを取り付けて、ツマミを軽く締める。

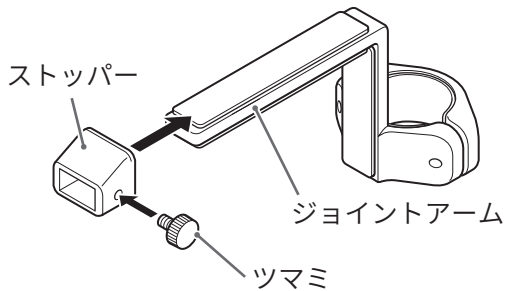

- 両方のツマミが内側を向くように取り付けてください(手順3の図を参照)。
- ベッドサイドフレーム下端にストッパーを取り付ける空間がない場合は、ストッパーを取り付けしないでください。


2. テスリフィットからジョイントを外す。

付属の六角レンチを使って六角穴付ボルトを緩め、ジョイントを外してください。

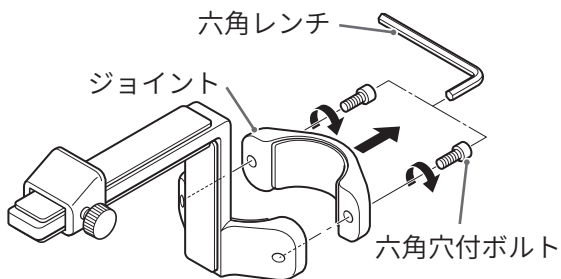

3. ジョイントアームとジョイントで「どこでも手すり」のホルダーパイプをはさみ込み、テスリフィットを仮固定する。

付属の六角レンチを使って六角穴付ボルトを軽く締め、ジョイントアームとジョイントを取り付けてください。

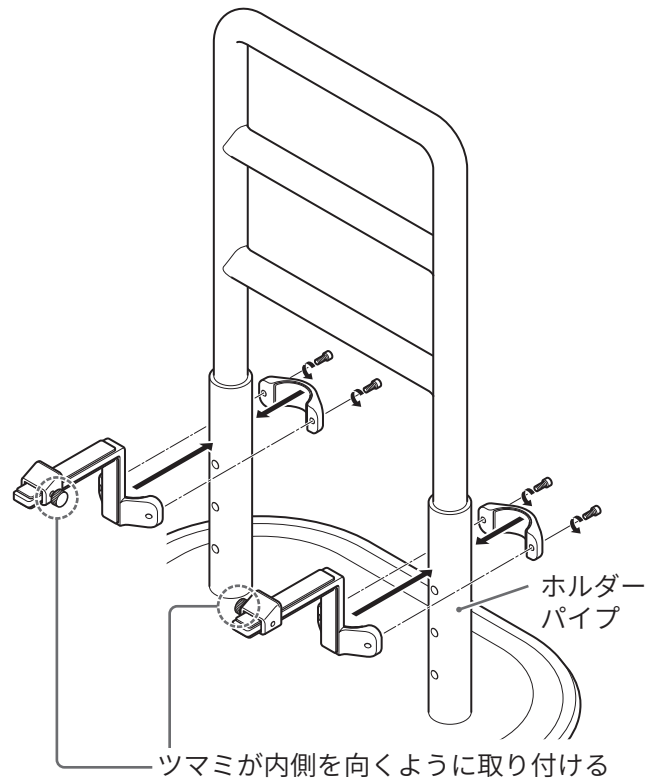

- ジョイントアームは「どこでも手すり」の内側に向けて取り付け、左右対称になるようにしてください。




# 組み立て方法

## テスリフィットを設置する



- ストッパーを取り付けられない場合は、手順3をスキップしてください。

### 1. ベッドサイドフレームの下にテスリフィットを取り付けた「どこでも手すり」を差し込む。

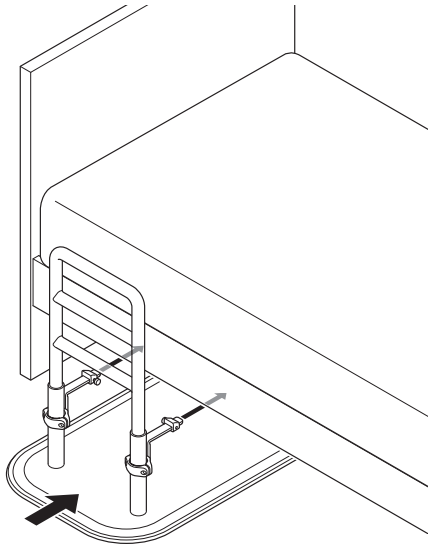

### 2. ジョイントアームの高さを調整して固定する。


ジョイントアームがベッドサイドフレーム下端に当たるまで確実に引き上げて位置決めをします。そのあと、付属の六角レンチを使って六角穴付ボルトを締め、ジョイントアームを固定してください。

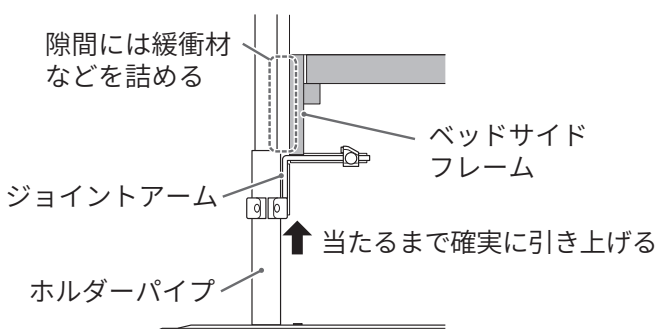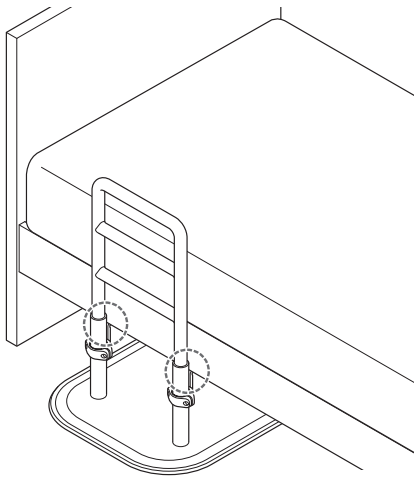

- 左右の六角穴付ボルトを交互に締めるようにして固定してください。片側を先に締めると、もう片側のボルトが締まりにくくなります。
- 締め付けが緩いとテスリフィットが外れることがあります。しっかりと締め付けてください。
- 六角穴付ボルトを締めたあと、ジョイントアームとジョイントの間に1mm程度の間隔ができますが問題はありません。
- ベッドサイドフレーム下端がジョイントアーム上端のゴムAに接触するように設置してください。
- ベッドサイドフレームにホルダーパイプを接触させないでください。

### 3. ベッドサイドフレームの幅に合わせて、ストッパーを固定する。

ストッパーがベッドサイドフレームに当たるまで押し付け、ツマミを締めて固定してください。

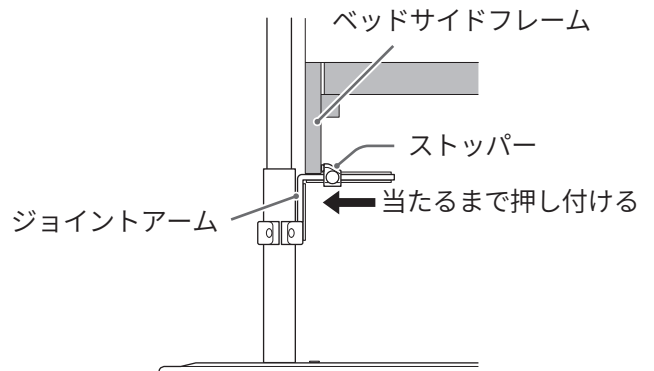

- ベッドサイドフレームとストッパーの間に隙間を空けないようにしてください。
- 締め付けが緩いとテスリフィットがずれることがあります。しっかりと締め付けてください。

### 4. ガタつき、ボルトとツマミの緩みがないことを確認する。

## テスリフィットを取り外す

取り外すときは、以下の手順で取り外してください。

1. ストッパーのボルトを緩めて、ストッパーを奥に動かす。
2. 六角穴付ボルトを緩めて、ジョイントアームを下げる。
3. 六角穴付ボルトを緩め、ジョイントを外してテスリフィットを取り外す。

# 使用上のご注意

## 使用時のご注意

以下の使用方法を守らないと、けがをするおそれがあります。

- 水平方向に力を加えないでください。
- 濡れている手や足で使用しないでください。
- 手すり以外の目的で使用しないでください。
- 柔らかい床、でこぼこ、段差、傾斜がある床では使用しないでください。
- テスリフィットは指定製品以外と組み合わせて使用しないでください。

## 保守・点検

長期にわたり本製品の本来の性能を維持するには、日頃の点検などの適切な管理が必要となります。使用するにつれてその時間の経過とともに部品の劣化や摩耗が進みます。

点検を行うことにより、大きなトラブルを防止し、安心して使用することができます。

外観点検項目：目視あるいは手で外観の傷や変形などを確認する点検です。

1. ボルトやツマミの緩みや外れ
2. 部品の変形や破損

使用中に不具合を発見されたときには、使用を中断し、速やかに販売店またはお客様相談室に故障状況を報告し、修理を依頼してください。

安易にご自身による故障の修理などは絶対に行わないでください。

使用前には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態で使用してください。

※修理は必ず販売店へ依頼してください。

### ● 各調節部分が固定されていることの確認

各調節部分をチェックし、確実に固定されていることを確認してください。

### ● 消耗品、交換部品の確認

それぞれの部品が交換時期になったときは、お早めに交換してください。

新しい部品に交換する際は、お買い上げの販売店へ連絡ください。

## お手入れ

日常の汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤で汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で拭いてください。

### ⚠ 注意



汚れを拭き取るのに、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤を含んだもの、および研磨剤、漂白剤などは使用しないでください。市販のクリーナーを使用するときは、一度目立たない所で試してから使用してください。変色、変質、商品を傷める原因となります。

## 困ったときには

### アフターサービス

#### ● 保証書および保証期間について

保証書：所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼される場合：保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間を過ぎて修理を依頼する場合：修理すれば使用できる場合は、希望により有料で修理いたします。

#### ● 修理を依頼されるときは

修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ、なお異常がある場合には『お買い上げの販売店』、または『弊社営業所』までご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- ・ ご住所、ご施設名、ご氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）


#### ● お客様相談室

弊社の商品は厳格な検査を経て納入いたしておりますが、万一不具合な点がございましたら、販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

固定電話からはフリーダイヤル

 0120-08-3413

携帯・スマホからはナビダイヤル

 0570-666-996

受付時間：月～金曜日

9時～12時、13時～17時

※土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く



フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5

## 仕様

### 製品の仕様

単位：mm

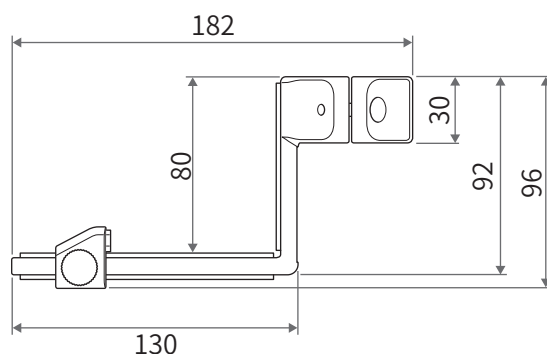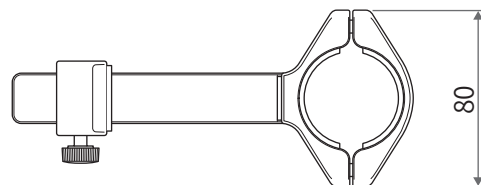

サイズ	96×80×182 mm
材質	ジョイントアーム、ジョイント、 ストッパー：アルミ合金 ゴムA、ゴムB、ゴムC、ゴムD：EPDM 六角穴付ボルト：スチール ツマミ：樹脂、スチール 六角レンチ：スチール
使用者体重	100kg
重量	270g

# 保証書

## ◇◇◇ 保証書 ◇◇◇

この製品は、厳重なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で製造上の不備により故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受け付け致します。  
※ 修理はお買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。  
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

### フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5 TEL 042(543)3111(代表)

型 式	テスリフィット		
保証期間	お買い上げ日	年 月 日	から1年間
お 客 様	ご住所 〒 _____		
	ご氏名 _____	様	電話番号 _____

販 売 店	修理の記録
-------	-------

## ◇◇◇ 保証規定 ◇◇◇

- 保証期間内に正常なる使用状態において製造上の不備により故障した場合には、無償修理致します。お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させていただきますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。  
(イ) 使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。  
(ニ) 本保証書のご提示がない場合。  
(ホ) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。  
(ヘ) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。  
(ト) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けることがあります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 法的責任：この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合わせ下さい。
- 保証の対象：本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
- 免責：本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。

# フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5