

らくらくゴックン (スープ・お茶用) 水量調節器



〈材質〉本体:ポリカーボネイト スプリング:SUS304
〈耐熱〉

120℃

製造元



齊藤工業株式会社

新潟県燕市小関字野中1156-1 TEL0256-62-2627 (代)

らくらくゴックンのスープ・お茶用に取付けて使用します。
今まで指でノズルゴムをつまんで水量を調節していましたが、片手で簡単に水量調節を行うことができます。
水量調節器をつけたらくらくゴックンは倒れてもこぼれませんので安心してお使いいただけます。

(実用新案特許) (アメリカ特許)




牛乳、ジュース、お茶などサラッとした、水ものに御使用下さい。

水量調節器の取り付け方


★各部名称

①フック


②突起部

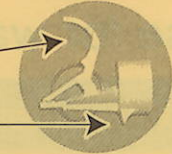


①フックの部分に親指をかけ、突起部に人指し指を引っ掛けます。

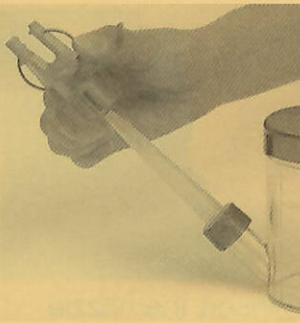

②洗濯ばさみを使う要領で親指でフックを下方に向いて押し、水量調節器の先端部を広げます。

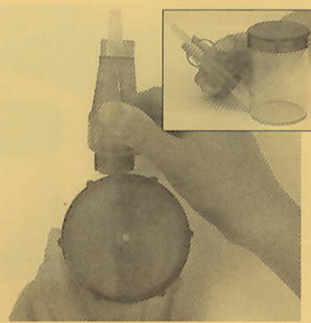

③先端部を広げたまま、ノズルゴムに通す様に差し込みます。

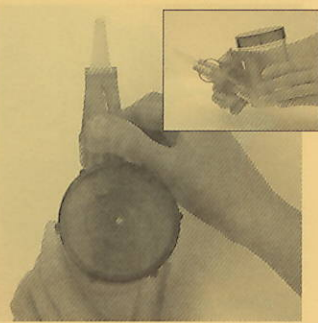

④ノズルキャップに水量調節器をかぶせて取り付けます。
この時奥まで(「カチッ」と音がするまで)差し込みます。


※外す時も取り付け時と同様にフックに親指、突起部に人指し指を引っ掛けた状態で先端部を広げ、取り外してください。

★ワンポイントアドバイス

ノズルキャップの突起と水量調節器のみぞを合わせることで30度ずつフックの位置を変えることができます。使いやすい位置に合わせてお使いください。

◇使用方法

- ①ノズルゴムの先端を相手にくわえさせます。
- ②ノズルゴムをくわえさせたまま、水量調節器のフックに中指(もしくは人指し指)をかけて、らくらくゴックンを持ちます。(右図参照)
- ③くわえさせたまま、声かけしてフックを少しずつ引き、水量を少しずつ出していくようにしてお使いください。
注意!! (フックを初めから強くひかないでください。一度にたくさんの水量が出てむせる原因になります。必ず少しずつフックを引くようにしてください)
- ④一回、一回ノズルゴムを口から離さず、くわえさせたまま使うのがコツです。はじめは水量を少しずつ調整できるようコップなどで練習してからお使いください。

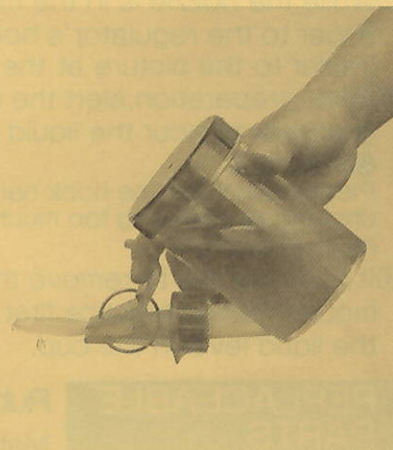

取換え部品

(別売)ノズルゴム(W)

材質:シリコンゴム

耐熱温度:150℃