



GASTROCK®

- STÖCKE SEIT 1868 -

MADE IN GERMANY



リハテック
Reha tech

フランスベッド

ガストロック社製 木製杖 (プレミアムシリーズ)

取扱説明書


- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 安全のため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せるように、大切に保管して下さい。

1. 杖は、負傷していない側でご使用下さい。

2. 腕をリラックスした状態に垂らし真っ直ぐに立ちます。

杖の先を同側の足先の前方 20cm におき、肘は 30～40 度屈曲した位置がよく、この状態で杖の長さを決めて下さい。

(右図をご参照下さい)

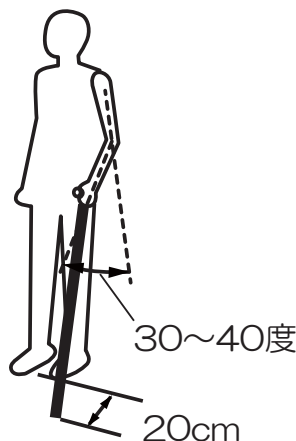

3. 荷重を杖と垂直に掛けるように、グリップは真中辺りを握って下さい。

(左図をご参照下さい)



ご使用前に


棒状杖は、杖無しで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次のような場合の使用には適しません(体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることがあるため)。また、購入時はそうではなくても次のような状態になった場合、すぐに使用を停止して下さい。

- ① 杖無しでは歩行できない人(手すりに伝わらなければ歩行できない人、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない人の使用を含む)
- ② リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない人(医師などの指導のもとでの使用は除く)

● 杖先ゴムの交換について

杖先ゴムを交換する場合、無理に引き抜こうとすると杖が破損する恐れがあります。

図のように杖先ゴムを靴で押さえ、杖の支柱を持って上に引っ張り上げて抜いて下さい。

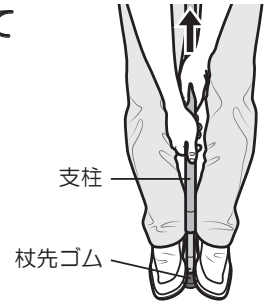

4. 最適なサポートのため、身長に合った正しい杖の長さでご使用下さい。
正しい杖の長さの決め方は下記の通りです。
・杖の長さは、身長÷2+3 が目安となります。
例) 156cm÷2+3=81cm

杖のお手入れ

- ◎ 汚れをふき取るときは、柔らかい布をご使用下さい。
- ◎ 杖の落下を避けるため、ストラップや杖ホルダーの使用をお勧めします。
- ◎ 先ゴムは消耗品です。定期的に交換して下さい。
- ◎ 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いて下さい。
- ◎ お子様の手が届かない所に保管して下さい。

ご使用上の注意

- ◎ 身体に合った杖をお選び下さい。
- ◎ ご使用前に各部を点検して下さい。杖先ゴムが摩耗したり、劣化して外れやすくなったりした場合は早めに交換して下さい。
- ◎ 濡れた路面や凍った路面は滑りやすいので、ご注意下さい。
- ◎ この製品を用途以外(登山・護身用など)の目的には使用しないで下さい。
- ◎ 道路の側溝や凹みのある個所では、杖先がはまり込む恐れがあります。十分にご注意下さい。

アフターサービス

- 修理を依頼されるときは・・・修理を依頼される前にこの取り扱い説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は、『お買い上げの販売店』または下記『お客様相談室』へご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容・・・ご住所・ご氏名・電話番号・型式名・お買い上げの販売店・お買い上げ日故障または異常の内容（できるだけ詳しくお願いいたします。）
- お客様相談室・・・弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合点がございましたら、『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』までお問い合わせください。

フリーダイヤル ☎ 0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時
（土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く）

販売元 フランスベッド株式会社

保証書

この製品は、厳格なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受け付け致します。
※ 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111(代表)

型 式	ガストロック社製 木製杖（プレミアムシリーズ）			販売店
保証期間	お買い上げ日	年 月 日	から1年間	
お 客 様	ご住所 〒			

	ご氏名		様	
	電話番号			

◇◇◇ 保証規定 ◇◇◇

- 保証期間内に正常なる使用状態において万一故障した場合には、無償修理致します。
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させて頂きましますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
- (イ) 使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。
(ニ) 電源を使用する製品においては、指定電源（日本国内仕様）AC100V 50/60Hz以外での使用や異常電圧による故障及び損傷。
(ホ) 本保証書のご提示がない場合。
(ヘ) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
(ト) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
(チ) 消耗部品の取替え及び点検等の費用。
(リ) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿った訪問に要する実費を申し受けることがあります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
法的責任
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合わせ下さい。
保証の対象
本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
- 免責
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承ください。
- 修理の記録