

ケアスロープK専用斜め上がり框補正台 CS-K

取扱説明書

この度は、ケアスロープK専用斜め上がり框補正台（CS-K）をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。




本製品を正しくご利用いただくために、ご使用になる前に本説明書を必ずお読みください。

※「取扱説明書」は大切に保管して下さい。





使用上の注意事項


ご使用いただく前に必ずお読みください。 ※以下、ケアスロープK専用斜め上がり框補正台をCS-Kと表記

| 警告マーク | 警告マークの意味 | |
|--|----------|---|
|  禁 止 | 禁 止 | 禁止の行為であることをあらわします。 |
|  警 告 | 警 告 | この表示は、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注 意 | 注 意 | この表示は、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |


保管上の注意事項

| | |
|---|--|
|  禁 止 | <ul style="list-style-type: none"> ● CS-Kが倒れないように保管してください。倒れると破損やケガの原因となります。 |
|  警 告 | <ul style="list-style-type: none"> ● 必ず平坦な場所を選び、四脚が地面に接するように保管してください。 ● CS-Kが濡れた場合は、サビの原因につながるため、必ず雑巾などで拭くなどして乾燥させてください。 ● 定期的に製品の状態を点検し、変形や損傷などの異常があれば、直ちに使用を中止し、修理・交換などの適切な処置をしてください。 |




設置上の注意事項

| | |
|--|---|
|  警 告 | <ul style="list-style-type: none"> ● CS-Kを設置するには事前に設置場所の状態を確認してください。 《砂、雪、氷など》滑りやすい場所や不安定な場所への設置はしないでください。 設置場所が土や芝生、砂利などの場合は硬い板材やコンクリート板などを敷いた上にCS-Kを設置して使用してください。 ● 暗い場所での使用はしないでください。 ● ケアスロープを設置する際、ケアスロープの上端部がしっかりと框台本体のスロープ受け部分にかかっていることを確認してください。 ● フラップは必ず框台本体の溝に差し込むように設置してください。 |
|--|---|

介助者の注意事項

| | |
|--|---|
|  警 告 | <ul style="list-style-type: none"> ● ケアスロープKを歩行する際には、滑りにくく安定した履物を使用してください。 (禁止の履物：ピンヒール、ハイヒール、ゲタなど) ● ケアスロープKを上る時は、車いすを前輪からゆっくりとまっすぐに進入させ、スロープがズレないように周囲を確認しながら上ってください。 ● ケアスロープKを下りる時は、必ず介助者が後ろ向きになり、車いすを支える様にして後輪からゆっくりとまっすぐに進入し、スロープがズレないように周囲を確認しながら下りてください。 ● 車いすを支えやすくするため、必ず車いすより下端側の位置で支えてください。 |
|--|---|

使用上の注意事項

| | |
|---|--|
|  禁 止 | <ul style="list-style-type: none"> ● CS-Kのアジャスターで高さを調整する際、フラップを差し込む側の高さが18cm～30cmの範囲内になるように調整してください。 ● アジャスターを伸ばしきった状態で使用すると、アジャスターが框台本体から外れる可能性があります。 ● CS-Kを使用後は、それぞれ片付けて屋内に保管をしてください。常時設置は出来ません。必ず都度設置のうえご使用ください。 ● 本製品に過度な衝撃を加えたり間違った使用をしないでください。破損や事故に繋がる恐れがあります。 |
|  警 告 | <ul style="list-style-type: none"> ● CS-Kを使用する際には、操作ミスや思わぬトラブルを防止するため、必ず介助者が付き添って使用してください。 ● 製品を改造したものについては、責任を負いかねます。 ● 安全にお使いいただくため、使用する前に必ず各部を点検して使用してください。万一破損や異常を発見した場合や走行面・接地面のすべり止めの摩耗などがある時は、使用を中止し、販売店へ連絡してください。 (詳しくは、8ページの点検シートを参照してください。) ● この製品は手動車いす、電動車いす(ただしハンドル形電動車いすは除く)用です。これらの車いすの移動目的以外には使用しないでください。 例えば、台車による荷物の運搬などには使用しないでください。 ● CS-Kにケアスロープをセットした状態(ケアスロープK)での最大耐荷重は300kgです。総重量が300kgを超える場合は使用しないでください。 走行が不安定になったり、ケアスロープ・CS-Kが破損し転落する可能性があります。 ● 進入時にCS-K及びケアスロープがズレないことを確認してください。 ● CS-K及びケアスロープには、ゆっくりとまっすぐに進入してください。 ● CS-K及びケアスロープ上で急停止しないでください。 ● CS-K及びケアスロープ上で飛び跳ねたり、物を落としたり衝撃を与えないでください。 ● CS-Kのフラップにはすべり止めなどを貼っています。剥がれなどが無いことを確認してください。 ● CS-Kのフラップはマットなどずれる恐れがあるモノに設置しないでください。 ● スロープの上端側が框台本体のスロープ受け部分に十分かかっていること、フラップの差し込みが十分できていること、確認設置後にズレ、ガタツキがないことを確認してください。 ● 走行面や接地面に砂、雪などの付着がある場合は、使用する前に取り除いてから使用してください。 ● 砂や雪などがある滑りやすい場所では、CS-Kの直置きでの使用はしないでください。CS-Kを設置する場所がぬかるみやすい環境(土・芝生・砂利など)の場合には、硬い板状の物を下に敷いて使用してください。 また使用前(特に降雨・降雪後)に必ず点検を行い安全な状態で使用してください。 ● 道路(車道・歩道)に、はみ出さないように使用してください。 道路にはみ出して使用すると、歩行者、自転車、自動車などとの思わぬ接触事故が発生する可能性があります。 ● 製品を持ち運ぶ時は、必ず両手で持ってください。また足元に落とさないように気を付けてください。 ● CS-Kにセットしたケアスロープの傾斜角度が急勾配ですと危険です。 使用状況に合わせて最適なケアスロープの長さを選定してください。 ● CS-Kはケアスロープ専用の斜め上がり框補正台です。他のスロープには使用しないでください。 ● 大雨や落雷、強風が吹くなど悪天候時でのスロープの使用・運搬は、思わぬ事故やケガの原因になります。このような状況下での使用はやめてください。 |
|  注 意 | <ul style="list-style-type: none"> ● CS-Kは下記のスロープと組み合わせてご使用ください。下記以外のスロープは使用しないでください。 ケアスロープ：CS-120・CS-150・CS-175・CS-200・CS-240C・CS-285C・CS-255UL・CS-285UL ● CS-Kを運搬するときは、人や物に接触しないように周りを確認しながら、取り扱ってください。 ● 製品の端部が一部鋭角になっていますので、設置やお取り扱いの際はご注意ください。 ● CS-Kは金属製のため、直射日光により熱くなることがあります。ご注意ください。 |

【製品仕様】

| | |
|--------|--|
| 製品名 | ケアスロープK専用斜め上がり框補正台 |
| 品番 | CS-K |
| JANコード | 4958519560002 |
| 重量 | ①框台本体 約4.3kg ②フラップ 約4.2kg |
| サイズ | ①框台本体 幅 約81cm×奥行 約20.5cm 高さ（最低～最高）： 18cm ～ 30cm ②フラップ 幅 約71cm×奥行 約61.5cm |
| 耐荷重 | 300kg ※スロープにセットした状態 |
| 材質 | ①框台本体 アルミ、スチール ②フラップ アルミ |

【ケアスロープK専用 斜め上がり框補正台】




※CS-K単体でのTAISコードの登録はありません。

【①框台本体】



【②フラップ】

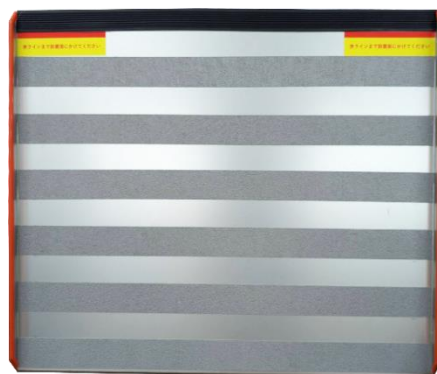

【ケアスロープK 品番一覧】

| 品番 | ケアスロープK専用 斜め上がり框補正台 | 対応スロープ | TAISコード |
|-----------|------------------------|----------|--------------|
| CSK-120 | CS-K | CS-120 | 00093-000068 |
| CSK-150 | | CS-150 | 00093-000069 |
| CSK-175 | | CS-175 | 00093-000070 |
| CSK-200 | | CS-200 | 00093-000071 |
| CSK-240 | | CS-240C | 00093-000072 |
| CSK-285 | | CS-285C | 00093-000073 |
| CSK-255UL | | CS-255UL | 00093-000074 |
| CSK-285UL | | CS-285UL | 00093-000075 |

【CS-Kの設置方法】

1. 設置場所の確認

- ・スロープ、フラップを設置する場所の確認を行います。
(砂、雪、氷、凹凸がない事)
(CS-K適用高さ: 地面より、18cm～30cm)

2. 高さ調整


- ・框台本体のアジャスター4箇所の下側ナットをまわし、
フラップをかけた際、設置面と水平になるようにメジャーもしくは定規で高さを調整します。
調整後、上側ナットを固定します。

※必ず適用高さの範囲内(18cm～30cm)で調整してください。

※上側ナットを固定する際は、スパナ(19mm)を使用してください。

※上側ナットは固定用

※下側ナットは高さ調整用

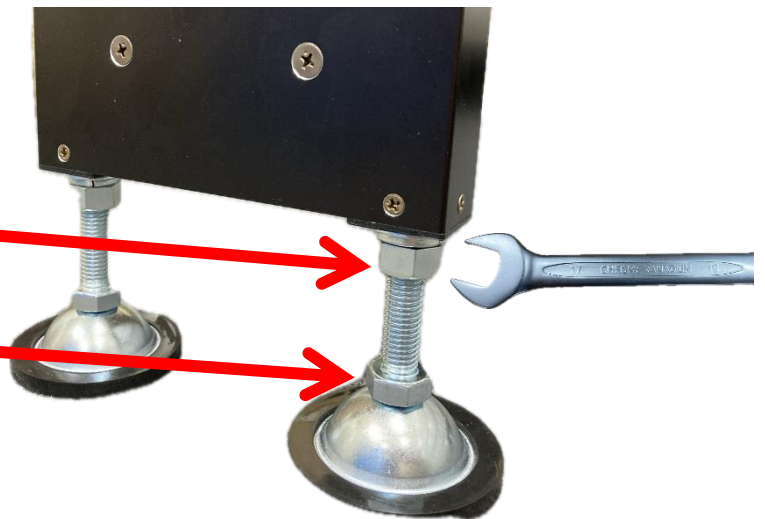

※アジャスター


※フラップ差し込み口側の高さが、フラップ設置面の高さと同水平になるように高さを調整してください。

※フラップ差し込み口


【CS-Kの設置方法】

3. フラップの設置


- ・框台本体の位置を決め、フラップを框台本体の溝にはめ込んだ際、フラップ先端4cm以上（設置シールの赤ライン部分）が必ず設置場所に乗るようにしてください。

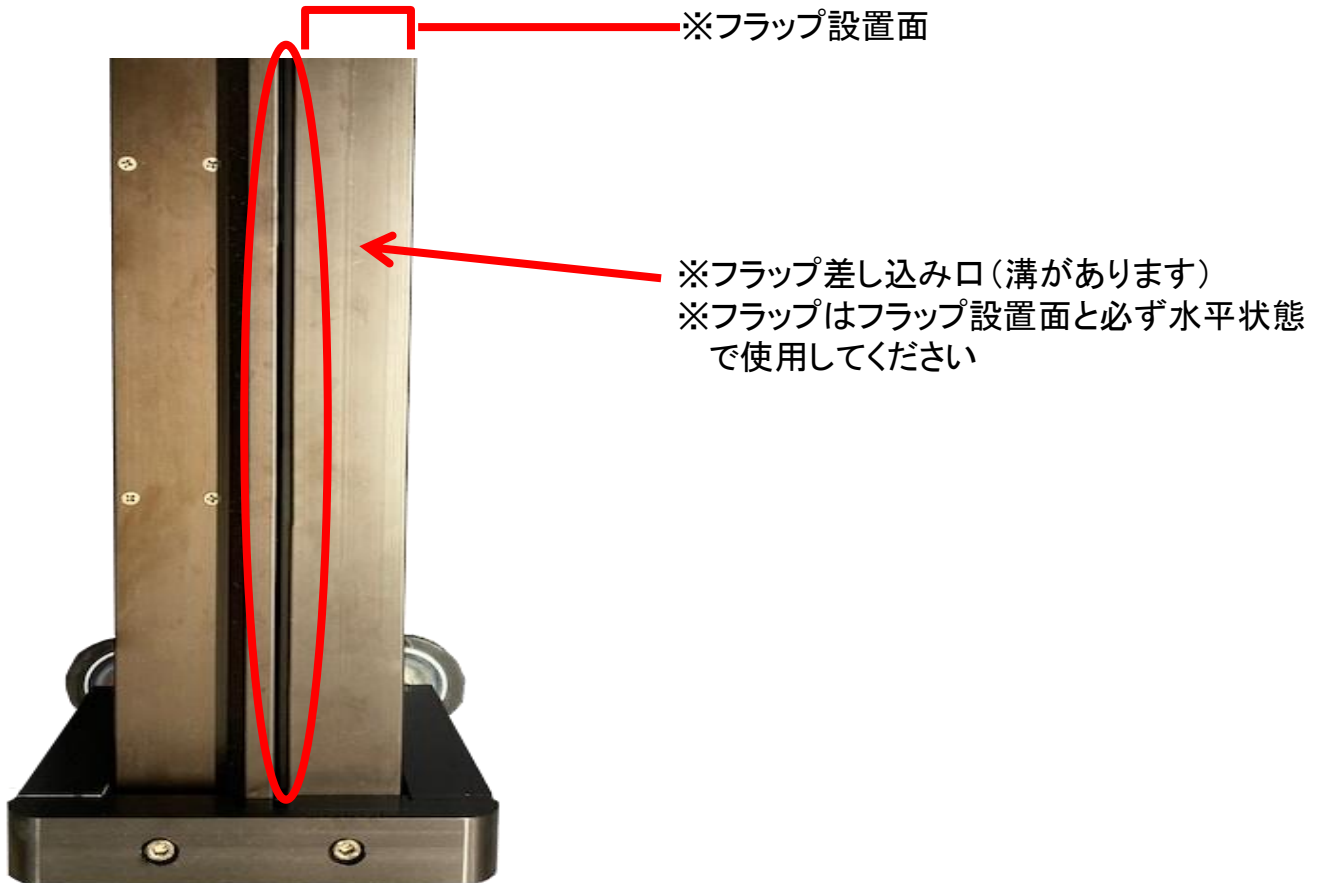

✗ フラップ先端4cm以上（設置シールの赤ライン部分）が、設置場所に
乗っていない。

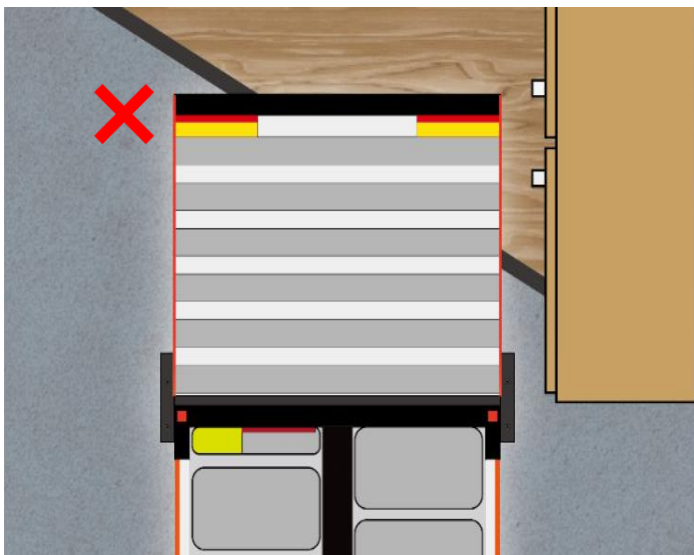


○ フラップ先端4cm以上（設置シールの赤ライン部分）が、設置場所に全
て乗っている。

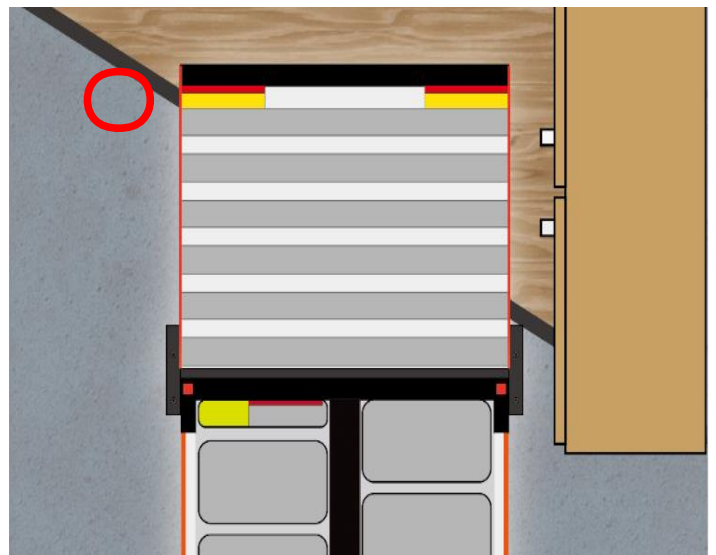

【CS-Kの設置方法】

4. ケアスロープの設置

- ・框台本体とフラップの位置が決まったら高さに適したケアスロープを、框台本体のスロープ受け部分にしっかりかけてください。

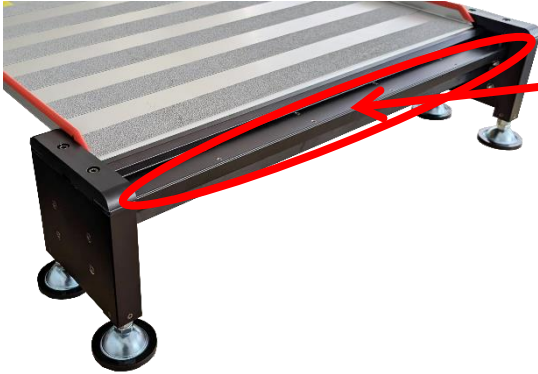

※ケアスロープの設置は上端部の設置ラインに合わせてください



<スロープ受け部分の拡大>



※ビス止めしている側がスロープ受け部分になります。

5. 設置完了

- ・CS-Kとケアスロープにズレ、ガタツキが無いことを確認したうえで使用してください。
- ※ご使用の際は必ず介助者が付き添ってください。

6. 使用後の保管

- ・使用後は、スロープとCS-Kを取り外して屋内に保管をしてください。
設置をしたままにすると思わぬ事故やケガの原因になります
- ・雨風、直射日光の当たらない場所で保管をしてください。
濡れた場合は、乾いた布などで拭いてください。

【点検について】

- ・使用前に点検シートの項目を確認してください。
- ・CS-Kの破損や摩耗などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お求めいただいた販売店にご連絡ください。
- ・分解や改造などはしないでください。事故の原因となります。
- ・定期的に、框台本体のアジャスター部分に油などをさしてください。
(メンテナンス後と、貸出前を推奨)

点検シート

| 点検項目 | 部品写真 | 点検の基準 | チェック欄 |
|------------------|---|---|-------|
| 外観 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・汚れがないこと。 ・油汚れがないこと | |
| 框台本体 |  | <ul style="list-style-type: none"> ・変形、破損がないこと ・ビス、ナット、ワッシャーの紛失、緩みがないこと。 | |
| フラップ |  | <ul style="list-style-type: none"> ・変形、破損がないこと。 ・すべり止めシート剥がれ、表面の汚れ、摩耗がないこと。 ・ラバーグリップ剥がれ、表面の汚れ、摩耗がないこと。 ・設置シール剥がれ、表面の汚れ、摩耗がないこと。 ・エッジモール変形、破損、剥がれがないこと。 | |
| アジャスター |  | <ul style="list-style-type: none"> ・変形、破損がないこと。 <p>※メンテナンス後、貸出前に油などをさしてください。</p> | |
| アジャスター用 ゴムリング |  | <ul style="list-style-type: none"> ・変形、破損がないこと。 | |

MEMO

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を受けて、お届けしたものです。

お客様が取扱説明書・本体添付シールなどの注意書きに従った使用条件で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。

保証の有効期限は、お買い上げ日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に関しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. ご贈答、ご移転でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、当社までご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理となります。
 - (1) 保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、あるいは分解、改造による故障または損傷。
 - (4) お買い上げ後の落下や衝撃、その他の不適切な取扱による故障または損傷。
 - (5) 火災、地震、塩害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷。
5. 本保証は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
6. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
7. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取扱について

- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用します。

なお、本書にて、お預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。

- 修理のために、当社から委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を開示する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準で、お客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

| | |
|-------|---|
| ◆ご購入日 | 西暦記入 年 月 日 |
| ◆保証期間 | ご購入日から 1年間 |
| ◆ご購入者 | ご住所（〒 — ） ご芳名 TEL — — |
| ◆販売店 | |

◆印欄に記入がない場合保証書は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。

もし、記入がない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。

※製品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更する場合がありますので、ご了承ください。

ケアメディックス株式会社

東京都文京区湯島3-23-1 SKビル2F

TEL : 03-3837-0551 FAX : 03-3837-0554

<http://www.caremed.co.jp>

2025年7月