









マットレス サイクリンN 取扱説明書

345703-8922

設置

 警告	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。</p>	
<p>当社の介護・メディカルベッド、リクライニングベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</p>	 禁止	
<p>マットレスの上で、飛び跳ねないでください。 ケガをしたり、破損の原因になります。</p>		
<p>マットレスの上での喫煙はおやめください。 火災の原因等になることがあります。</p>		
<p>マットレスの近くでストーブやお線香等を使わないでください。 引火して火災になる恐れがあります。</p>		
 注意	<p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。</p>	
<p>時々寝装品を取り除き、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。 臭いやカビの原因になります。</p>	 注意	
<p>マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ち、障害物に当たらないように運んでください。 障害物に引っ掛けたり、カバーだけを持ち移動させると、カバーのホツレや破れの原因になります。</p>		
<p>本製品の中材(合成繊維)の切断面で皮膚が傷つく恐れがあります。 カバーを開けて使用しないでください。</p>		
<p>マットレスの上で、縫い物等、突起物（針、ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。 針がマットレスの中に入ってしまったたり、破損の原因になります。</p>	 禁止	
<p>ラベル類をはがさないでください。 無理にはがしますと、生地の変色や破損の原因になります。</p>		
<p>直射日光の当たる場所は避けてください。 変形、変色の原因になります。</p>		

⚠️ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

カバーのファスナー引き手が、終点にて収納されていることを確認してください。
ファスナー引き手が“ブラブラ”と飛び出していると、ヘッドボードを傷つける恐れがあります。
当社製のベッドの上に設置し、パッド、シーツなどをメイキングしてからお使いください。








注意


仕様

寸法	サイクリン N R	幅 910×長さ 1950×厚み 120 mm
	サイクリン N S	幅 910×長さ 1810×厚み 120 mm
	サイクリン N SS	幅 850×長さ 1690×厚み 120 mm
重量	サイクリン N R	① 12 kg ② 13.5 kg ③ 15 kg
	サイクリン N S	① 11 kg ② 12.5 kg ③ 14 kg
	サイクリン N SS	① 9.7 kg ② 11 kg ③ 12 kg
カバー	外装生地	ポリエステル 100%
	詰物	ポリエステル綿
中材	① 詰物(ウレタン)	フェルト ウレタンフォーム
	② 詰物(合成繊維)	フェルト 合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
	③ 詰物(ラテックス)	フェルト ラテックス
		高密度連続スプリング
ギャッチ対応	ギャッチ機能対応マットレス	
洗浄	カバー洗濯	

※サイクリン N RS の仕様については別途取説をご参照ください

お手入れの方法

 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
当マットレスは、カバーの洗濯ができます。 お手入れの方法にしたがってください。	 注意
消毒や汚れ落としに、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤、また高水準消毒液、アルコール類を使用しないでください。 接触した場合は、温水でよくすすぎ乾燥させてください。	 禁止
中材の中身は出さないで下さい。 中材の袋の破損等の原因になります。	 禁止
中材の天日干し、直射日光が当たる場所での乾燥はさけてください。 中材の劣化、変色、変形などの原因になります。	 禁止

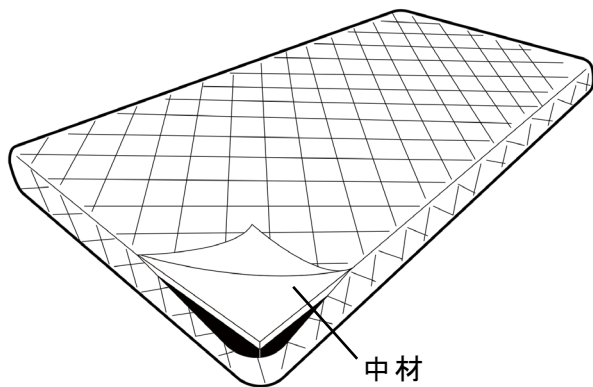

カバーをはずす場合は、ファスナーをあけ、中材を抜いてください。
 カバーを洗濯することができます。
 (中材は洗濯できません。)

【マットレスのお手入れ】

- 風通しのよい場所に立てて、陰干しをしてください。
- 業務用のガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。

【カバーのお手入れ】

- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。
- 液温40℃を限度とし、弱水流にて洗濯することができます。
 - ・ ファスナーが洗濯層の中で暴れないように、ファスナーを終点まで閉めてから洗濯してください。
 - ・ マットレスに取り付けてあります”品質の表示”にしたがってください。
 - ・ 洗濯は洗濯機または弱い手洗いで行ってください。
 - ・ 洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥温度は80℃以下にしてください。
 - ・ ファスナーが乾燥機の中で暴れないように、ファスナーを終点まで閉めてから乾燥させてください。

アフターサービス

保証書：所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼される場合：保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間を過ぎて修理を依頼する場合：修理すれば使用できる場合は、希望により有料で修理いたします。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または、下記のお客さま相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客さま相談室



フリーダイヤル：0120-39-2824

受付時間：月～金曜日 9時～12時 13時～17時

（土、日、祝祭日、年末年始、弊社指定の休日などは除く）

保証書

保証期間	お買い上げの日より	:	1年
お買い上げ日	年	月	日

お客さま	ご芳名
	〒□□□-□□□□
	ご住所
TEL	

販売店	店名・住所
-----	-------

法的責任 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は相談窓口にお問合わせ下さい。

保証の対象

マットレスのみ行います。

保証の態様

- (1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。
- (2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。
- (3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。

※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証書の適用除外

- (1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。
- (2) 誤使用或いはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。
- (4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。
- (5) 火災・天災・地震によって故障又は損傷が生じた場合。
- (6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。

※ 上記項目については有償修理になります。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111 (代表)



製造元：フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148-5