



abonet<sup>®</sup> 取扱説明書

no.2550 abonet シティ ハットシェード  
no.2551 abonet シティ ストローハット

《注意・禁止事項》必ずお読み頂いた上で、お使いください。

- 頭部以外の部位に使用しないでください。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないでください。
- 本製品を火気および加熱したものの近くに置かないでください。
- 緩衝材やインナーを取り外して使用することはおやめください。
- あごひもをきつく締めすぎたり直接結ぶことは大変危険ですのでおやめください。
- 磨耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- 本製品は頭部を保護するための帽子でありヘルメットではありません。法令で規定された保護帽とは異なりますので、保護帽着用規定のある場所では使用しないでください。また、本製品をかぶってオートバイに乗車しないでください。乗車用安全帽とは別ものです。設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。
- 本製品は正しい着用により頭部に対する衝撃を緩和するものであり、全ての衝撃を100%吸収するものではありません。
- 局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
- 頭部に合ったサイズをお選びください。サイズが合わないものをご使用になられますと脱げたりする恐れがあり、事故の原因となります。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用の前に医師に相談してください / 頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方 / アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品の前後、裏表を正しく使用し、また、乱暴に使用しないでください。
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地の色移りする場合があります。

※緩衝材は縫い付けられているため、取り外しは出来ません。

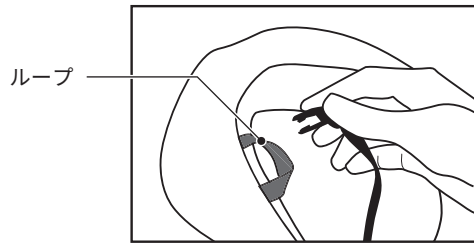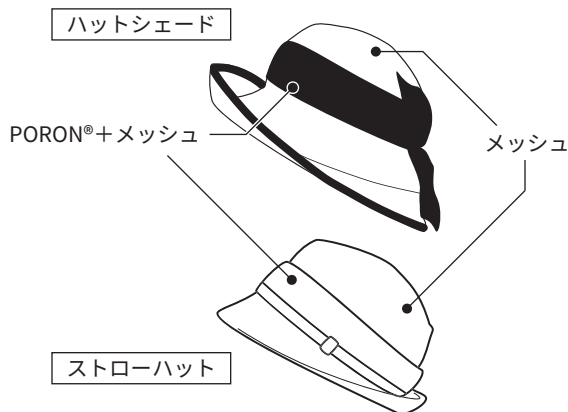

内側のループに別売りのクリップ式あごひも (no.2095) を取り付けることができます。

no.2095 クリップ式あごひもの開き方 (YouTube)



#### no.2550 abonet シティ ハットシェード

- サイズ / 56-58cm ● 重量 / 約 170g ● 緩衝材 / 頭頂部：メッシュ 側頭部：PORON®+メッシュ 厚さ約 15mm
- 素材 / 表地：レーヨン 72%、ナイロン 28% 裏地：ポリエステル 100% (清涼裏地) ● 低減率 / 75% (側頭部)



#### no.2551 abonet シティ ストローハット

- サイズ / 55-57cm ● 重量 / 約 200g ● 緩衝材 / 頭頂部：メッシュ 側頭部：PORON®+メッシュ 厚さ約 15mm
- 素材 / 表地：レーヨン 72%、ナイロン 28% 裏地：ポリエステル 100% ● 低減率 / 75% (側頭部)



## 洗濯方法

- ・洗濯の際はドライクリーニングを行なってください。
- ・洗濯後は形を整えて陰干ししてください。



### 《お洗濯の際の禁止事項》

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控えください。

- 乾燥機の使用
- 強くこする・もみ洗い
- 漂白剤・有機溶剤の使用
- 濡れたまま放置する
- 他の衣類と一緒に洗う



株式会社  
特殊衣料

特殊衣料

〒063-0834 北海道札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40  
TEL:011-663-0761 <http://www.tomoni.co.jp/>