

保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に保管してください。

⚠
注意

- 雨ざらしにしないでください。金属部が錆びて故障の原因になります。
- 幼児や小さなお子さまの手の届くところに置かないでください。思わぬけがの恐れがあります。
- 火の近く、および夏期の車内など、高温になる場所には保管しないでください。故障や変形の原因になります。
- 荷物を重ねたり圧力が加わる状態で保管しないでください。故障や変形の原因になります。

交換部品 (全機種対応)

① 3×5型

② 3×3D

③ 3×C型

④ 4×4W型

⑤ 5×3C型

⑥ グリップ

【右】

【左】

⑦ 滑り止め脚ゴム

※HTタイプは ① ③ ④ の長脚です。

※ ② はH・Lタイプ専用です。

製品の保証、修理について

消費者の皆様が保証期間内において、取扱説明書にしたがい正常に使用していたとき、製品の欠陥により万一事故が発生した場合修理または交換させていただきます。
(レンタルで貸与された方には適用しません)

- この製品の保証期間はお買い上げ日より一年間です。
- 正常な使用で事故が発生した場合、発生した日から60日以内にお買い上げ店もしくは当社まで届けてください。

《保証期間内でも次の場合は有償修理となります》

- 誤った使用による故障や破損。
- お客様が修理、改造された場合に生じた故障や破損。
- 購入後お客様の不注意による変形や損傷。
- 天災・公害による故障や損傷。
- 消耗品(グリップ・脚キャップ・ネジ等)の交換。
- レンタル・病院・その他不特定多数が使用し生じた故障や損傷。
- お買い上げ時期、保証書がない場合。
- 当社以外の付属品を装着し生じた故障や損傷。

《修理・その他》

- 保証期限が過ぎていても、有償修理いたします。
- 修理部品の保有期間は、3年です。

付属部品

畳・フローリング等を傷つけない!

スリッパキャップ

キャップカバー (本皮製)

畳・フローリング・絨毯等に傷がつきにくい保護パーツをご用意いたしました。
(※他社の製品には取付ができません)

機種		サイズ 幅×奥行×高さcm	質量	耐荷重
H-0188	組立	51.0×48.0×65.0 (最小寸法)	2.4kg	100kg
	折りたたみ	52.0×13.0×66.0 (最小寸法)		
H-0193S	組立	53.0×52.5×74.0 (最小寸法)	2.8kg	
	折りたたみ	60.5×11.5×76.0 (最小寸法)		
H-0193C	組立	56.5×55.5×74.0 (最小寸法)	3.3kg	
	折りたたみ	62.0×12.0×76.0 (最小寸法)		
H-0193D	組立	55.0×54.5×74.0 (最小寸法)	3.3kg	100kg
	折りたたみ	62.0×13.0×76.0 (最小寸法)		
H-0194W	組立	58.0×58.5×76.5 (最小寸法)	3.8kg	
	折りたたみ	63.5×13.0×79.5 (最小寸法)		
H-0195C	組立	57.0×58.0×78.5 (最小寸法)	3.6kg	
	折りたたみ	63.0×13.0×81.0 (最小寸法)		
L-0188	組立	50.0×47.0×59.0 (最小寸法)	2.3kg	100kg
	折りたたみ	52.0×13.0×60.0 (最小寸法)		
L-0193S	組立	52.5×51.5×67.5 (最小寸法)	2.7kg	
	折りたたみ	60.0×12.0×69.0 (最小寸法)		
L-0193C	組立	56.0×54.5×68.0 (最小寸法)	3.2kg	
	折りたたみ	62.0×13.0×69.5 (最小寸法)		
L-0193D	組立	54.5×53.0×67.5 (最小寸法)	3.2kg	100kg
	折りたたみ	62.0×13.0×69.5 (最小寸法)		
L-0194W	組立	57.5×56.5×70.0 (最小寸法)	3.6kg	
	折りたたみ	62.0×13.5×72.0 (最小寸法)		
L-0195C	組立	55.5×56.5×72.0 (最小寸法)	3.5kg	
	折りたたみ	62.0×13.0×74.0 (最小寸法)		
HT-0188	組立	54.5~61.5×50.0~54.0×78.0~95.5 (最小寸法)	2.6kg	100kg
	折りたたみ	56.0×12.0×78.5 (最小寸法)		
HT-0193S	組立	54.0~62.5×54.0~57.5×80.0~95.0 (最小寸法)	2.9kg	
	折りたたみ	60.0×12.0×78.0 (最小寸法)		
HT-0193C	組立	59.5~68.0×57.5~60.5×80.0~95.0 (最小寸法)	3.3kg	
	折りたたみ	64.5×12.0×82.0 (最小寸法)		
HT-0194W	組立	62.5~70.5×58.5~62.0×82.5~97.5 (最小寸法)	3.9kg	100kg
	折りたたみ	64.5×12.0×82.0 (最小寸法)		
M-0188	組立	45.0×47.0×59.0 (最小寸法)	2.2kg	
	折りたたみ	47.5×11.0×60.0 (最小寸法)		
M-0193S	組立	47.0×45.0×68.5 (最小寸法)	2.5kg	
	折りたたみ	49.5×12.0×70.0 (最小寸法)		
M-0193C	組立	52.0×50.0×68.5 (最小寸法)	3.0kg	
	折りたたみ	55.0×13.0×70.0 (最小寸法)		

仕様(全機種共通)

	メインパイプ	フロントパイプ	グリップ	スライドロック	脚力バー	その他樹脂
材質	アルミ6063	アルミ6063	NBR発泡	六ナイロン	合成ゴム(ラテックス)	六ナイロン・PP
表面処理	アルマイト加工	粉体塗装	—	艶	—	艶・半艶



Excellent Walk


SLIDEFIT

スライドフィット

固定式伸縮歩行器

取扱説明書

(全機種・共通説明書)

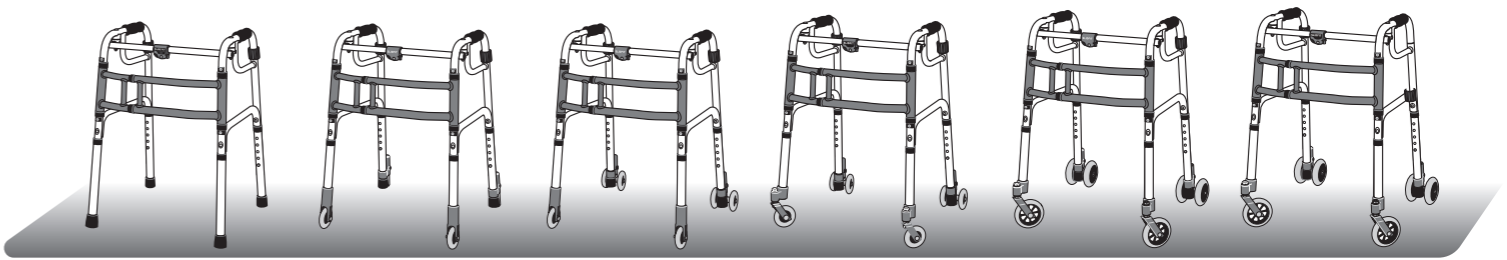

H-0188
(HT-0188)
(L-0188)
(M-0188)

H-0193S
(HT-0193S)
(L-0193S)
(M-0193S)

H-0193D
(L-0193D)

H-0193C
(HT-0193C)
(L-0193C)
(M-0193C)

H-0194W
(HT-0194W)
(L-0194W)

H-0195C
(L-0195C)

この度は、弊社の製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

もくじ

- 安全上のご注意・お手入れ方法・点検について…1~2
- 各部のなまえ・組立て方…………… 3
- 折りたたみ方・グリップ交換
- 保管のしかた・交換部品・付属部品…………… 4
- 製品の保証、修理について・仕様書

警告

ご使用前に

- この製品は歩行を補助する製品です。両手で体を支えることのできない方はご使用できません。
- ご使用される方の状態により、医師やケアマネージャー等の専門家にご相談ください。
- ご使用される方の体格にあったサイズで、ご使用してください。
- ご使用前に取扱説明書をよく読み、ご理解された後ご使用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

●製品改良等のため予告なしに製品仕様が変わる場合がありますのでご了承ください。

ユーバ産業株式会社
大阪：〒547-0035 大阪市平野区西脇2-1-15
TEL.06-6700-7533 FAX.06-6700-7670

東京：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-40-7
TEL.03-3479-1070 FAX.03-3479-1080
福岡：〒813-0044 福岡市東区千早4-7-1
TEL.092-672-8305 FAX.092-672-8219

安全上のご注意 必ずお守りください


■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)

- **必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。**
- **してはいけない「禁止」内容を説明しています。**

警告

- ご使用前に必ず各部の点検をし、異常のないことを確認してからご使用ください。
各部の点検 ・ロックレバーが正常に操作でき、安全ロックが掛けられること。
・各部のピン(伸縮ピン・高さ調節ピン)が確実にかかっていること。
・ハンドルグリップが確実に固定されていること。
・各部のねじ・リベットに緩みがないこと。

- 歩行する際は、①グリップ以外のパイプを持って使用しないでください。フレームが変形しケガの原因となります。
- ②スライドパイプに腰をかけたり強い加重をかけないで下さい。フレームが変形したり、転倒しケガや重症を起こす原因となります。

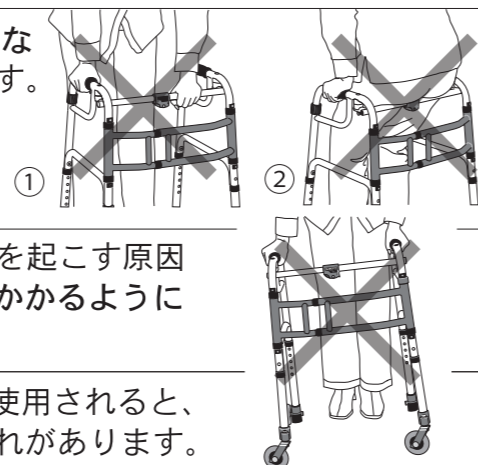

- 偏った使い方をしないでください。転倒しケガや重傷を起こす原因となります。歩行する際は、必ず左右均等に体重がかかるように十分注意してください。

- 平らな場所でご使用ください。平らでない場所でご使用されると、フレームの変形の原因となりケガや重傷につながる恐れがあります。

- 階段や段差のある場所では使用しないでください。体が不安定になり事故の原因となります。

- 敷物の上や滑りやすい場所では使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。

- 高さ調節パイプは全て同じ位置合わせてご使用ください。1つでも高さが違うと不安定になり事故の原因となります。

- 歩行器を投げたり落としたり乱暴に扱わないでください。フレームが変形し事故の原因となります。

- 使用中に歩行器のガタつきが生じた場合は、直ちに使用を中止し販売店または当社窓口までご連絡ください。大きな事故につながる恐れがあります。

- この製品の最大使用者体重は100kgです。

お手入れの方法


■清掃について


汚れがひどいときには中性洗剤または濡れた布でほこりを落とし、乾いた布で良く拭き取ってください。湿気を帯びたまま放置しますと傷むことがありますので、乾かして湿気を取るようにしてください。

- **注意**
- 車体の清掃に中性洗剤以外の物を使用しないでください。部品の変質、劣化の原因になります。


■点検について

グリップの磨耗、ネジの緩み、部品の破損、及び動作不良がないかを適時点検し、必要に応じて交換してください。

- **警告**
- 車体の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、当社お客様ご相談窓口までご連絡ください。重大な事故につながる恐れがあります。

- **注意**
- 交通量の多い場所や人の出入りが頻繁な場所は避けるか、介護の方が付き添ってください。
●危険ですからむやみに改造や分解をしないでください。故障やけがの恐れがあります。

歩行器の正しい使い方

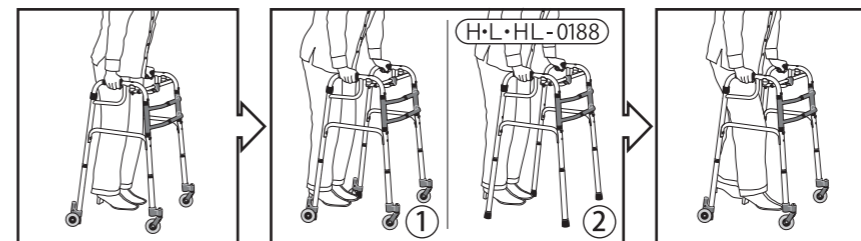


- 片側(右又は左)に力が掛からないように、両手同時にグリップをつかんで下さい。
- ①歩行器に体重を掛けずに少し前方に移動させてください。(後脚がスタンドタイプの場合は後脚を少し浮かせて、移動させてください。)
- ②歩行器を持ち上げ、少し前方に移動させて歩行してください。
- 真上から体重が左右均等に掛かるように、前進してください。

警告


誤った使い方をしないでください。転倒しケガや重傷の恐れがあります。

① 組み立て方

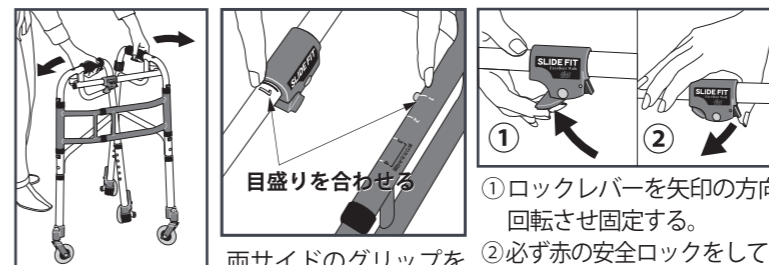


- 組立てる時は、両サイドのグリップを最後まで開き下段パイプの目盛に合わせて、ロックレバーで固定してください。
- ①ロックレバーを矢印の方向回転させ固定する。
②必ず赤の安全ロックをしてください。安全ロックが掛からない時は、再度ロックレバーを押した状態で安全ロックをしてください。

③ 幅調節の仕方

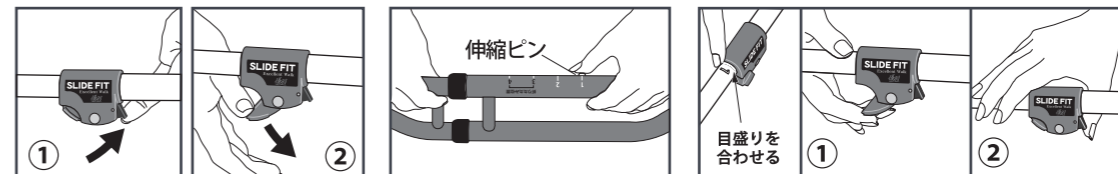


- ①赤の安全ロックを解除する。
②ロックレバーを矢印の方向に下げるとロックが解除されます。
- ピンを指で押さえ両サイドのパイプを動かし体格に合った位置で固定する。
- 位置が決まったらスライドパイプ上部に付いている目盛りを合わせて①ロックする。この時必ず②安全ロックをすること。

④ 高さ調節

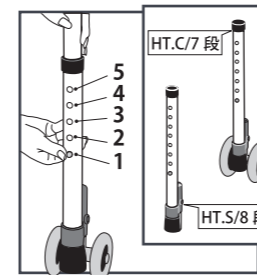

高さ調節ピンを押さえ脚を上または下に動かしてください。調節した後ピンが出ていることを確認してください。

⑤ グリップ交換のしかた

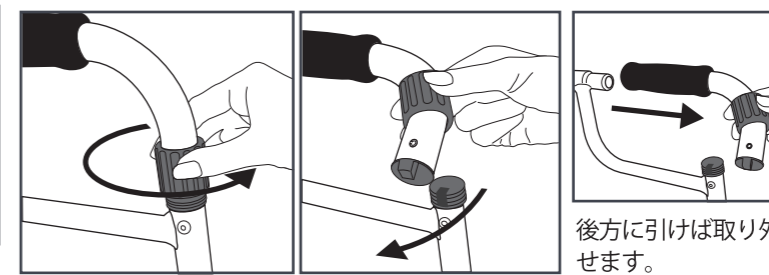


グリップを交換する時は、リングねじが緩んだら図矢印の方向にリングねじを緩めてください。

リングねじが緩んだら図のように内側に回転させてください。


後方に引けば取り外せます。取付け方は、逆の手順で行ってください。※右・左あり間違わないように取付けてください。

各部の名称

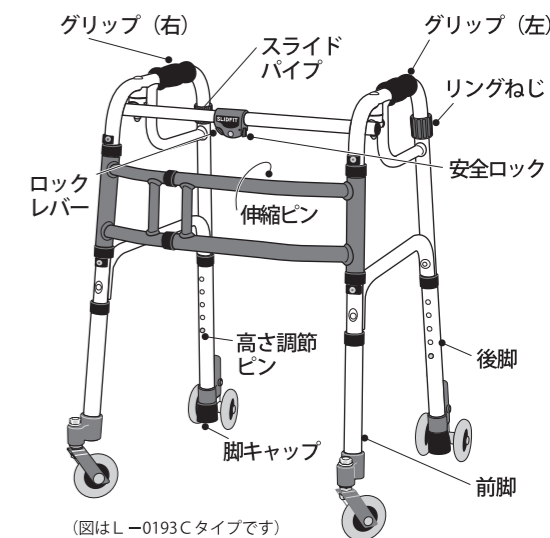

(図はL-0193Cタイプです)

② 折りたたみ方

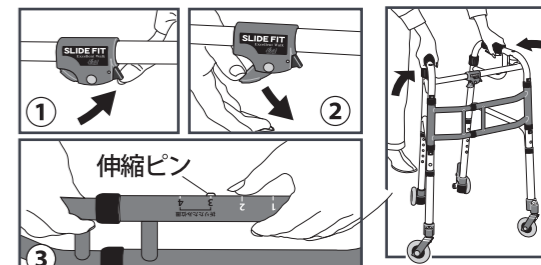

折りたたむ時は、図①赤の安全ロックを解除し図②ロックレバーを矢印の方向に下げて、図③伸縮ピン位置を3または4に合わせて下さい。ロックが解除されていないと折りたたむ事ができません。

折りたたんだ状態

※折りたたみは幅調節の伸縮ピンを3または4段目に合わせて行ってください。

警告

- 組立てが完了したら、必ず各部の点検を行ってからご使用ください。