



タケトラ®クラッチ

*本製品を正しくご使用頂くために、ご使用前に必ず本紙、本紙裏面をお読みください。

*内容をご理解頂き、記載の注意事項をお守りください。

*本紙は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

*商品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合がございます。

■商品番号：038563 [単位 1]

■品名：タケトラクラッチ

■規格：M

■入数：1組

■製造番号：180915

JAN



GS1-128



(01)04958995385632(10)180915



株式会社 **竹虎**®

URL <http://taketora-web.com/>
商品に関するお問い合わせ **0120-094-315**
(月～金 9:00～17:00 ただし祝日を除く)



外装 台紙

規格

サイズ	SS	S	M	L
商品番号	038561	038562	038563	038564
適応身長	121～137cm	137～157cm	157～178cm	178～198cm
重量(1本)	660g	760g	820g	900g
入数	2本入			
耐荷重量	136kg			

◀適応身長を目安▶

調節穴脇に印字されている数字は、適応身長を目安です。



MADE IN CHINA



SS		S		M		L	
フィート	cm(約)	フィート	cm(約)	フィート	cm(約)	フィート	cm(約)
4' 0"	121	4' 6"	137	5' 2"	157	5' 10"	178
4' 1"	124	4' 7"	140	5' 3"	160	5' 11"	180
4' 2"	127	4' 8"	142	5' 4"	163	6' 0"	183
4' 3"	129	4' 9"	145	5' 5"	165	6' 1"	185
4' 4"	132	4' 10"	147	5' 6"	168	6' 2"	188
4' 5"	134	4' 11"	150	5' 7"	170	6' 3"	191
4' 6"	137	4' 12"	152	5' 8"	173	6' 4"	193
		5' 1"	155	5' 9"	175	6' 5"	196
		5' 2"	157	5' 10"	178	6' 6"	198

各部名称 / 材質

本体：アルミニウム、PP

横木カバー/握部スポンジ/

杖先ゴム：TPR樹脂

(ラテックスフリー)

握部ネジセット/

プッシュボタン：スチール

横木カバー*

*交換用のパーツが
ございます(別売)

握部スポンジ*
(ハンドグリップ)

握部ネジセット*
(握部シャフト軸・蝶ナット)

フットピース

プッシュボタン*
※確実に固定して
ください。

上シャフト

調節穴

下シャフト

杖先ゴム*



エンドキャップ
(本体付属品)

高さの調節方法

横木


- フットピースのプッシュボタンを両側から押し込みながら、下シャフトを上下に移動させ、高さを調節します。
 - 高さが決まりましたら、両方のプッシュボタンが確実にハマっていることを必ず確認してください。
- *直立したときに、わきの下約3～5cm ぐらいのところに横木がくるのが一般的に使いやすい高さです。

ハンドグリップ

- 蝶ナットをゆるめて、握部シャフト軸を引き抜き、高さを調節します。
 - 位置が決まりましたら、握部シャフト軸を奥まで差し込み、蝶ナットを固くしめてください。ハンドグリップに傾きやゆるみがないことを確認してください。
- *肘が若干曲がるくらい（おおよそ10度）が適切な高さです。

フィット感の確認

- 両つま先の「前に約15cm、外側に約15cm」の位置（右イラスト参照）に杖先を合わせ、快適に前方へ寄りかかることができるか確認してください。

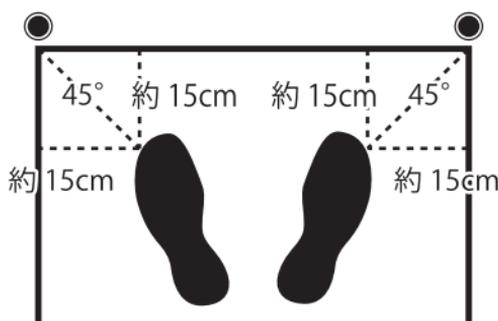

⚠ 使用上のご注意

誤った扱い方をすると製品の故障の原因となり、転倒等の事故につながる恐れがあります。

- 身体にあった杖をお選びください。不適切な長さのまま使用すると事故等の原因となり危険です。
- ご使用前には必ず各部の点検をしてください。
 - ①本体の破損やプッシュボタンの不具合等を見つけた際は、直ちにご使用を中止してください。
 - *使用中、プッシュボタンの周辺で音がすることがありますが、安全上問題ございません。
 - ②杖先の摩耗・破損等の異常がある場合はすみやかに交換してください。
 - *本製品専用品をご使用ください。
 - *杖先交換の際は、杖本体にエンドキャップが装着されていることを確認してください。エンドキャップは交換用パーツとして別売りしていませんので、無くさないようにご注意ください。
- 杖先が松葉杖本体に確実に固定されていることを確認してからご使用ください。
- 使用中もゆるみ等の異常がないか確認してください。
- フットピースの上シャフトから下シャフトを完全に引き出さないようにしてください。
- プッシュボタンが確実に固定されたことを確認してご使用ください。
- 柔らかな地面・雪路・ぬれたり凍結した路面等、滑りやすい場所や不安定な場所での使用は危険です。また、道路の側溝等の溝やくぼみのある場所では、杖先がはまり込む恐れがありますので、ご注意ください。
- 水平面以外の使用では、杖先が不安定になります。また、杖先の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 歩行補助以外の目的には使用しないでください。
- ご使用後は水分・汚れをきれいに拭き取り、屋内に保管してください。高温・多湿な場所（ストーブのそば、直射日光の当たる場所等）では、使用しないでください。製品の劣化やサビの原因となる場合があります。また、低温の場所（寒冷地等）では、杖先が硬化し滑りやすくなる場合があるため十分ご注意ください。



パーツ（別売）のご案内 ※SS～Lサイズ共通

*パーツの交換方法については弊社ホームページ<<http://taketora-web.com/>>をご覧ください。

	横木カバー		商品番号:038881 入数:2個入
	握部スポンジ (中芯付き)		商品番号:038882 入数:2個入
	ネジセット		商品番号:038884 入数:各2個入
	杖先ゴム		商品番号:038883 入数:2個入

※①②のセットです。各パーツ単体での販売はありません。