

Tacaof 楽に食べられる タベラック 吸い口型

三分割・五分割など
つぶの多いものに

- 吸い口は別途販売しています。



〈品質表示〉		〈耐熱温度〉
ボトル	ポリプロピレン	120℃
カバーキャップ	ポリプロピレン	
吸い口	スチレン系熱可塑性エラストマー	
吸い口キャップ	ポリプロピレン	
中蓋	ポリエチレン	105℃
〈最大容量〉 230ml		

Tacaof タベラック Tabe Luck

取扱説明書



えんげ
嚥下障害のある人に使用する時

- 誤嚥防止のため麻痺のある患者では、側臥位の場合、健側を下にした姿勢で食事をとらせる。
- 少しずつゆっくりと摂取させる。
- 食事中介助者は側を離れない。
- 意識障害のある場合、専門家の指示を受ける事。
- 食事の温度に注意する。

福祉用具組合メーカー
株式会社 幸和製作所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁目19番地1
【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)
☎0120-508-058
<http://www.tacaof.co.jp>

Tacaof 楽に飲める タベラック ストロー型

水・ジュース・お茶・ボタ
ージュ、濃厚流動栄養食、
経管栄養食などの液状
のものに

- ストローは5mm径のものを使用してください。
(60本入の別途販売もしています)



〈品質表示〉		〈耐熱温度〉
ボトル	ポリプロピレン	120℃
カバーキャップ	ポリプロピレン	
ストローキャップ	ポリプロピレン	
ストローバックキン	スチレン系熱可塑性エラストマー	
中蓋	ポリエチレン	105℃
ストロー	ポリプロピレン	100℃
チューブ	シリコン	200℃
〈最大容量〉 > 230ml		

Tacaof Tabe Luck

特長

- ①吸う力の弱い方でも楽に飲食ができます。
- ②食事の時間が短縮され疲れません。
- ③食べものがこぼれにくいので、衣類を汚さずにすみ、後始末が楽です。
- ④介助者の手を借りずに飲食ができます。
- ⑤容器を手で押すことにより、リハビリにも効果があります。
- ⑥介助者の労働の軽減に役立ちます。
- ⑦楽な姿勢で飲食ができます。

こんな時にも——

- ①口の中に障害(口内炎、歯の治療)がある方。
- ②スポーツのときの水分補給用として。
- ③運転、旅行などに携帯用として。

その他、用途に応じてご自由にお使いください。

- 煮沸消毒のできる素材を使っていますので、熱湯洗浄により常に清潔に使用できます。




ボトル及び中蓋は、吸い口型、ストロー型のどちらにも使用できます。

ストロー型に付いている付属のチューブは適当な長さに切って、ストローの先に差込んでお使い下さい。


目盛(200ml)を目安に使用してください。

吸い口部セットのしかた

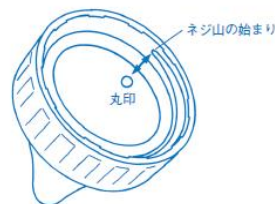

吸い口部に付いている丸印と、キャップ内側のネジ山の始まりの所を合わせてください。使いやすい位置に、吸い口がセットされます。

ストローバックキン セットのしかた

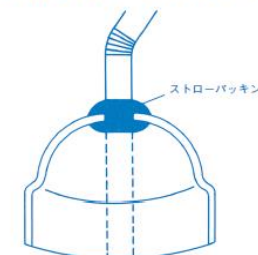

キャップの内側・外側ともバックキンの溝の部分に、しっかりと、はめ込んで下さい。

〈取扱上の注意〉

吸い口型

- 吸い口を深くかむとキャップ部分より、もれることがありますので、ご注意ください。
- 吸い口は汚れが目立つようになったら交換して下さい。

ストロー型

- ストローをボトルに差し込む時、一度ストローをぬらしてから差し込むとスムーズに入ります。
- ストローをボトルから抜く時、ストローバックキンはキャップから取れないように指で押さえてストローを抜いてください。バックキンのないボトルを傾けた時、液もれします。
- 洗浄の時、バックキンをなくさないように気をつけて下さい。
- ストローのジャバラの部分は、洗浄が難しいので適時交換して下さい。
- ボトルは傷つきやすいので、かたいブラシはおさけください。

電子レンジで温める時

- 吸い口やキャップを取ってボトルだけにしてください。熱くなりすぎないように、ご注意ください。