


## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。  
製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。

### 目次

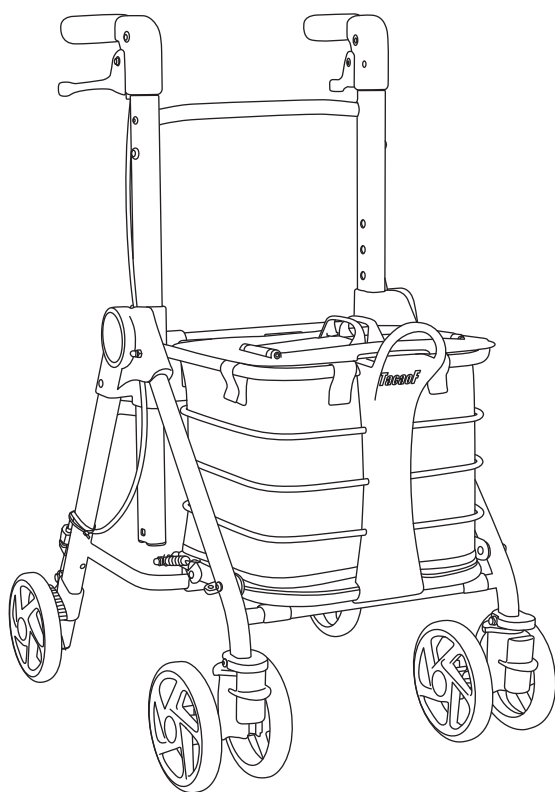

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| ご使用前の注意                 | 1 P     |
| ご使用上の注意                 | 2 ～ 3 P |
| お手入れ方法                  | 3 P     |
| 保管方法                    | 3 P     |
| 各部の名称と製品仕様              | 4 P     |
| 車体の組み立て方・折りたたみ方         | 5 P     |
| グリップの使用方法               | 5 ～ 6 P |
| ブレーキの使用方法               | 6 P     |
| 店内カゴの使用方法               | 7 P     |
| ワン・ツー・スリー<br>キャスターの使用方法 | 8 P     |
| ブレーキの調節方法               | 9 P     |
| タイヤの交換時期確認方法            | 10 P    |
| 故障かな？と思ったら              | 10 P    |

福祉用具総合メーカー

 **株式会社 幸和製作所**

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)

 **0120-508-058**

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.tacaof.co.jp>

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

## ご使用前の注意

**⚠ 警告** 下記の場所では絶対に使用しないでください。

- バス・電車の中やエスカレータ。 ●雨・雪・凍結などで滑りやすい所。
- 悪路での使用。（石畳など車体に衝撃が加わりやすい場所）

**⚠ 注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 組み立てるときは周囲に人がいないことを確認してください。
- 組み立て、折りたたみおよび調節は確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 各部を点検し、特にハンドブレーキと駐車ブレーキの使用時に左右の後輪が確実に固定されることを確認してください。
- ブレーキを解除したときには、後輪がスムーズに回転することを確認してください。ブレーキシューが後輪内側に干渉する場合はブレーキの調節をしてください。（「ブレーキの調節方法」参照）
- ブレーキワイヤーが足に接触しない位置まで曲げてください。  
ブレーキワイヤーが足に接触する場合は曲げ直してご使用ください。
- ネジなどのゆるみがないこと、グリップが固定されていることを確認してください。
- タイヤおよびブレーキに磨耗が無いことを確認し、必要に応じて交換などをしてください。交換する場合はご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへ連絡してください。
- ご使用の際は、かならずご自身の体調を確認し、安全に使用できるかどうかを判断してください。体調によっては、転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 坂道・溝・段差のある所、砂・泥・水溜りのある所を通る場合は十分に注意してください。
- 交通量の多い所や混雑している所で使用する場合、また夜間に使用する場合は十分に注意してください。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

## ご使用上の注意

**！ 警告** 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歩<br>行<br>の<br>と<br>き                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>● グリップ以外の場所を持って歩行しないでください。</li><li>● グリップを片手で操作しないでください。</li><li>● グリップに寄りかかったり、荷物を吊り下げたりしないでください。車体だけが動いたり、転倒することがあり危険です。</li><li>● ハンドブレーキを使用するときは、左右同時にかけてください。</li><li>● 段差や溝などにつまずくと、転倒するおそれがありますので注意してください。また、段差に対して斜めに侵入しないでください。段差の手前ではかならず一旦止まり、十分注意して慎重に越えてください。</li><li>● 本体が組み立てられていることを確認し、ご使用ください。</li><li>● 確認レバーがパイプに固定されていることを確認してください。</li></ul> |
| 座<br>面<br>に<br>関<br>し<br>て                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 本製品に座面はありません。フタの上などに絶対に座らないでください。</li><li>● フタを踏み台として使用しないでください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 分解・修理は弊社サービス員以外行わないでください。</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**！ 注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歩<br>行<br>の<br>と<br>き | <ul style="list-style-type: none"><li>● 勢い良くグリップに負荷をかけないでください。</li><li>● ハンドブレーキを握った状態、および駐車ブレーキをかけた状態で歩行しないでください。</li><li>● 車体からはなれるときはかならず駐車ブレーキをかけてください。また、非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。</li><li>● ブレーキは自動車のブレーキとは構造的に違いますので、過信しないでください。</li><li>● 坂道では駐車しないでください。坂道では、たとえブレーキをかけても動く場合があります大変危険です。やむを得ない場合は動かないように十分に注意してください。</li><li>● 踏切などの溝を越えるときは、前輪がはまらないように十分に注意して操作してください。</li><li>● 店内カゴを使用しないときは、カゴのせ部品をフタへ固定した状態で歩行してください。</li><li>● ペットの散歩には使用しないでください。転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。</li></ul> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**⚠ 注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

袋に関して

- 袋に 6 kg 以上の重さの荷物を入れしないでください。
- 袋に荷物を入れたままで折りたたまないでください。
- 袋の中に乳幼児を乗せないでください。
- 袋の中に貴重品を入れたまま車体からはなれないでください。
- 袋に荷物を入れる際は、勢いよく入れしないでください。
- 袋に荷物を入れる際は、フタを勢いよく開閉しないでください。また、指はさみなどに注意してください。
- 袋に鋭利な物を入れしないでください。

店内カゴの利用に関して

- 店内カゴは底面が水平なものをご使用ください。
  - 店内カゴに 4 kg 以上の荷物を入れしないでください。
  - 店内カゴを載せた状態で車体を折りたたまないでください。
  - 店内カゴを載せた状態でグリップ高さの調節をしないでください。
  - 店内以外や傾斜・段差のある場所で、店内カゴを載せて歩行しないでください。
  - 荷物を載せる際は、勢いよく載せないでください。また、店内カゴ内中央付近に置き、端には載せないでください。
  - フタの上に店内カゴ以外の物を載せないでください。
- ※袋・店内カゴ内の合計積載荷重は 6 kg です。


## お手入れ方法

- 雨などで濡れたときは、乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
- 袋の汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後よく乾かしてください。
- 研磨剤入りのスポンジを絶対に使用しないでください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

## 保管方法

- 屋内で保管してください。また、長期間使用しないときは、汚れを落としてから保管してください。
- 雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- 車体を倒した状態で、車体の上に荷物を重ねないでください。故障の原因となります。

## 各部の名称と製品仕様

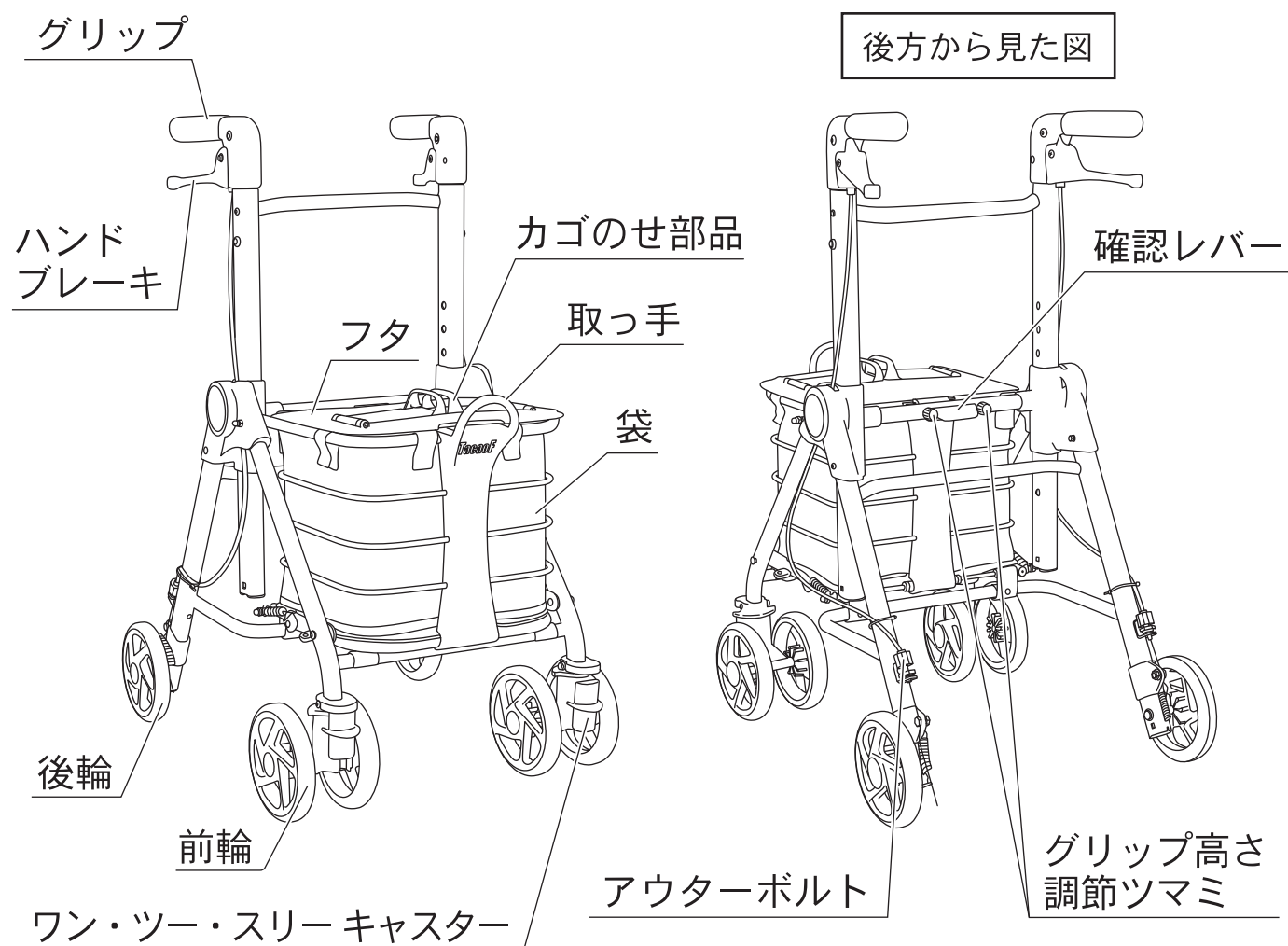


|         |                            |           |               |
|---------|----------------------------|-----------|---------------|
| 組み立て寸法  | 幅450×奥行595<br>高さ670～910 mm | 袋の積載荷重    | 6 kg          |
|         |                            | 店内カゴの積載荷重 | 4 kg          |
| 折りたたみ寸法 | 幅450×奥行415×高さ720 mm        | 合計積載荷重    | 6 kg          |
| 押し手高さ   | 670～910 mm 9ポジション          | 本体材質      | アルミニウム合金      |
| 袋寸法     | 幅260×奥行210×高さ225 mm        | 車輪材質      | ポリプロピレン・EVA樹脂 |
| 重量      | 4.9 kg                     | 袋材質       | ポリエステル        |
| 最大使用者体重 | 75 kg                      |           |               |

※各寸法、重量は参考数値です。

## 車体の組み立て方・折りたたみ方

### 【組み立て方】

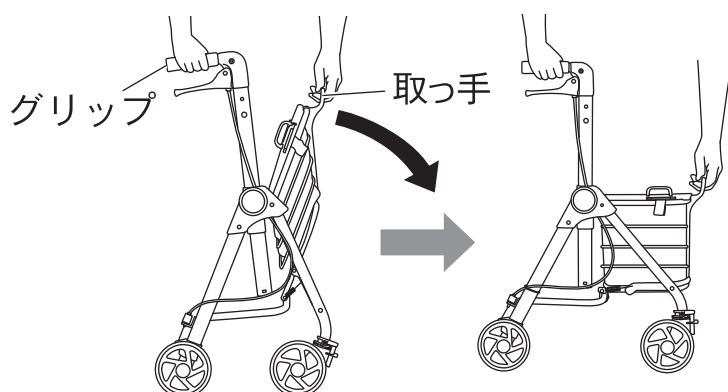

グリップと取っ手を持ち、取っ手をおろしてください。

※おろす際、体重をかけて車体に寄りかからないよう注意してください。転倒のおそれがあり危険です。


### 【折りたたみ方】

グリップと取っ手を持ち、取っ手を持ちあげてください。

#### ⚠ 注意

- 周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 確実に組み立てられていることを確認してから使用してください。
- 店内カゴを載せた状態で、折りたたまないでください。

## グリップの使用方法

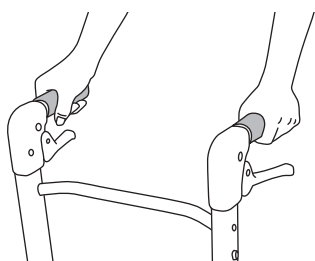


左右のグリップを握って、ゆっくり歩行してください。

#### ⚠ 注意


- グリップ以外の部分を握って使用しないでください。
- 片手での操作はしないでください。バランスを崩し危険です。

### 【高さの調節方法】

**1** 確認レバーを図の方向にはずしてください。

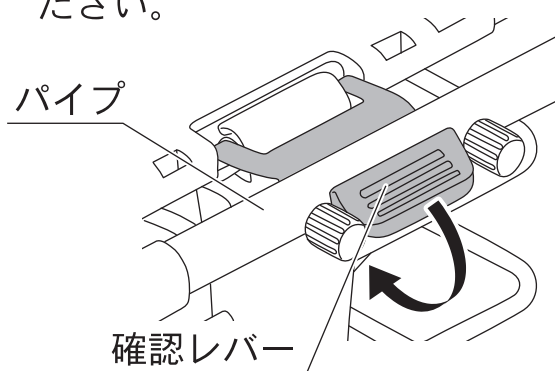


**2** グリップ高さ調節ツマミを内側に寄せて固定を解除させた状態で、グリップをお好みの高さに合わせてください。

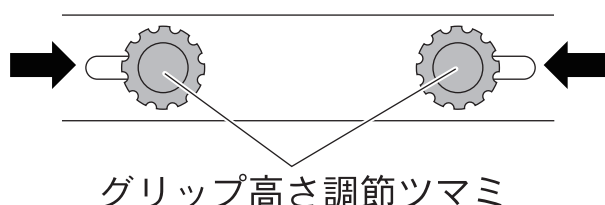

- 3** お好みの高さでグリップ高さ調節ツマミをはなし、外側に開いてグリップが固定されたことを確認してください。




- 4** 確認レバーをパイプに固定してください。

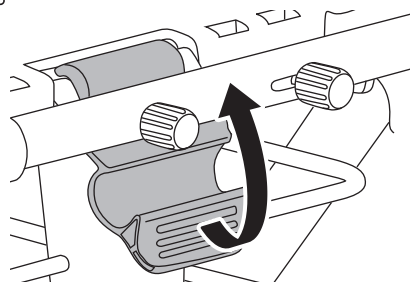


### ⚠ 注意

- 1～4の操作を行う際は、片手で中央の連結パイプを持ち、もう一方の手で操作してください。ハンドルが勢いよく落ちることがあります。
- グリップ高さ調節ツマミが外側に開き、グリップが確実に固定されていることを確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 高さの調節後、ハンドルが水平であることを確認してください。
- 高さの調節後、都度ブレーキの調節を行ってください。
- グリップ高さは、かならず 670 ～ 910mm の範囲内で使用してください。

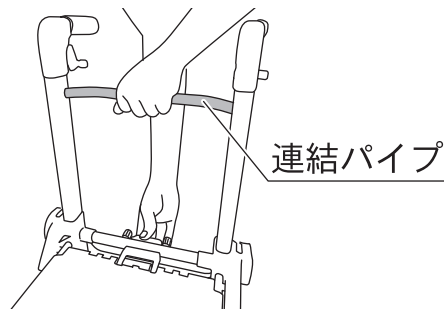

## ブレーキの使用方法


グリップ

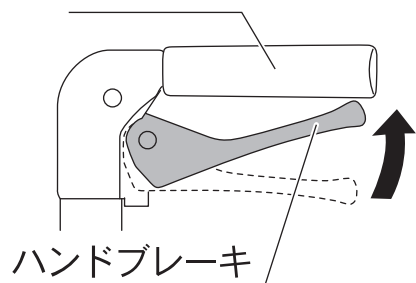

ハンドブレーキ

### ■ハンドブレーキの使用方法

グリップを持ちながら、左右のハンドブレーキを同時に握ってください。解除するときは指をはなしてください。

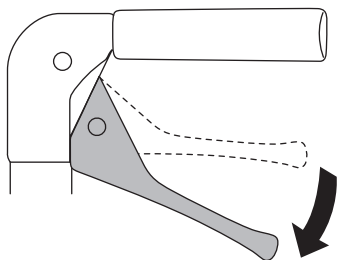

### ■駐車ブレーキの使用方法


ハンドブレーキをさげると、後輪が固定され駐車ブレーキがかかります。さげたハンドブレーキをあげると解除されます。

### ⚠ 注意


- 駐車ブレーキを使用する際は、かならず左右両側の左右両側のハンドブレーキをさげてください。片側のみでは制動力が不十分で危険です。
- 車体からはなれるときは、かならず駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されていることを確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

## 店内カゴの使用法




- 1** フタ上面のカゴのせ部品の持ち手を左右に引いて開いてください。

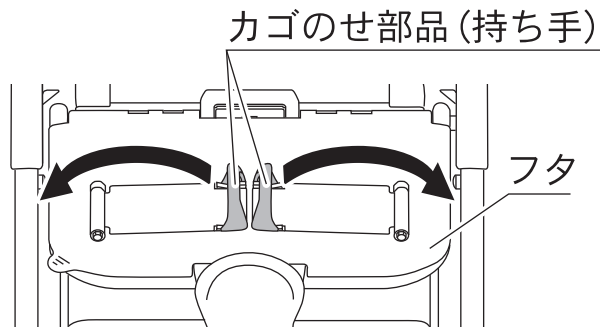

- 2** 店内カゴを横向きにゆっくりと設置してください。

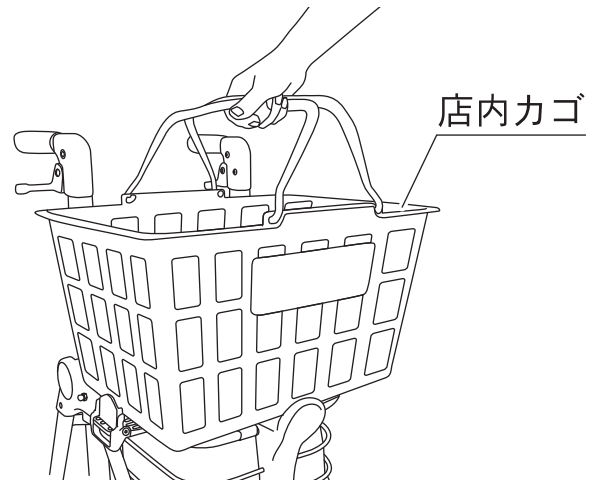

- 3** お買い物後、左右のカゴのせ部品を閉じてください。また、かごのせ部品をしっかりと押し込んでください。

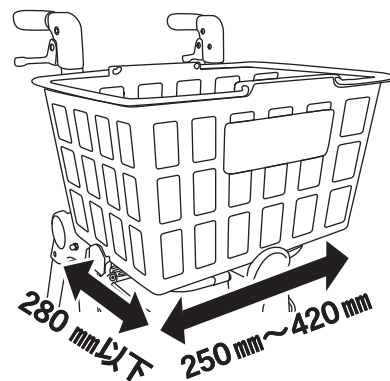
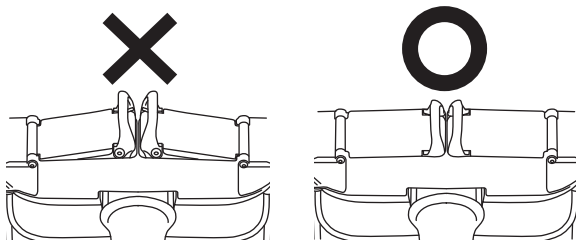
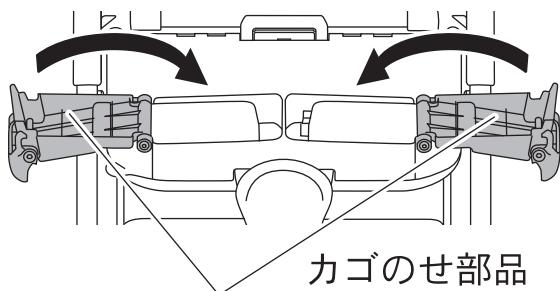


### 【適応店内カゴサイズ】

幅 250mm～420mm × 奥行 280mm 以下  
※店内カゴの大きさは参考数値です。  
かならず店内カゴが安定して設置されていることを確認してご使用ください。



### ⚠ 注意

- 提示サイズ以外の店内カゴを載せないでください。
- 店内カゴを載せる際は、かならず四方が収まるように置いてください。
- 店内カゴ以外の物を載せたり、台車として物品運搬などに使用しないでください。
- 店内カゴを載せる際は、勢いよく載せないでください。
- 荷物は店内カゴの中央付近に置き、端には載せないでください。  
また、重い荷物は立てずに寝かせて置いてください。

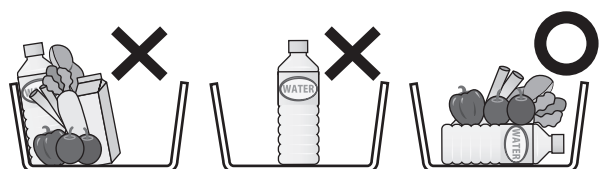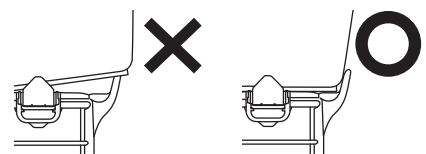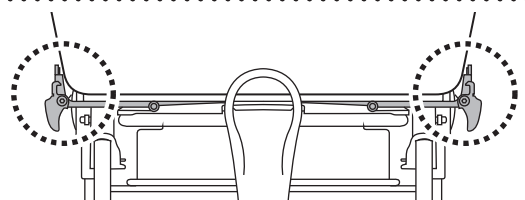

## ワン・ツー・スリーキャスターの使用方法

前輪の動き方を、お好みに合わせて3段階に設定していただけます。  
キャスター切りかえツマミを上・中・下に動かしてください。  
(設定は、前輪をまっすぐ前に向けた状態で行ってください。)

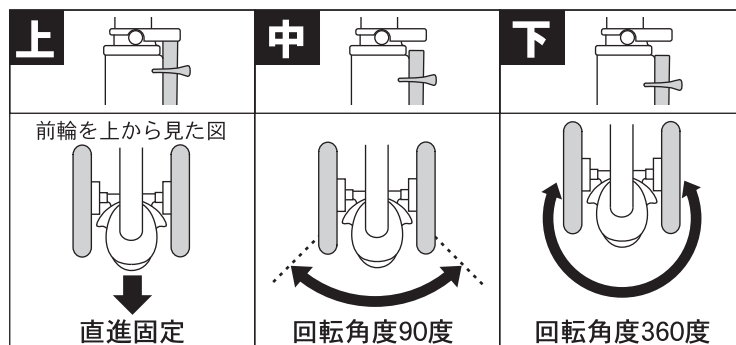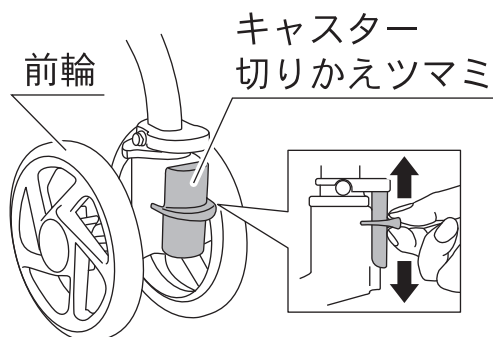


### ⚠ 注意


- 左右の前輪のキャスター切りかえツマミが同じ位置にあることをかならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

## ブレーキの調節方法


ハンドブレーキの効き方に不都合があるときは、以下の手順で調節してください。  
アウターボルトは左右にあります。必要に応じてそれぞれを調節してください。

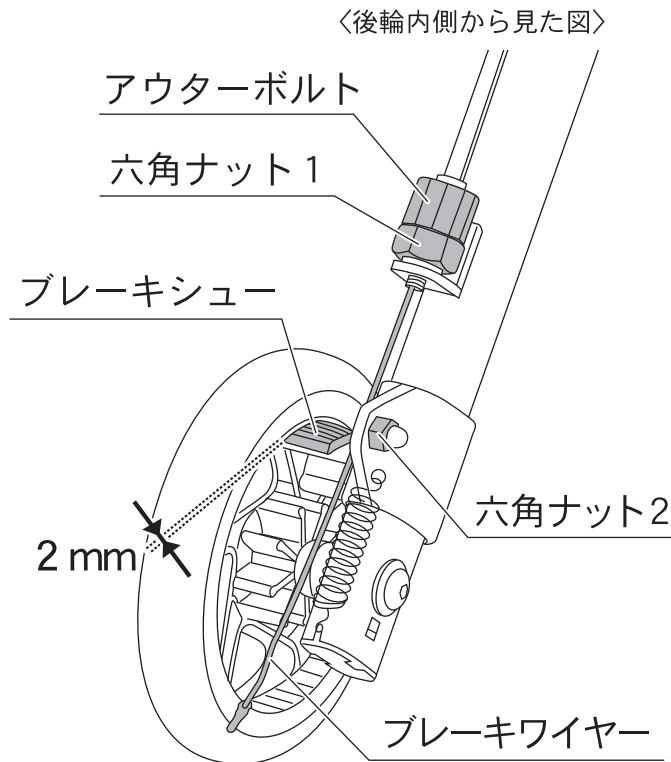

- 1 駐車ブレーキを解除してください。
- 2 六角ナット1を反時計回りの方向へ回してゆるめてください。
- 3 アウターボルトを回して、車輪内側とブレーキシューのすき間を2 mmに設定してください。  
時計回り → すき間が広がる  
反時計回り → すき間が狭まる
- 4 アウターボルトを押さえながら、六角ナット1を時計回りの方向へ回して締めてください。(六角ナット1を締める際アウターボルトが回ると、3で行った調節がずれてしまいます。)

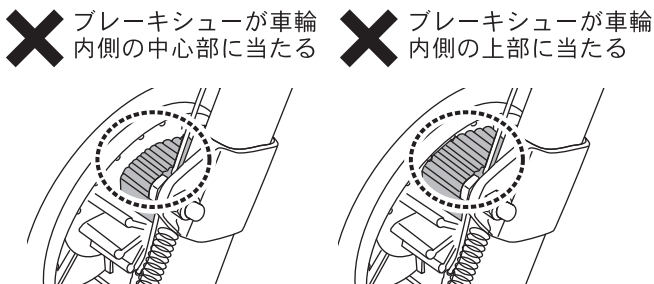

※アウターボルトが最高位置に達する場合、下記のようにブレーキワイヤーを引っ張り調整してください。

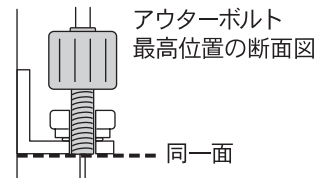

### ■上記の手順でブレーキ調節ができない場合


六角ナット2を反時計回りの方向へ回してゆるめ、ブレーキワイヤーをペンチなどで引っ張り、車輪内側とブレーキシューのすき間を2 mmに調節してください。その後、六角ナット2を時計回りの方向へ回して締めてください。

※この調節方法は、アウターボルトでの調節ができない場合にのみ行ってください。  
通常の微調節は、上段のアウターボルトでの調節方法で行ってください。

### ⚠ 注意

- かならずご使用のグリップ高さで調節を行ってください。
- 調節後、ブレーキワイヤーが足に接触しない位置まで曲げてください。ブレーキワイヤーが足に接触する場合は曲げ直してご使用ください。

## タイヤの交換時期確認方法

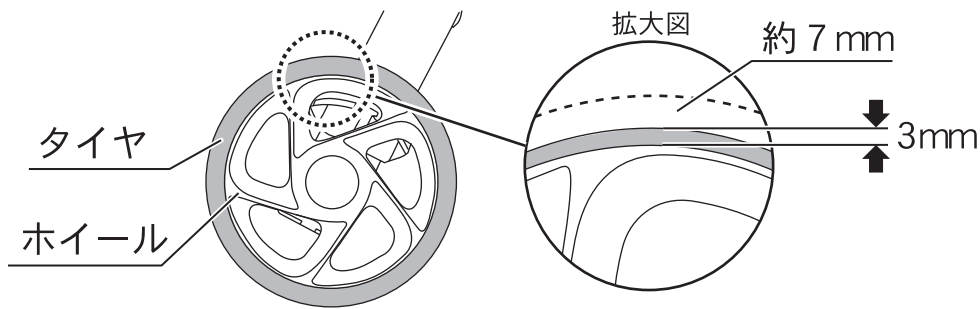

上図のように新品の状態から約 7mm すり減るまでがタイヤの交換目安です。ホイールの外周から 3mm 以下では使用しないでください。  
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。  
※タイヤは左右両方を交換してください。片方のみですとすべてのタイヤが接地せず、車体がかたつく場合があります。

## 故障かな？と思ったら

**⚠ 警告** 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中に何か異常を感じたら直ちに使用を中止し、すぐにご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへ連絡してください。
- 分解や改造はしないでください。分解・修理が必要なときはご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへ連絡してください。

故障かな？と思うような現象が発生したら、修理を依頼する前にもう一度、下記の点を確認してください。

| こんなとき      | ここを確認                                     | 直し方                                                 |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 旋回性が悪い     | 前輪についている、ワン・ツー・スリーキャスターが直進の設定になっていませんか？   | 8 ページのワン・ツー・スリーキャスターの使用方法をご確認いただき、前輪の動き方を設定してください。  |
| ブレーキの利きが悪い | ブレーキ操作を行っているとき、ブレーキシューが車輪内側にしっかり当たっていますか？ | 9 ページのブレーキ調節方法をご確認いただき、適切な位置にブレーキシューがくるように調節してください。 |
| 走行操作が重い    | 車輪にゴミやビニールがはさまっていませんか？                    | はさまっているものを取り除いてください。                                |

上記の対処をしても良くならない場合、または現象に当てはまらない場合は、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへ連絡してください。

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、  
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。  
そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品をほかの方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡してください。

TAKE CARE OF  
**Tacaof**

<http://www.tacaof.co.jp>