


専用充電台

取扱説明書

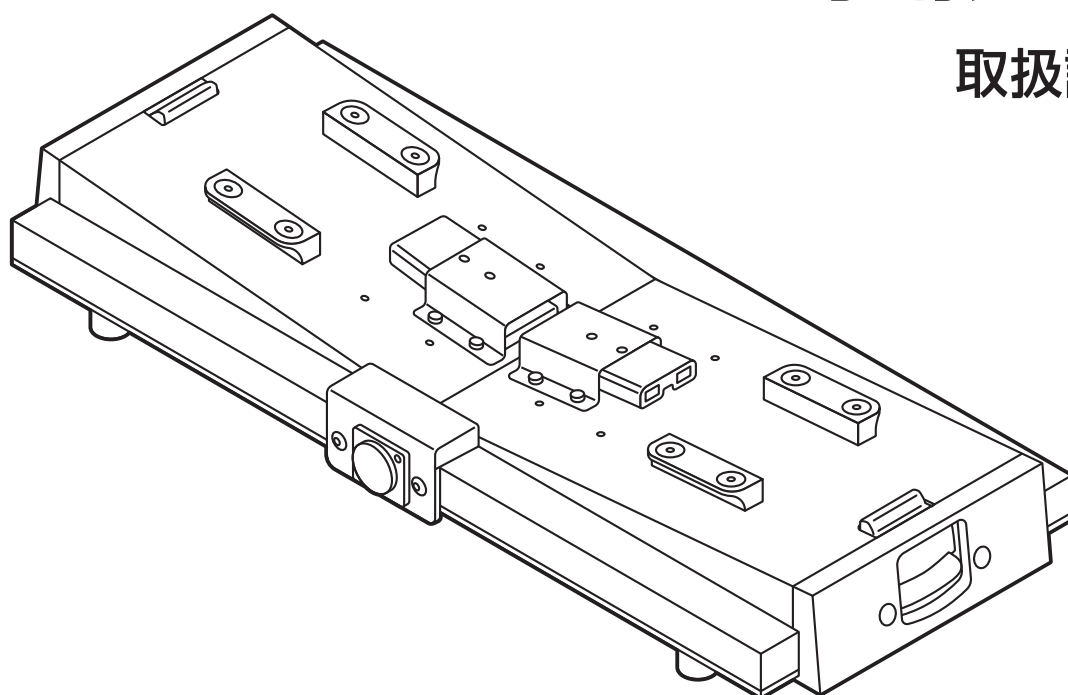

■ 製品仕様

全長	210 mm
全幅	505 mm
全高	70 mm
製品重量	約 6.0 kg
対応機種	S747/S747N
対応充電器	DC 24 V 5 A マイコン制御自動充電器 (温度補正付)
対応バッテリー	S747/S747N専用鉛蓄電池 / U1-36E-12 × 2個
充電時間	約7時間
環境条件	0℃ ~ 40℃

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただくための注意事項と使用方法を記載しています。

- 本製品はS747/S747Nの室内専用バッテリー充電台です。
- 安全のため、必ずこの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してから使用してください。
- 取扱説明書を読んだ後は、いつでも必要なときに取り出せるように、所定の場所に保管してください。
- 使用の際は本取扱説明書と併せて、S747/S747N取扱説明書をお読みください。





安全のために必ずお守りください

■ 絵表示について














この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しく使用していただき、お使いいただく方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。




誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるものです。
 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家財などの損害に結びつく可能性があるものです。
	この記号は、禁止の行為を告げるものです。（～しないでください。）
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。（～してください。）


警告

-  分解・改造・修理は絶対に行わないでください。感電やケガ、故障などの原因になります。
-  故障や異常があるときは使用しないでください。感電やケガなどの原因になります。
-  バッテリー接続端子が割れるなど破損しているときは使用しないでください。感電や故障の原因になります。
-  本製品はハンドル形電動車いすS747/S747N専用の充電台です。他の製品のバッテリーを充電しないでください。故障などの原因になります。
-  充電器や充電ケーブルは、ハンドル形電動車いすS747/S747Nに付属されているものを使用してください。他の充電器を使用すると、故障などの原因になります。
-  充電中はバッテリーを取り外さないでください。感電のおそれがあります。
-  損傷、変形のある充電ケーブル、充電プラグ、電源プラグは使用しないでください。感電・ショート（短絡）・発火の原因になります。
-  落下させる、踏みつけるなどの強い力や衝撃を与えないでください。ケガや故障の原因になります。
-  濡れた電源プラグや濡れた手で充電しないでください。感電のおそれがあります。
-  屋外や充電器が濡れそうな場所では充電しないでください。漏電や感電するおそれがあります。
-  次のような場所には保管・放置しないでください。
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・高温になる場所（火気のある場所）
 - ・湿気の多い場所
 - ・雨のあたる場所故障の原因になります。
-  子供が遊ぶような場所には保管・放置しないでください。ケガや故障の原因になります。
-  バッテリーは火気の近くに置かないでください。火災や熱による故障の原因になります。

注意

-  電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。充電ケーブルを持って引っ張ると、充電ケーブルが断線するおそれがあります。
-  周囲の温度が0℃以下の低温、または40℃以上の高温の環境下では充電しないでください。バッテリーの破損や変形、早期劣化の原因になります。
-  シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。製品を傷めるおそれがあります。

各部の名称

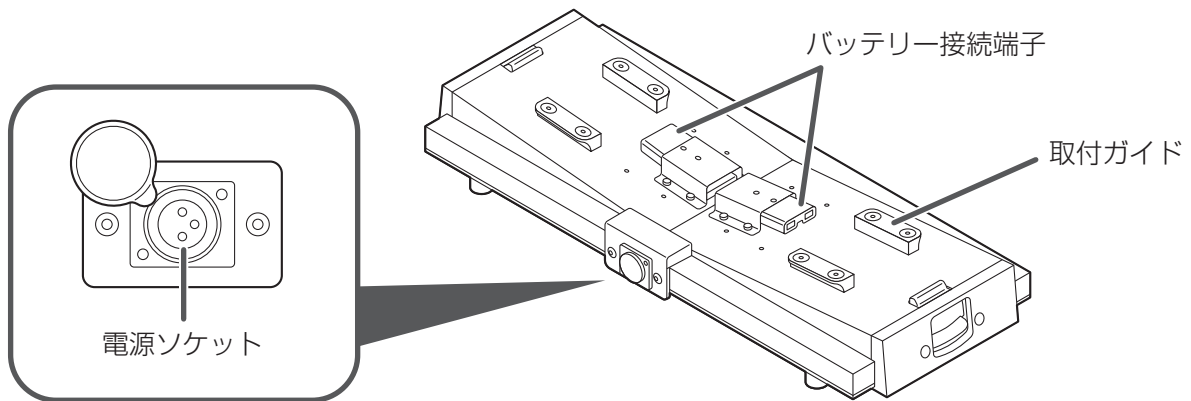


※充電器及びバッテリーは、S747/S747N 製品本体に付属しております。

使いかた

- 1 充電台の取付ガイドに合わせてバッテリーを半分ほど乗せ、矢印の方向にスライドします。

充電台の中央部までスライドしてください。


- 同様の手順で、もう 1 つのバッテリーも取り付けてください。

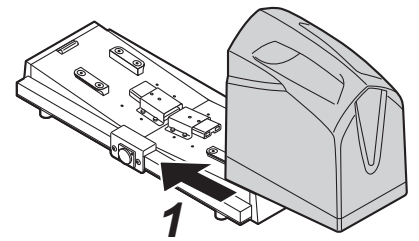

- 2 電源ソケットのフタを開けて、充電器の充電プラグを電源ソケットに挿し込みます。

- 3 充電ケーブルの電源プラグを家庭用 100 V コンセントに挿し込みます。

充電が開始され、充電器の LED ランプが橙色に点灯します。
充電が完了したら、充電器の LED ランプが緑色に点灯します。

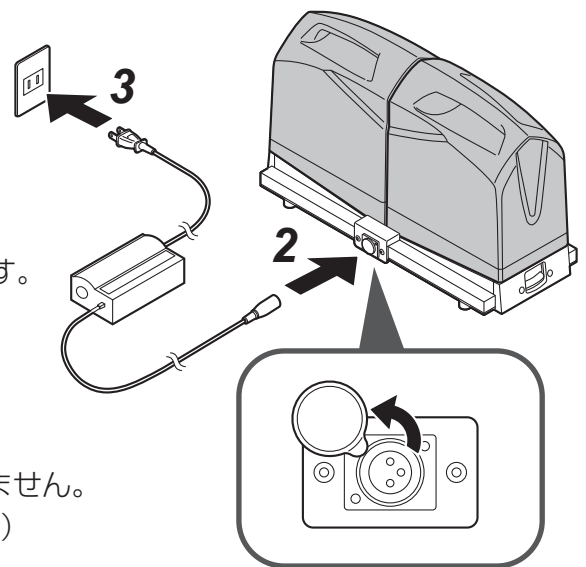

■ 充電器のLEDランプについて

橙色点灯：充電中

緑色点灯：充電完了


赤色点灯：充電プラグが電源ソケットに正しく接続されていません。

赤色点滅：充電異常 (→S747/S747N取扱説明書33ページ)

消灯：電源プラグがコンセントに挿し込まれていません。

■ バッテリーを取り外すときは

- 1 バッテリーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

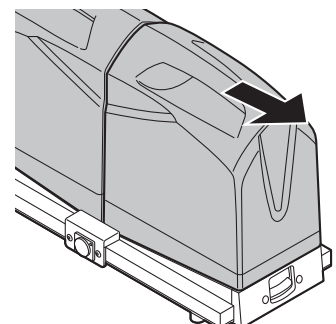

⚠ 注意

- ❗ バッテリー脱着の際は、充電台とバッテリーの隙間に指などを挟まないように注意してください。

保証書

この製品は、厳格なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受付致します。
※ 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111(代表)

型式	ハンドル形電動車いす S747/S747N 専用充電台	販売店
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から1年間	
お客様	ご住所 〒 _____ _____	
	ご氏名 _____ 様	
	電話番号 _____	

◇◇◇ 保証規定 ◇◇◇

- 保証期間内に正常なる使用状態において万一故障した場合には、無償修理致します。
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させて頂きますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
(イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。
(ニ) 電源を使用する製品においては、指定電源(日本国内仕様)AC100V 50/60Hz以外での使用や異常電圧による故障及び損傷。
(ホ) 本保証書のご提示がない場合。
(ヘ) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
(ト) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
(チ) 消耗部品の取替え及び点検等の費用。
(リ) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けることがあります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 法的責任
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合わせ下さい。
- 保証の対象
本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
- 免責
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。

修理の記録

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、お問い合わせください。

ご連絡いただきたい内容：ご住所、ご施設名、ご氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

弊社の商品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら、販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

フリーダイヤル  0120-39-2824

受付時間：月～金曜日 9時～12時、13時～17時

※土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く

製造元：フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5