

要保管

公的介護保険  
レンタル製品



BPZ series

Our BestPositionBar Continue Evolving

オプション類

# 取扱説明書

BPZ シリーズ製品共通

この度は、弊社製品をご利用くださり、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用  
ください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管し  
てください。

## 安全にお使いいただくために

- ◆この製品は BPZ・BPE シリーズ専用のオプションです。他社の製品と  
組み合わせて使用しないでください。
- ◆本製品は、手すりとしての目的以外では使用しないでください。  
手すり以外としての使用は重大事故の原因となります。
- ◆製品の設置・取り外しは必ず、販売店、施工業者が行ってください。
- ◆取り付け後、取扱説明書の十分な説明を行ったうえで、ご利用者に  
お渡しください。

## 使用上の注意

安全のため必ずお守りください。



注意

アームを無理やり回したり、上方向へ引っ張らないでください。  
本体が外れ転倒し、重大事故につながります。

ご使用の際は、すき間に手や足などが入らないように十分注意してください。  
すき間に入ると重大事故につながります。



必ず実行

利用者が自分の身体を安定させられない場合は、介助者が付き添ってください。  
転倒など、重大事故につながります。

ブラケット内側の滑り止めにヘタリや劣化が見られる場合は、滑り止めを  
交換してください。ブラケットの固定に問題が発生し、重大事故につながります。




●壁や周囲の家具などとの間隔は身体が挟まらない**十分な距離**をとるか、もしくは、身体の一部を**挟み込まない**間隔までよせるなどして、ください。転倒など不測の事態が起きた際に、重大事故につながります。




●オプション手すり類をご使用の際は、**すき間に手や脚、頭が入らないよう**に十分注意してください。すき間に入ると重大事故につながります。発生が想定される方は使用しないでください。




●手すりを**無理やり回したり、上へ引っ張ったり**しないでください。本体がズレたり回転して外れ、重大事故につながります。

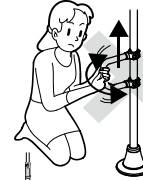


●手すりに**ぶら下がったり、上に乗ったり**しないでください。重大事故につながります。

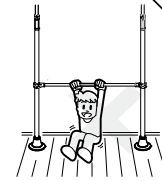


●**一度に複数人**で使用しないでください。事故の原因となります。

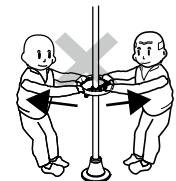


●手すりに洗濯物を干したり、物を吊り下げるなど、**別の用途に使用しない**でください。事故の原因となります。

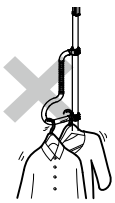


●手すりに**ロープや紐・電化製品のコード**などを結んだりひっかけたりしないでください。利用者の身体に絡まるなど、重大な事故につながります。

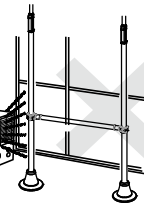

●ストーブなどの**火元や高温**にさらされる場所、加湿器のあたる場所で使用しないでください。製品の劣化の原因や、重大事故につながります。

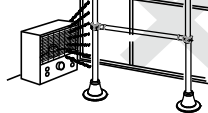

●木製品は**水のかかる場所**で使用し続けると傷んで腐食をおこし、破損や事故の原因となります。  
※ 水回りでは、耐水仕様の手すりを使用してください。

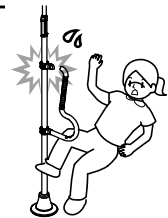

●取り外しや跳ね上げ手すりは、必ず**閉めた状態**でご使用下さい。外れていると事故の原因となります。



●手や製品が**濡れた状態**で使用しないでください。

●**改造・加工・分解等**はしないでください。




●利用者が自分の**身体を安定させられない場合は**、介助者が付き添ってください。重大事故につながります。





 <b>注意</b>	<p>●消毒などで、<b>強い薬品を塗布</b>すると、色落ちや、劣化を起こす原因となります。</p>	
	<p>●製品を<b>日光の当たる場所</b>に曝し続けると、時間経過や環境により退色や表面劣化が起こる可能性があります。</p>	
	<p>●<b>床のワックス</b>や<b>壁面・天井の壁紙ののり</b>などが湿気などにより製品に強く付着する事や変色などを発生させる可能性があります。</p>	
	<p>●利用者の使用状況の中で、<b>予測不可能もしくは危険を伴う行動を回避できない場合</b>は、使用しないでください。事前にご家族やケアマネージャー・福祉用具相談員等とよく相談してください。</p>	

## 使用時の注意事項


- ブラケットがゆるんだ状態**で使用すると、手すりの回転や破損等、重大事故の原因となります。

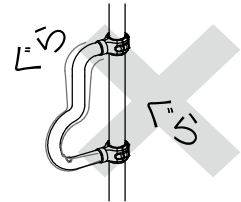


- 人や物がぶつかるなど、**強い衝撃**が加わると、本体がズレて倒れやすくなったり、傷がつくなど、事故や破損の原因となります。

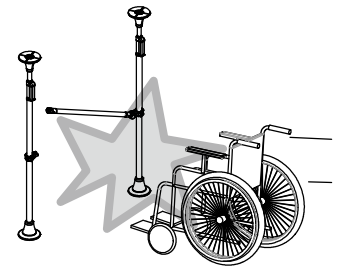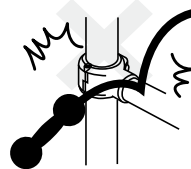


- 天井ベースの下の支柱に**赤色のラインが見えた状態**で使用されますと、本体がズレて転倒や、天井破損などの事故が発生する原因となります。

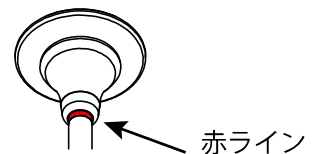

- 手すりから**異音**がしたり、**異常**が見られた際は、使用を中止してください。事故が発生する原因となります。

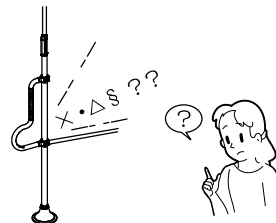

- ベースに飲料水や尿などがかかり、**濡らしてしまった場合**、製品がズれる原因となります。

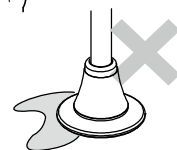

これらのような時は確認・再設置が必要です。使用を速やかに取りやめ、本誌 4 ページに記載の施工・貸与事業者へご連絡ください。(ご利用者による設置・取り外しはしないでください。)





## 警告



必ず実行

- ◆安全に使用するためには**日常点検**が必要です。
- ◆異常や不具合がみられたら、使用をおやめになり**販売・施工業者へ連絡**してください。使用を続けると、重大事故につながる恐れがあります。

## 日常のお手入れ方法

- ①日常のお手入れは、柔らかい布を水またはぬるま湯に浸し、よく絞って汚れをふき取り、その後、乾いた布で水分を十分ふき取ってください。
- ②汚れが目立つ場合は、柔らかい布を適量に薄めた中性洗剤に浸し、よく絞って汚れを拭き取った後、上記①を実行してください。

使用しないでください！



### ご利用者様へ

安全にご使用いただき、事故等を防止するため、日常点検およびお手入れは必ず行ってください。

日常点検やお手入れのなかで、ご不明な点や不具合、問題点など何か気づいたことがあれば、使用を控え、販売・施工業者へご連絡・ご相談ください。

製品の不具合やお問い合わせは、ご利用の販売・施工(貸与)業者へご連絡下さい。

販売・施工業者名

担当者

連絡先

( )

製造元 **ホクメイ株式会社**

総販売元 **DIPPERホクメイ株式会社** 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里2-4-1 TEL 06-6754-0625 Fax 06-6758-6485

■商品の仕様・説明書の内容は、予告なく変更する場合があります。