

「安寿」
ポータブルトイレ
推奨品

バケツを洗わず「すっきり」簡単片付け！

あんじゅ
安寿

ポータブルトイレ用処理袋

すっきりポイ

30枚入り



吸収シートの尿吸収量 **1,000 ml**

※吸収量は、使用状況によって減少する場合があります。

廃棄時に中身が目立たないイエローカラー

処理袋とわかりにくいシンプルなデザイン

尿だまり防止加工でしっかり尿を吸収

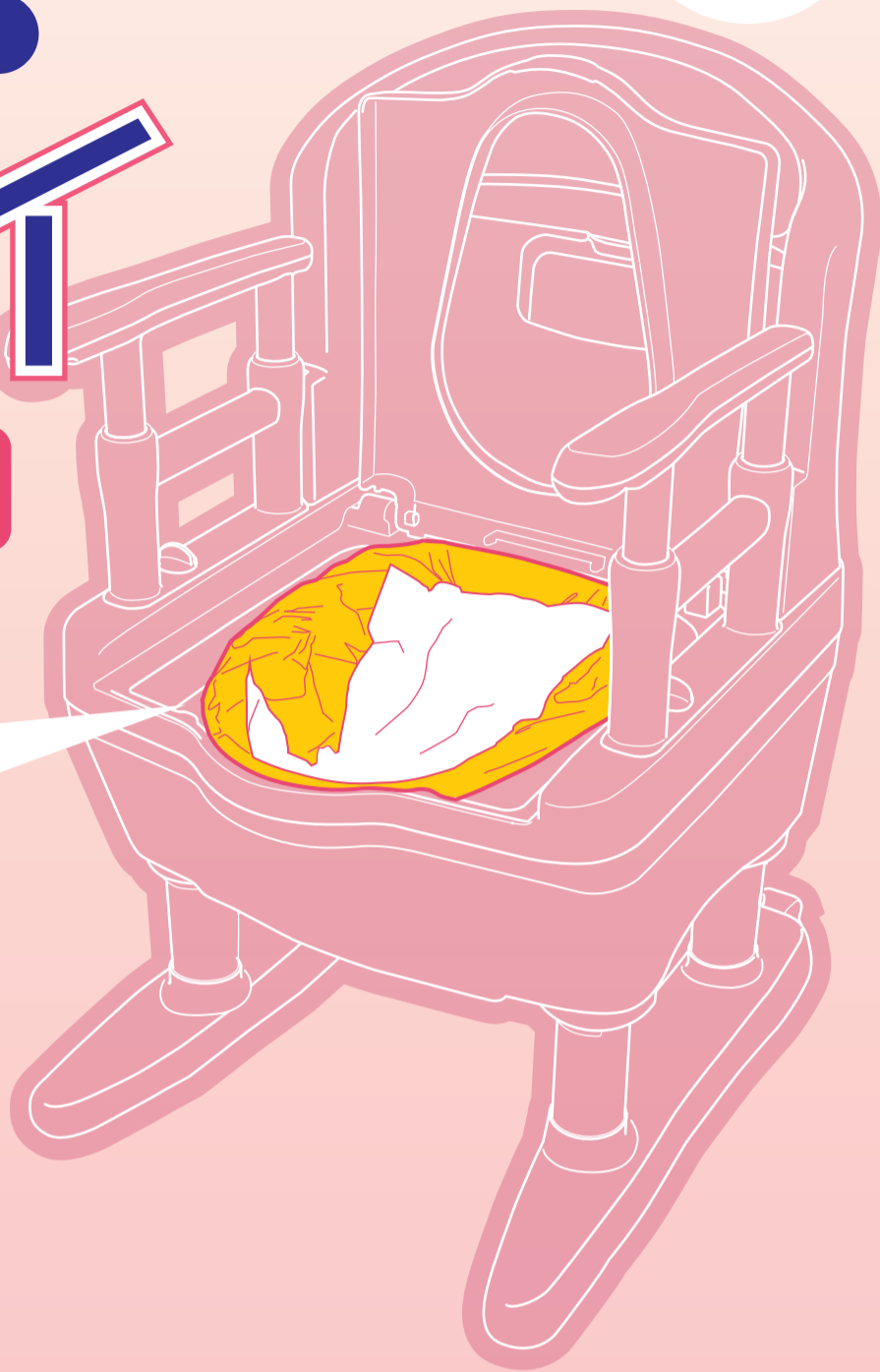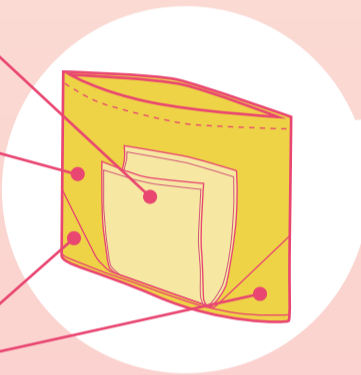

袋をバケツに取り付けて
本体にセット。

使用したら袋を取り出し
袋に付いた紐で縛って
捨てられます。



使用上の
ご注意

臭いについて

- ・バケツに水を張って使用するポータブルトイレ用消臭用品は使用することができません。
また、バケツに水を張って本製品を使用することはできません。
- ・脱臭器付のポータブルトイレは、バケツに水を張って使用することを想定しており、本製品を使用すると効果が得られない場合があります。

温水洗浄便座付ポータブルトイレを使用するとき

- ・洗浄機能を使用すると、洗浄水も吸収シートが吸収するため使用回数が大きく減少します。
- ・洗浄ノズルが本製品に接触すると洗浄機能が使えなくなったり、故障の原因になります。

その他安全上のご注意・使いかたの詳細は裏面にございます。
正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

バケツを洗わず「すっきり」簡単片付け！

ポータブルトイレ用処理袋

すっきりポイ

吸収シートの尿吸収量 **1,000 ml** | **30** 枚入り

あんじゅ
安寿



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)



紙
ヘッダー紙



袋: PE



4 970210 858202

日本製 919091-1

49173137


この製品はポータブルトイレのバケツにかぶせて使用する処理袋です。

使いかた

セッティングする

- 1 ポータブルトイレ本体からバケツを取り出し、袋を広げてかぶせます。


※袋は「まえ」と印刷している面がバケツの前側になるようにかぶせます。

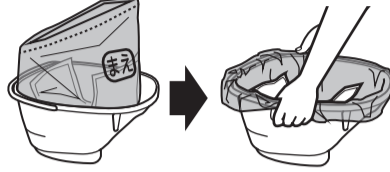

- 2 ポータブルトイレに袋をかぶせたバケツを戻し、便座を下ろします。


※袋はバケツにしっかり沿わせ、浮き上がらない状態で使用してください。

尿や便が中へしっかり入らず、周囲を汚してしまう恐れがあります。

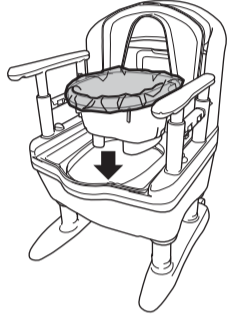

汚物を廃棄する

- 1 ポータブルトイレ本体からバケツを取り出し、袋を取り出します。

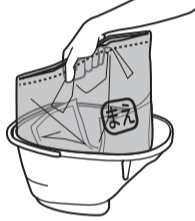


- 2 大便是トイレへ流します。

※大便是流すときは、袋の外側から吸収シートをつかんでください。

吸収シートが袋からトイレへ落下する恐れがあります。

※吸収シートから尿が垂れてくる場合がありますのでご注意ください。

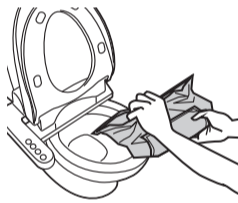

- 3 袋上部のキリトリ線に沿って切り離し、紐を作ります。



- 4 袋内部の空気を抜き、切り取った紐を二重にした状態で袋の口を結びます。

※袋の口を縛るときは、紐を二重にしてください。

二重にしないと、紐が切れて結びづらくなる場合があります。



安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防ぐためのものですので、以下の警告をお守りください。

警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

必ず行うこと

- 子どもや認知症の方の手の届かないところに保管すること
思わぬ事故の原因になります。

絶対にしないこと

- 袋をかぶらないこと
- 袋を食べたり飲み込んだりしないこと
窒息の原因になります。

- 火のそばに置かないこと
火災や思わぬ事故の原因になります。

注意 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

必ず行うこと

(温水洗浄便座付ポータブルトイレの場合)

- 洗浄ノズルの作動範囲において袋が接触しないことを確認すること

温水洗浄便座の故障の原因になります。

絶対にしないこと

- 排泄物・トイレットペーパー以外のものを袋内に入れないこと

廃棄物の形状・硬さによって袋が破け、周囲を汚す原因になります。また、尿の吸収量が低下する原因になります。

- 袋自体をトイレへ流さないこと
トイレが詰まる原因になります。

廃棄上のご注意

- 大便是トイレに流してください。
- おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。(紙オムツと同様に処理してください)

品質表示

材質	原料樹脂	【袋】フィルム：ポリエチレン
	その他	【吸収シート】 カバー：ポリオレフィン系不織布 吸水材：綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材
耐冷温度	-30℃	
枚数	30枚	
寸法	縦 420× 横 550mm (フィルム) 厚さ 0.03mm	
カラー	イエロー	