

アフターサービス

- 修理を依頼されるときは… 修理を依頼される前にこの取り扱い説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は、『お買い上げの販売店』または下記『お客様相談室』へご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容… ご住所・ご氏名・電話番号・型式名・お買い上げの販売店・お買い上げ日 故障または異常の内容（できるだけ詳しくお願いいたします。）
- お客様相談室… 弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合点がございましたら、『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』までお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時
(土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く)

製造販売元 フランスベッド株式会社

保証書

この製品は、厳重なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容により
お買い上げの販売店が受け付けています。

※ 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地

型式	光る杖 ライトケイン LC-
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から1年間
お客様	ご住所 <input type="text"/>
	販売店 <input type="text"/>
ご氏名	様 <input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>



◇◇◇ 保証規定 ◇◇◇

1 保証期間内に正常なる使用状態において万一故障した場合には、無償修理致します。
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させて頂きますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。

2 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。

(1) 使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。

(2) お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。
(3) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。

(4) 電源を使用する製品においては、指定電源（日本国内仕様）AC100V 50/60Hz以外での使用や異常電圧による故障及び損傷。

(5) 本保証書のご提示がない場合。

(6) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができない場合。

(7) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
(8) 消耗部品の取替え及び点検等の費用。

(9) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けすることがあります。

3 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

法的責任

4 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。

保証の対象

本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。

5 免責

本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。

修理の記録

フランスベッド



LC-11F～LC-21F 全長73～83cm
(5段階)

リハテック
Reha tech

ライ ト ケ イ ン
光る杖 - Light Cane -
折り畳みタイプ
取扱説明書


980810-8900

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 安全のため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せるように、大切に保管してください。

杖長さの目安

● 杖長さの目安

杖の長さの目安として、杖先を持ち手と同じ側のつま先前外方 20cm (肘を30～40度に曲げた状態)に置いた位置がよく、この状態になるように杖の長さを決めてください。

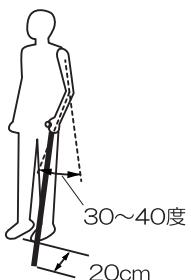

ご使用の前に


棒状杖は、杖無しで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次のような場合の使用には適しません（体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることがあるため）。また、購入時はそうではなくても次のようない状態になった場合、すぐに使用を停止してください。

- ① 杖無しでは歩行できない人
(手すりに伝わらなければ歩行できない人、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない人の使用を含む)
- ② リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない人
(医師などの指導のもとでの使用は除く)


● 本製品のライト部は、夜間外出における自動車や自転車の運転手などの視認性向上による、安全性向上を目的としております。
照明器具としては使用できません。

● 杖先ゴムの交換について

杖先ゴムを交換する場合、無理に引き抜こうとすると杖が破損する恐れがあります。

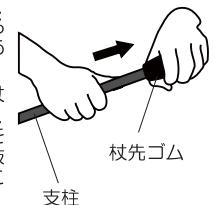

各部の名称

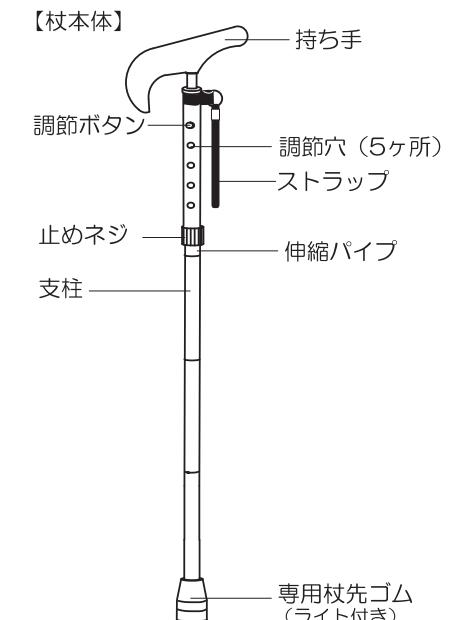

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の区分や絵表示をしています。その指示と内容は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



! 記号は、行為の強制や、指示する内容を告げるものです。

- 修理、分解、改造を行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 風呂やシャワー室では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 直射日光のある場所に長時間放置しないでください。変色、火災、感電、故障の原因となります。
- 車内に長時間放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。
- 暖房器具のそばに放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。
- 濡れた手で、専用先ゴムを分解しないでください。感電の恐れがあります。
- 道路の側溝の溝や凹みのある箇所では、杖先がはまり込む場合があるため十分注意してください。

△ 警告



- 本製品は歩行を補助するためのものです。力を入れて突いたり、全体重をかけたり、用途以外（例えば、登山用、トレーニングボール、護身用など）には使用しないでください。事故や破損の原因になります。
- 高温の場所（ストーブの近くや夏場の自動車の中など）での保管はゴムロープが劣化しやすくなる為、避けてください。また、低温の場所（寒冷地など）では折り畳んだ状態からすぐにゴムロープの弾性が回復しない事があるので、ご注意ください。
- 雨天の使用など、杖を濡らさないでください。故障の恐れがあります。
- 杖を落としたり、倒したりしないでください。故障の原因となります。

△ 注意




- 使用前に各部を点検してください。また、杖先ゴムが摩耗してきたり、劣化して外れやすくなったりした場合は、早めに取り替えてください。
- 使用前・使用中に支柱の継ぎ目や伸縮パイプなどが確実に固定されていることを確認してください。
- ゴムロープのゆるみ、損傷等の異常があるときは、製造メーカーにお問い合わせください。
- 身体に合った杖を選んでください。
- 濡れた、または凍った路面は滑りやすいため注意してください。
- 専用先ゴムに電池が使われています。本製品を廃棄される場合には、地域の条例に基づいて廃棄してください。

使用方法


【長さ調節】

- ① 止めネジを緩めてください。
- ② 調節ボタンを押しながら伸縮パイプを適度な長さに合わせてください。調節ボタンは自動的に調節穴に入ります。穴は5カ所です。
- ③ 穴に調節ボタンが入ったことを確認し、止めネジをしっかりと締めてください。

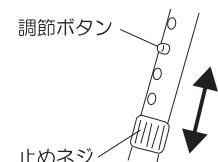

【折り畳み】

- ① 両手で支柱の切れ目を挟んで支柱を握り、外側に向けて引っ張ってください。
- ② 支柱の中のゴムロープが見える程度に支柱同士が離れたらそのまま下に向けて折り畳んでください。
- ③ 杖を使わずに持ち歩く際は、カバーに入れて広がらないようにしてください。

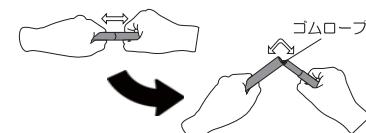

使用方法

【絶縁体の除去方法】


- 初めて使用するときには必ず絶縁体の除去を行ってください。

出荷時には絶縁体が差し込まれてありますので、開梱後は右図の絶縁体を引き抜いてください。絶縁体が差し込まれたままで、ライトは点滅しません。



【杖の握り方】

- 人差し指と中指の間に杖の支柱を挟んで、持ち手を握り、支柱に真っすぐ体重がかかるようにします。

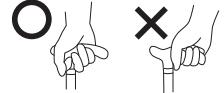

【専用杖先ゴムのライトの点滅・消灯方法】

- 専用先ゴムにはセンサーが内蔵されております。周囲の暗さを感じし、杖に振動を与えると約1.5秒ほど点滅します。スイッチはありませんので、明るい場所では自動的に消灯します。



△ 注意 専用杖先ゴム（ライト付き）の交換時期について

- 専用杖先ゴム（ライト付き）のライトは、通常の使用で約1年程度の電池寿命を想定しております。
- 使用前に暗所で杖を突くなどして、ライトが点滅する事を確認し、ライトが点滅しなくなった場合は杖先ゴムを交換してください。
 - 杖先ゴムのライトが点滅する場合でも、杖先ゴムが摩耗したり、劣化して外れやすくなつた場合は滑りやすくなり大変危険ですので、早めに新品の専用杖先ゴム（ライト付き）に取り替えてください。
 - 先ゴムの交換については、お買い求めの販売店、もしくはお客様相談室へお問い合わせください。



お手入れ方法・保管方法

- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め布に染み込ませ、硬く絞って拭き、自然乾燥させてください。直接水洗いしたり、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。万一濡れた場合は速やかに拭き取り、自然乾燥させてください。
- 使用後は直射日光の当たらない、高温にならない、湿気の少ない場所で保管してください。

仕様

型式	LC-11F	LC-12F	LC-13F	LC-14F	LC-15F	LC-16F	LC-17F	LC-18F	LC-19F	LC-20F	LC-21F
材質	支柱/伸縮パイプ 杖先ゴム	木材 アルミニウム	木材 カーボンファイバー	樹脂 アルミニウム	樹脂 天然ゴム、アクリル樹脂	木材 天然ゴム、アクリル樹脂	木材 天然ゴム、アクリル樹脂	木材 天然ゴム、アクリル樹脂	木材 天然ゴム、アクリル樹脂	木材 天然ゴム、アクリル樹脂	木材 天然ゴム、アクリル樹脂
全長 cm (5段階)	約73~83										
重量 g	約305	約305	約300	約300	約320	約320	約335	約335	約300	約300	約315
専用杖先ゴム 寸法	差し込み部内径15mm 全幅36mm 全高60mm										
生産国	台湾										

電気的仕様 専用杖先ゴム（ライト付き）

電源	形式	コイン形リチウム電池 CR2032×2個
	容量	3V/220mAh
動作時間		約1年(1日1時間程度の暗所での使用を想定)
発光の条件(照度)		3LUX~18LUX以下
発光の条件(振動)		瞬間荷重0.25kgに相当する振動を0.1秒間継続