

ラクリーンバッグ 楽とし

【使用方法】

1 吸収パッド



袋を開き、ポータブルトイレのバケツにかぶせ、吸収パッドが底面にくるようにセットします。

2




袋をかぶせたバケツをポータブルトイレにセットします。

3



セット後、便座を下ろして使用します。

4

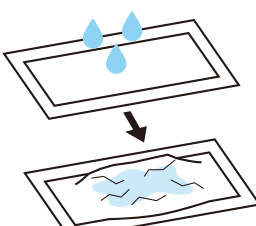

使用后、尿が吸収パッドによりジェル化します。

5



使用後は袋についているヒモの両端を引っ掛けてください。

6 さらに密閉



引っ張り出したヒモは、感染防止などのために、開口部の周囲を一周させて固く縛って密閉することをおすすめします。

【特長】

- ポータブルトイレのバケツに袋を取り付けることで、排泄物の後処理が簡単にできます。
- 巾着タイプなので、簡単に処理できます。

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外での使用はしないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 高温多湿を避けて保管してください。
- 袋にキズをつけないでください。
- 吸収回数は排尿量によって異なります。
- 吸収量を超えるとジェル化できなくなります。
- 大便是ジェル化しません。排便後は速やかに処分してください。
- 本品をトイレに流さないでください。
- 再使用はしないでください。
- 処理方法はお住まいの地域のルールにしたがってください。

■品質表示

材質	袋、ヒモ：ポリエチレン 吸収パッド：不織布・ ポリアクリル酸ナトリウム・セルロース
耐冷温度	-20℃
入数	袋：30枚、吸収パッド：30枚
サイズ	袋：59×42cm 厚さ：0.4mm 吸収パッド：51×21cm 厚さ：3mm
吸収量	680mL

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA