

お手入れ方法

- 汚れが付着した場合は、柔らかい布に水又は水で薄めた中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭き取ってください。水で薄めた中性洗剤を使用した場合は水拭きしていただき、仕上げて乾いた布で拭き取ってください。
- グリップ部（上部&下部：ポリウレタン）は交換できますので、破損したり汚れた場合は、お買い上げ販売店等にご相談ください。
- 本製品には、シンナーやベンジン等の揮発性溶剤を使用しないでください。劣化、破損、変色、変形の原因となります。
- 金属ブラシやナイロンたわしなどは傷をつけるため使用しないでください。
- 先ゴムの摩耗が著しい場合は、新しい交換用先ゴム（別売り）に交換してください。

保証書

保証基準（内容）

- 1、この商品の保証期間はお求めの日より1カ年です。
- 2、保証期間内には、部品の欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償修理いたします。使用者の責任によるものは実費修理といたします。
- 3、次の項目は無償サービスから除外されます。
 - A.自然劣化（お手入れ方法を参照してください。）
 - B.製品全体の傷や汚れ
 - C.間違った使い方や手入れ不良によるもの
 - D.先ゴムの摩耗などの消耗品
 - E.使用者の改造変更によるもの
 - F.災害、事故などによるもの
 - G.実費修理に要する運賃などの諸経費
- 4、一度使用したものは原則として製品のお取り替えは出来ません。
- 5、製品についての各種お問い合わせは、お求めの店またはメーカーに直接お問い合わせください。

ご購入年月日

年

月

ご購入販売店名

ご購入販売店住所（〒

)

TEL;

(



歩行補助杖 リハステッキ® サイド 伸縮

ホワイト

取扱説明書No.23-0901

品番：WB5269



取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品は屋内で歩行及び立ち座りを補助していただけるように設計製造されております。

ご使用の状態によっては危険なこともありますので、十分注意の上ご使用ください。

安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

目次

- 安全上のご注意..... 1
- 製品全体図及び部品名称..... 2
- 使用方法..... 3
- お手入れ方法..... 4
- 保証書..... 4

安全上のご注意（必ずお守りください）

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用いただくために特に注意していただくことを表示してあります。ご使用前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

- 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

- この取扱説明書をご使用前に必ず最後までお読みになり、いつでも見る事ができる場所に大切に保管し、必要な時にご利用ください。
- 不明な点や不都合な点がございましたら、弊社、または、ご購入店までお問い合わせください。

フジホーム株式会社

東京都中央区新川 2-12-15 ヒューリック八丁堀ビル 7 階

TEL : 03-3523-1631 FAX : 03-3523-1632

※製品は、改良のために仕様を予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



- ①本製品は屋内で歩行を補助する歩行補助杖です。屋外での使用や、用途以外のご使用は絶対におやめください。
- ②滑りやすい所や濡れた所では使用しないでください。
- ③本製品は使用時の正しい方向（向き）があります。方向（向き）を間違えて使用すると転倒など危険な場合がありますので本書の「使用方法」を必ずご確認ください。
- ④階段や段差のある場所でご使用の場合は、杖先ゴムが全て設置しているかを確認してご使用ください。設置していない場合は転倒等の危険な場合があります。
- ⑤本製品の耐荷重は100kgです。耐荷重を超える状態では使用しないでください。
- ⑥本製品の改造・分解は絶対に行わないでください。
- ⑦本製品の破損や変形などがある場合は、使用しないでください。




ご使用前の注意（点検）

ご使用前に必ずご自身で点検を行うようにしてください。点検をせずご使用になると、事故・怪我・故障の原因となります。

- ①杖先ゴムにひび割れや劣化及び摩耗していないかを確認してからご使用ください。
- ②グリップ上部及び下部に破損やゆるみが無いか確認してからご使用ください。

製品全体図及び部品名称と仕様

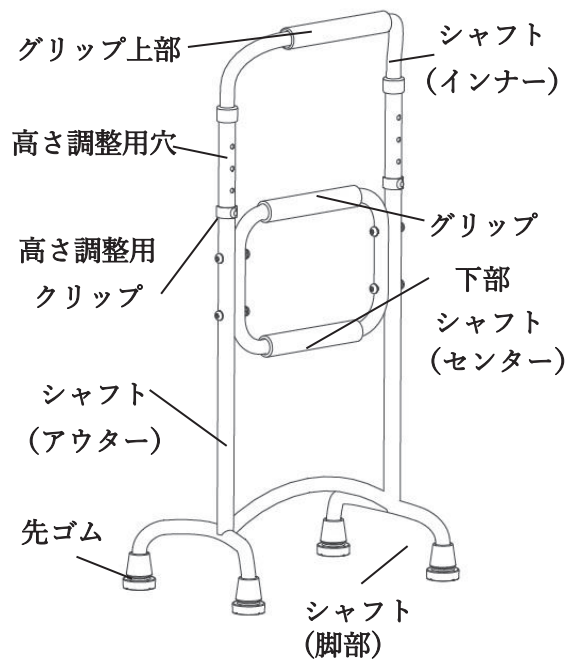

サイズ		幅39.5cm×奥行26.5cm
高さ		78-87cm（4段階3cmピッチ） 脚部高さ8cm（最大）
対応身長		約150～168cm
材質	シャフト	アルミニウム（アウターφ22mm、 インナー・センター・脚部φ19mm）
	グリップ	ポリウレタン
	先ゴム	合成ゴム（φ19mm用）
商品重量		1.1kg
最大使用者荷重		100kg
原産国		中国

使用方法

■歩行時：右手と左手で使用する方向（向き）が異なります。



- ・グリップの向き及び脚の出幅が短い方が内側になるようにして使用ください。

※逆の方向（向き）で使用すると転倒の危険がありますので絶対にしないでください。

【右手で使用する場合】

【左手で使用する場合】

【両手で使用する場合】

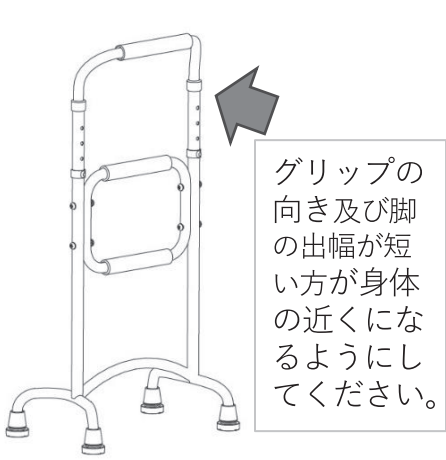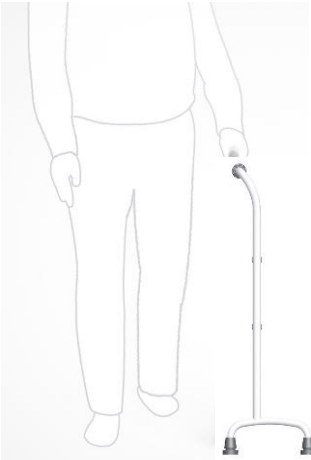


- ・全ての杖先ゴムが床に設置するように使用してください。

■立ち座り時：必ず両手でグリップを握って使用してください。

- ・グリップの向き及び脚の出幅が短い方が内側（身体に近い方）になるように使用してください
- ・必ず両手（グリップと補助グリップ）で使用してください。

※逆の方向（向き）で使用すると転倒の危険がありますので絶対にしないでください。

※片手で使用すると転倒の危険がありますので絶対にしないでください。

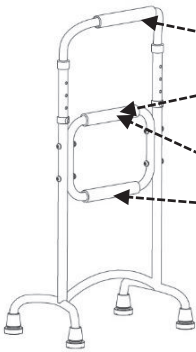

※椅子等からの立ち座り時

- ・グリップ上部とグリップ下部を両手で握って使用する。

※低いソファやベッド等からの立ち座り時

- ・グリップ下部2本を両手で握って使用する。

■高さ調整方法

- ・高さ調整用クリップを両手で外して、シャフト（インナー）を持ち上げて、適正な位置の高さ調整用穴に合わせて、クリップを差し込んでください。
- ・高さ調整用クリップを外す場合、工具類は使わずに必ず手で外してください。
- ・高さの目安は下記表を参考にしてください。

穴位置	商品高さ	身長（目安）
一番上	87cm	163-168cm
上から二番目	84cm	158-163cm
下から二番目	81cm	154-158cm
一番下	78cm	150-154cm

