

TY132 ロフストランドクラッチ 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。下記の取扱説明をお読みいただき、安全にまた末永くご愛用賜われますようお願い申し上げます。

ロフストランドクラッチの耐用年数は4年となっております。4年経過後、ご使用される場合は販売店にて点検して頂きますようお願いいたします。

〔特長〕

- ・アルミ製で軽くて丈夫で使い易い。
- ・表面仕上げは高級アルマイト仕上げで、美しい品質を保持します。
- ・プッシュボタン式で自由に長さを変えられます。

〔安全にご使用していただくためのご注意〕

取扱説明書は必ず読み、読んだあと保管して下さい。

①握りの高さ調整の仕方

- ・がた止めナットを緩める。
- ・プッシュボタンを押しながら内側パイプを伸縮して長さを決めてください。
- ・プッシュボタンがカチッと音がして穴に入ったことを確認してください。
- ・がた止めナットを軽く締めてください。
(締めすぎるとナットが破損することがあります)

②握りからカフまでの高さ調整の仕方

- ・プッシュボタンを押しながらカフを持ち伸縮して長さを決めてください。
- ・プッシュボタンがカチッと音がして穴に入ったことを確認してください。

⚠ 注意

- ・使用前に各部を点検した後、使用してください。
- ・内側パイプが確実に固定されていることを確認して使用してください。
- ・プッシュボタンの頭が穴より出ていない、がた止めナットが破損している等の異常があるときは、販売店等に申し出てください。
- ・先ゴムが破れたり、摩耗したり等の異状があるときは直ぐに交換してください。
- ・滑りやすい路面での使用はしないでください。
- ・身体にあった杖をお選びください。
- ・登山用、護身用等には使用しないでください。
- ・保管方法は、立て掛けて日陰にて保管してください。
- ・正しい姿勢で使用するため医師または理学療法士などの専門家に相談してください。

〔先ゴム交換部品〕 専用先ゴムをご使用ください。

先ゴム：TY132B-1 黒色 TY132LB-1 茶色

製造・発売元 日進医療器株式会社

本社	〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2 TEL 0568-21-0635 FAX 0568-23-2787
東京営業所	〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14 TEL 03-3814-0923 FAX 03-3814-4644
大阪営業所	〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里6-16-10 TEL 06-6323-8265 FAX 06-6326-2554
九州営業所	〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8 つるまる堂ビル1F TEL 092-513-5036 FAX 092-513-5038

