

- コンパクトにたたためて携帯にも便利なシリコンゴム製の入れ歯ケースです。
- フック掛けができるので洗浄・乾燥時に便利です。

使用方法

<使用時>

フタを外し、本体後ろからつまみ(フック穴部)を引き上げます。
 ※本体内側の一番上の折りたたみ線が150mlの目安になります。

つまみ
 (フック穴部)



内容量150mlの目安線



<収納時>

本体の上から押し、完全にたたまれてからフタをかぶせます。



完全にたたまれた状態



注意

- 本品は密閉容器ではありません。
- 用途以外での使用はしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 薬剤などにより本体に色がつくことがあります。品質上の問題はありません。
- 初期状態ではシリコンゴム特有の臭いがありますが、徐々に弱くなっていきます。また、衛生上の心配はありません。
- 柔らかい素材の為、持ち運び時に容器が変形して内容物がこぼれないよう注意してください。
- 汚れがついた場合は、中性洗剤で洗ってください。
- たわし、または、みがき粉でみがくと、キズがつくおそれがあります。
- 容器を持ち上げるときは、必ず本体をお持ちください。
- 入れ歯洗浄を行う際は、入れ歯洗浄剤の取扱方法、使用上の注意にしたがってください。
- 洗浄中はフタは軽くのせてください。携帯時は紛失防止のため、フタと本体はしっかりとめ込んでください。
- 食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

材質 本体:シリコンゴム
 フタ:ポリプロピレン
 耐熱温度 本体:140℃
 フタ:100℃
 容量 260ml



使っていいね! 入れ歯ケース



4 973655 184615