

## アフターサービス

- 修理を依頼されるときは… 修理を依頼される前にこの取り扱い説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は、『お買い上げの販売店』または下記『お客様相談室』へご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容… ご住所・ご氏名・電話番号・型式名・お買い上げの販売店・お買い上げ日・故障または異常の内容（できるだけ詳しくお願ひいたします。）
- お客様相談室… 弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合点がございましたら、『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』までお問合せください。

フリーダイヤル ☎ 0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時  
(土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く)

製造販売元 フランスベッド株式会社

### 保証書

この製品は、厳重なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受け付けています。  
※ 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。  
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

フランスベッド株式会社  
〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5  
TEL 042(543)3111(代表)

型式	光る杖 ライトケイン LC-	EN
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 1年間	
お客様	ご住所	〒
ご氏名	様	
電話番号		

販売店
-----

### ◇◇◇ 保証規定 ◇◇◇

- 保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合には、無償修理致します。  
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させて頂きますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。  
(イ) 使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。  
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。  
(ニ) 電源を使用する製品においては、指定電源（日本国内仕様）AC100V 50/60Hz以外での使用や異常電圧による故障及び損傷。  
(ホ) 本保証書のご提示がない場合。  
(ヘ) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができない場合。  
(ト) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。  
(チ) 消耗部品の取替え及び点検等の費用。  
(リ) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けことがあります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 法的責任  
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。
- 保証の対象  
本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
- 免責  
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。

修理の記録

## フランスベッド

Light Cane 光る杖  
ライトケイン

LC-24EN 全長65.5~70.5cm  
LC-25EN 全長65.5~70.5cm

リハテック  
Reha tech


### ご使用の前に

棒状杖は、杖無しで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次のような場合の使用には適しません（体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることがあるため）。また、購入時はそうではなくても次のような状態になった場合、すぐに使用を停止してください。

- ① 杖無しでは歩行できない人  
(手すりに伝わらなければ歩行できない人、介助者に手伝つてもらわなければ歩行できない人の使用を含む)
- ② リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない人  
(医師などの指導のもとでの使用は除く)

- 杖先ゴムの交換について  
杖先ゴムを交換する場合、無理に引き抜こうとする杖が破損する恐れがあります。

図のように杖先ゴムを靴で押さえ、杖の支柱を持って上に引っ張り上げて抜いてください。

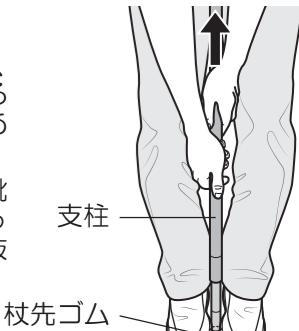

### 光る杖 - Light Cane - 取扱説明書


980800-8901

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 安全のため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せるように、大切に保管してください。

### 杖長さの目安

#### ● 杖長さの目安

杖の長さの目安として、杖先を持ち手と同じ側のつま先外方 20cm (肘を 30～40 度に曲げた状態) に置いた位置がよく、この状態になるように杖の長さを決めてください。

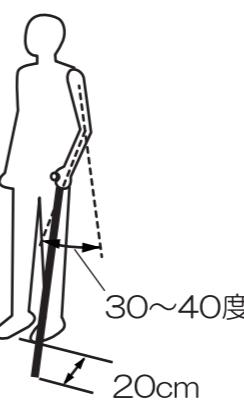


### 各部の名称

#### 【杖本体】

### ！注意

丸いボタンは電源スイッチです。  
引張らないでください。故障の原因になります。

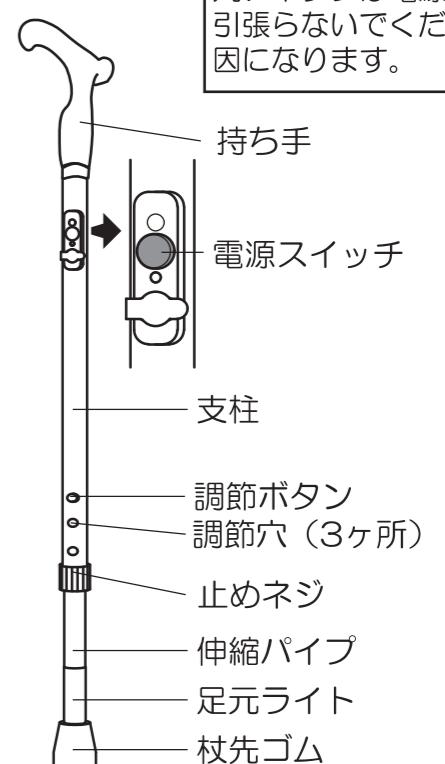

## 安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の区分や絵表示をしています。その指示と内容は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



! 記号は、行為の強制や、指示する内容を告げるものです。

### 警告

- 修理、分解、改造を行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 風呂やシャワー室では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 直射日光のある場所に長時間放置しないでください。変色、火災、感電、故障の原因となります。
- 車内に長時間放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。
- 暖房器具のそばに放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。
- 濡れた手で、ACアダプタの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。



### 注意

- 杖本体が熱くなったり異臭がする場合には直ちに使用を中止してください。
- 道路の側溝の溝や凹みのある箇所では、杖先がはまり込む場合があるため十分注意してください。
- 本製品は歩行を補助するためのものです。力を入れて突いたり、全体重をかけたり、用途以外（例えば、登山用、トレッキングポール、護身用など）には使用しないでください。事故や破損の原因になります。
- 雨天の使用など、杖を濡らさないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたりしないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- 電源スイッチを爪や先の尖ったもので押したり、必要以上に強く押したりしないでください。ボタンが破損するなどの原因となります。
- 杖を落としたり、倒したりしないでください。故障の原因となります。
- 使用前に各部を点検してください。また、杖先ゴムが摩耗してきたり、劣化して外れやすくなったりした場合は、早めに取り替えてください。
- 使用前・使用中に支柱の継ぎ目や伸縮パイプなどが確実に固定されていることを確認してください。
- 持ち手に変形や白化が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 身体に合った杖を選んでください。
- 濡れた、または凍った路面は滑りやすいため注意してください。
- リチウムイオン電池が使われています。本製品を廃棄される場合には、地域の条例に基づいて廃棄してください。




## 長さ調節方法

- 止めネジを緩めてください。
- 調節ボタンを押しながら伸縮パイプを適度な長さに合わせてください。  
調節ボタンは自動的に調節穴に入ります。穴は3カ所です。このとき伸縮パイプは最後まで引き抜かないでください。

### 注意

伸縮パイプは最後まで引き抜かないでください。  
中のコードが破損する恐れがあります。

- 穴に調節ボタンが入ったことを確認し、止めネジをしっかりと締めてください。

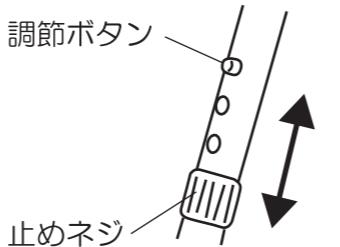

## お手入れ方法・保管方法


- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め布に染み込ませ、硬く絞って拭き、自然乾燥させてください。  
直接水洗いしたり、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。  
万一濡れた場合は速やかに拭き取り、自然乾燥させてください。
- 使用後は直射日光の当たらない、高温にならない、湿気の少ない場所で保管してください。

## 使用方法

- 初めて使用するときには必ず充電を行ってください。

### 充電方法

充電口キャップを外し、充電口にACアダプタのプラグをしっかりと差し込みます。電源プラグを電源コンセントに差し込みます。充電表示ランプが赤色に点灯します。点灯しない場合は満充電の状態です。充電完了後は、充電口に充電口キャップを確実にめでください。尚、充電口にプラグを差している状態では電源は入りません。

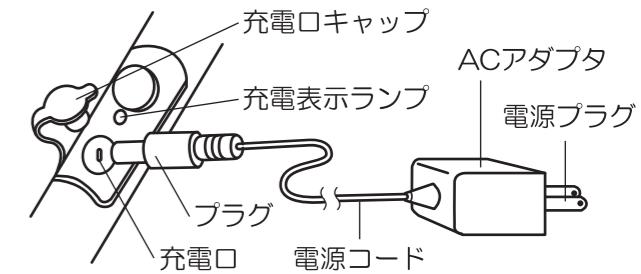

### 杖の握り方


人差し指と中指の間に杖の支柱を挟んで、持ち手を握り、支柱に真っすぐ体重がかかるようにします。  
また、本製品は右図のように持ち手を縦に握れる構造になっております。



### 足元ライトの点灯・消灯方法

電源スイッチを2秒以上長押しすると杖先の足元ライトが点灯します。再び2秒以上長押しすると消灯します。

- 足元を明るく照らしながら歩行することができます。
- 自動車や他人に自分の存在を知らせることができます。

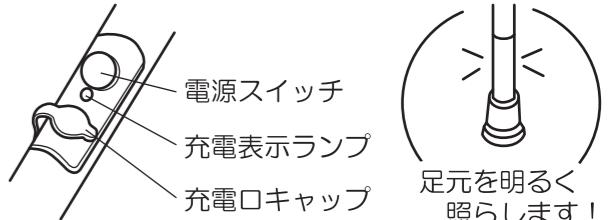

### 充電状態（青色光と点滅）について

- 電源スイッチ長押し後、すぐに光る場合はほぼ満充電です。
- 電源スイッチ長押し後、青く光ってから白色光に変わるのは充電が約半分の状態です。  
早めの充電をお勧めします。
- 足元ライトが点灯中に青と白が交互に点滅を開始した場合、充電が切れる注意信号です。  
すぐに充電してください。尚、点滅開始後約30分間は点滅します。

## 仕様

型式		LC-24EN	LC-25EN
材質	持ち手		樹脂
	支柱		
	伸縮パイプ		アルミニウム
	足元ライト	ポリカーボネイト、LED	
	杖先ゴム	天然ゴム	
全長 cm (3段階)		約 65.5~70.5	
重量 g		約 350	
杖先ゴムサイズ		5/8 (19 mm) 用	
電気的仕様			
電源	形式	リチウムイオン充電池	リチウムイオン電池が使われています。本製品を廃棄される場合には、地域の条例に基づいて廃棄してください。
	容量	3.7V / 750mAh	
	動作時間	約 8 時間	
	充電時間	約 3 時間	



### ACアダプタ 定格

定格入力	AC100V-240V 50/60Hz 0.2A
定格出力	DC5V 1A max5W
寸法 mm	27.8 × 47.9 × 26.5
電線長さ m	1.8
重量 g	80