

マットレス MPT-75B 取扱説明書

MPT-75B-91





このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。




 注 意	この記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (～してください)	 禁 止	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 (～しないでください)	 絵表示	この記号は絵表示に対する行為を禁止する内容を告げるものです。
--	--	--	---	--	--------------------------------


ご使用にあたり

●床ずれ予防について

本製品のみでは床ずれ予防できません。床ずれになる原因は体圧の負荷だけでなく、使用者の栄養状態や室内環境、背上げ時のずれやこすれ、体位変換の回数等様々な要因が重なっています。床ずれ予防については、医師、看護師などの専門家にご相談ください。



 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。
重いものを長時間同じ状態で乗せないでください。 マットレスの復元力が低下する恐れがあります。	 注 意
ラテックスアレルギーの方は、医師等に相談の上ご利用ください。 ラテックスアレルギーの方は、直接ラテックス中材に触らないでください。	
失禁や出血等でマットレスが汚れた場合は、できるだけ速やかに拭き取り、カバーを外して洗濯をし、乾燥させてから使用してください。 カビの発生や衛生面に影響を及ぼすことがあります。	
マットレスを移動させる際は、人や重いものを乗せていない状態で移動してください。 転落してケガをしたり、マットレスの破損の原因になります。	
マットレスを持つ際は、表面のカバーのみを持たないでください。 カバーが破れたり、マットレス破損の原因になります。	

<div><div></div><div>警告</div></div> <div>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。</div>	
<div>当社の介護・メディカルベッド用以外には使用しないでください。</div> <div>大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</div>	
<div>マットレスの上で、飛び跳ねないでください。</div> <div>ケガや破損の原因になります。</div>	<div></div>
<div>マットレスの上で、喫煙をしないでください。</div> <div>火災等の原因になることがあります。</div>	<div></div>
<div>マットレスの近くでストーブやお線香等を使用しないでください。</div> <div>火災になる恐れがあります。</div>	
<div>このマットレスは大人用です。</div> <div>12歳以下の子供、新生児、幼児などは使用しないでください。</div> <div>また、取扱説明書、各注意ラベルの内容が理解できない人には使用させないでください。</div> <div>思わぬ事故の原因となります。</div>	
<div>うつぶせ寝では使用しないでください。</div> <div>うつぶせ寝をすると窒息する恐れがあります。</div>	
<div>マットレスは必ずシーツ等の敷物を被せて使用してください。その際、シーツ等の敷物はできる限り薄いものを使用し、シワができないようにセットしてください。</div> <div>敷物を使用しない場合、使用感や衛生面に影響を及ぼすことがあります。</div> <div>また、厚い敷物を使用すると体圧分散性が低下する恐れがあります。</div>	



禁 止

設置・保管上の注意

<div><div></div><div>注意</div></div>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
直射日光の当たる場所はお避け下さい。 変形、変色、劣化の原因になります。		<div><div></div><div>注 意</div></div>
使用しないときは、突起物のない平らな場所に保管してください。 破損や劣化の原因になります。		

仕様

寸法	MPT-75B-91	幅 890 ×長さ 1950 ×厚み 75 mm	重量	約13.2kg
	MPT-75BS-91	幅 910 ×長さ 1810 ×厚み 75 mm		約12.5kg
	MPT-75BL-91	幅 910 ×長さ 2090 ×厚み 75 mm		約14.5kg
カバー	表 面	ポリエステル 100% (ポリウレタンフィルム)	性能	制菌性 撥水性 防水性
	裏 面	ナイロン 100%		透湿性 防水性
中材	天然ラテックスフォーム			
マルチポジション対応マットレス		MPT-75B-91 (ギャッジ・サイドアップ・リクライニング・シーティング・スタンディング)		

お手入れの方法

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害の発生が想定される内容を示します。

当マットレスはカバーとマットレス中材を一緒に洗浄できません。
カバーとマットレス中材、各々のお手入れの方法にしてください。



カバーのお手入れ


- ファスナーは閉じて洗濯してください。
- 変色の原因となりますので、直射日光はお避けください。
- 洗濯の際に多少色落ちする可能性がございますので、単独で洗濯してください。
- 長時間水に濡れたまま放置あるいは、摩擦しないでください。
- 蛍光増白剤入りの洗剤は、使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤は、使用しないでください。
- 乾燥機は、使用しないでください。

マットレス中材のお手入れ

- マットレス中材の消毒は、汚れた箇所をアルコール等噴霧し、乾いたタオルで叩くように拭きとる方法をお勧めします。
マットレス洗浄、オートクレーブ、滅菌器(オゾン滅菌等)は使用しないでください。
※高圧洗浄機、高回転脱水機など業務用の洗浄・ガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。
- マットレス中材には、オゾン消毒等は使用しないでください。劣化の原因となります。
- 天日干しは避けてください。
- マットレス中材は、表面カバー交換時以外は表面カバーから取り出さないでください。
- マットレス中材を乾燥する場合、乾燥温度70-80℃を推奨しております。
- マットレス中材には、製造上必要なピンホールと呼ばれる穴が無数に空いております。
※天然素材のため、穴の位置や柔らかさには若干の個体差がございますが、品質や寝心地には全く問題ありません。



弊社製品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げの販売店又は下記フリーダイヤルにお問い合わせ下さい。

 **フリーダイヤル 0120-083413**

フランスベッド株式会社

商品保証書

商品名型式 _____

保証期間 お買上げの日より 1年間 _____

お買上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

ご住所 〒 _____

お名前 _____ 様

電話番号 _____

この製品は、厳格なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買上げの販売店が受け付け致します。

※修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼ください。

販売店

保証規定

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、
万一故障した場合には無料で修理いたします。
お買上げ日は納品書又は領収書の日付で
確認させていただきますので、保証書とともに
紛失しないよう保管願います。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に
保管してください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修
理となります。
- (ロ) お買上げ後の転落、落下などによる故障
及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、塩害、落雷、異常電圧及び
その他天災地変などによる故障及び損傷。
(ニ) 本保証書のご提示がない場合。
(ホ) 本来の目的以外に使用された場合の故障
及び損傷。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

販売業者
フランスベッド株式会社
東京都昭島市中神町1148番地5

製造業者
グローバル産業株式会社
神奈川県三浦郡葉山町一色1770