

洗浄用ボトル シャワぞう

洗浄用ボトル シャワぞう

ベッド上での洗浄に最適。
洗髪やおむつ交換、ポータブルトイレ
使用時に便利です。

- ノズルが切替えでき、シャワーとストレートの噴射パターンが選べます。
- 止水機能が付いており、携帯時にもれにくくなっています。
- ジャバラ付ノズルで、洗浄角度が変えられます。



使い方

1. キャップを外して、ぬるま湯(30~40℃)を入れてキャップをしっかり閉めます。



2. ノズルを回し、噴射パターンを選びます。



3. ノズルの向きを調整し、本体中心部を押して洗浄します。

ジャバラ部分を曲げることで、
ノズルの角度を変えられます。



※ 洗髪の際は周囲を汚す場合がありますので、「タオル」を敷いたり、「洗面器」などを併用してください。

※ 臀部洗浄の際は周囲を汚す場合がありますので、「紙おむつ」を敷いたり、「差込み便器」などを併用してください。

4. 使用後はノズルを止水の位置に合わせ、閉じます。



※ 携帯の際は、水がもれるおそれがあります。
ノズル部を上に向けて、持ち運びください。

警告

- 本体に高温のお湯などをいれてキャップを閉めないでください。本体内の空気が膨張して、ノズルからお湯が噴出しやけどの原因となります。

注意

- 臀部に炎症、その他異常がある場合、専門医の指示を受けてください。
- 煮沸消毒はしないでください。本体が変形する原因となります。
- ご使用の際は水またはぬるま湯を入れてください。耐熱温度以上のお湯を入れるとジャバラが縮まなくなり、曲げ機能が低下するおそれがあります。
- 携帯時は、必ずノズルを閉め、本体が倒れたり、押しつぶされないようにして、ポリエチレンなどの袋に入れてください。衝撃や本体内の温度変化などにより液もれすることがあります。
- お湯などを入れてキャップをしたままストーブなどの熱源機器の周辺や、直射日光の当たる場所に放置しないでください。温度変化により本体内の空気が膨張し、ノズルからお湯が噴出することがあります。
- キャップの内側に Oリングがあります。洗浄の際など紛失しないように十分注意してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外での使用はしないでください。
- 塩素系漂白剤での使用は、光沢が落ち黄ばみのおそれがありますが、使用に問題はありません。
- 熱水消毒器・乾燥機はご使用できません。高温になりジャバラの機能が低下します。
- 薬液消毒は、エタノール等をご使用ください。
- 本体内の液温を確認してから使用してください。やけどの原因となります。お湯などの出方をみながら本体を押さえる力を調整してください。

〈原料樹脂〉 本体・キャップ・ノズル ポリプロピレン
Oリング シリコンゴム
〈容量〉 450mL (最大目盛り容量) 〈耐熱温度〉 75℃

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corporation

MADE IN JAPAN