

福浴 回転バスボード 取扱説明書

※ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、読み終わった後は大切に保管ください。

1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故発生を未然に防ぐためのものです。いずれも重要事項ですので必ず守って下さい。

⚠ 警告 誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意 誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 警告

- 利用者ご自身では、本バスボードをはね上げないでお使いください。介助者が完全に浴槽から取り外すか、浴槽に設置したままお使いください。
- 使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が介助してください。
- 取りつける時、ストッパーと浴槽のふちを密着させてしっかり固定してください。ストッパーを使わない、隙間がある、ストッパーねじが緩く締められていると、バスボードが動き転落の可能性があり危険です。
- 浴槽縁と本体設置面からの本体張り出しは2cm未満でお使いください。張り出した端に座ると傾き、転倒の恐れがあります。
- 浴槽縁には長尺方向の両端共3cm以上で全面に乗せてください。一部が乗っている状態では転落の可能性がありえます。座面側ストッパー位置ガードはグリップと反対側端に装着されていることを確認してください。
- 回転座面が本体ボードにしっかりと装着されていることを確認してください。転倒や座面破損がありえます。
- 本体ボードの孔は水抜き用です。指を入れないでください。骨折などケガの可能性がありえます。
- ストッパーを浴槽のふちの上に乗せて使用しないでください。ストッパーと浴槽のふちとの幅が合わない場合は無理に押し込んだりしないでください。ストッパーが破損・変形し正常に使用できない恐れがあります。
- バスボードと浴槽の間に隙間をつくらないでください。浴槽の中央付近への取り付けはしないでください。浴槽内転落するなど事故発生の可能性がありえます。
- 身体やバスボードにシャンプーや石けんがついたままのご使用は滑りやすく、転倒やけがの原因になりますので、よく洗い流してからご使用ください。
- バスボード用途以外では使わないでください（例：お湯をかきまぜる。浴槽の中に入れる。風呂蓋にする。子供を遊ばせる、踏み台するなど）。本体破損や事故発生の可能性がありえます。
- 体重が100kgを超える方は使用しないでください。本体が破損し、浴槽内に転落の危険性があります。

⚠ 注意

- ご使用前にストッパーにゆるみのないことをご確認ください。繰り返し使用によるゆるみ発生がありえます。
 - 本体に破損がないことをご確認ください。
 - ご使用時の全動作はゆっくりと確実にを行い、バスボードに体をひっかかないようご注意ください。
 - 本製品は日本国内においてのみ使用できます。日本以外での使用は保証の範囲には入りません。
- ※You can use this product only in Japan. Product liability is effective only in Japan.


2. 取付可能浴槽サイズ目安 外寸 72cm ~ / 内寸 45cm ~ 66cm

⚠ 警告 浴槽縁と本体設置面から本体張り出しが2cm未満。両端共3cm以上が本体幅全面に乗ること。使用前に確実に取り付けられているかご確認ください。

3. 各部名称および梱包内容



グリップ
本体ボード
回転座面

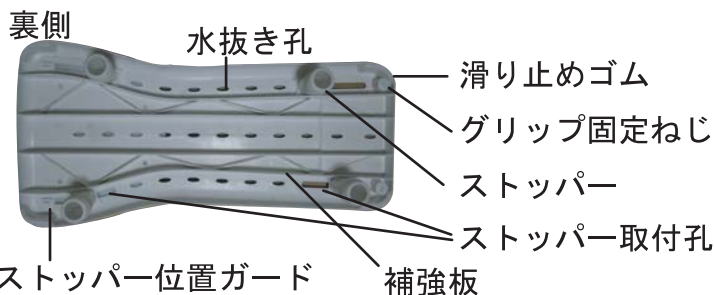

裏側
水抜き孔
ストッパー位置ガード
補強板

滑り止めゴム
グリップ固定ねじ
ストッパー
ストッパー取付孔

梱包内容：本体1本、グリップ1本、ストッパー4本、グリップ・ストッパー共用ねじ6個、ねじ止め用コイン1枚、取扱説明書1枚、保証書1枚


福浴 回転バスボード 取扱説明書

4. グリップ取付方 **⚠警告** 確認も含めて、ガタなどの不具合のないよう組み立ててください。
グリップをグリップ孔に挿入し、ネジ孔の裏面から、ネジを止めます。
緩みのないようコインなどでしっかりと留めます。
グリップの向きは本体側となるのを推奨します。




5. 浴槽への設置の仕方 **⚠警告** 確認も含めて、しっかりと確実に設置ください。

- (1) ストッパーをストッパー用ネジ孔に通し、ネジを仮止めします。
- (2) 座面を浴槽に入る所となるように、本体ボードを浴槽に橋渡し、ストッパーを内壁面に密着させ、ストッパー用のネジをコインなどで緩みのないよう締めます。
- (3) 回転座面を裏面にある矢尻状留めピンが4本を、本体ボードの座面留め孔に差し込み、上から均一に押さえ、設置完了です。

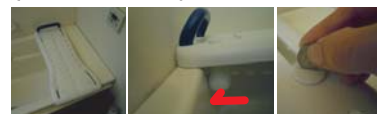

⚠警告 ご確認ください

設置場所に異物や石けんなどの滑りやすいものがない
バスボードの両端とも浴槽縁から浮き上がっていない
浴槽縁に両端とも3cm以上乗っている
ストッパーが浴槽内壁にしっかり密着している
本体ボードの浴槽からの突出は2cm未満

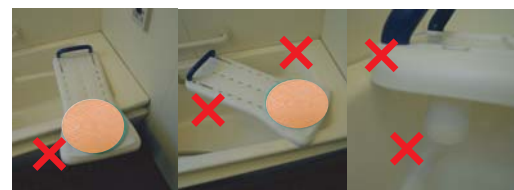

6. 使い方 **⚠警告** 本人の体調が悪い場合は入浴を避けてください。動作すべてゆっくり確実に安全に行ってください。製品本来目的以外には使わないで下さい。

- (1) 座面に深く腰掛けます。できればグリップや本体を握ります。
⚠注意 ストッパー用孔や水はけ用孔に指を入れないでください。
受傷する可能性があります。
- (2) 浴槽に近い足を上げ、座面を回転させて、片足を浴槽に入れます。
浴槽内に入ったら、もう片方の足も同様に浴槽内に入れます。
- (3) 浴槽内につかりやすい位置に足を置き、静かにつかります。
- (4) 浴槽から出る場合は、入る場合と逆の手順で行います。



⚠注意 介助者は、ボードを浴槽から外しても構いませんが、落とさないよう、十分ご注意ください。また、再設置時にも最初の取り付け同様しっかりと設置できているかご確認ください。

7. お手入れの仕方

●中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かげ干しか、乾いた布で空ぶきしてください。

⚠警告 グリップ・ストッパー・座面・ネジ類などは正規・正常品をお使いください。事故原因になりますので、紛失・破損時には、正規部品をお買い求めください。

⚠注意 金属たわしなど、本体を痛めるものは使わないでください。pH6以上のアルカリ溶液、80°以上のお湯にはさらさないようにしてください。

8. 製品仕様
- | | | | |
|-------------|--|--------|---------------|
| 重量 | 3.1 Kg | 耐荷重 | 100Kg |
| 材質 | 本体ボード、グリップ：PP（ポリプロピレン）
回転座面：EVA、PP
回転機構部品：ステンレススチール、樹脂 | | |
| サイズ | 本体：幅36cm、長さ74cm、板厚3cm
グリップ：幅23cm、高さ10cm、直径2.5cm
回転座面：直径28cm、浴槽からの高さ5.5cm | | |
| TAISコード | 01255-000004 | JANコード | 4562304182029 |
| 分類 (CCTA95) | [1]093303: 入浴用チェア、[2]123006: ターンテーブル | | |

9. お問い合わせ

有限会社サテライト 〒659-0075 兵庫県芦屋市津知町14-15 木ノ下ビル2階
電話 0797-24-9015、Fax 0797-24-901